

A woman in red scrubs and blue gloves is loading a Miele dishwasher into a white kitchen unit. The setting appears to be a clinical or dental office, with a white countertop, a paper towel dispenser, and a glass door in the background.

Miele

Gamme avancée. **Lavage optimisé.**

Nettoyage efficace et automatique des instruments dentaires avec le laveur d'instruments dentaires PWA 8672.

Miele Professional. Immer Besser. (Toujours mieux.)




Dites adieu à vos anciennes habitudes. Et bonjour à la productivité!

En choisissant un laveur d'instruments dentaires pour traiter vos instruments, vous pouvez économiser du temps et des ressources précieuses tout en augmentant les résultats de lavage. Passez au niveau supérieur dans votre clinique dentaire avec notre modèle PWA 8672 pour un lavage des instruments simple, sûr, durable et rentable.



Rapidité

Instruments lavés
en **25 minutes**

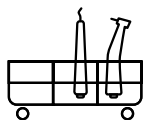

Grande capacité

lavage d'une grande variété
d'instruments dentaires



Traitement constant, précis et plus sûr

que le nettoyage par ultrasons

2 programmes

conçu spécifiquement pour
les instruments dentaires,
notamment l'utilisation d'un
agent neutralisant.



Durabilité

économies de ressources grâce
à des programmes optimisés,
pompe à chaleur à vitesse variable
et dosage précis

Touches sensibles **intuitives** et **rapides**

Réduction de la charge de travail

Du temps pour d'autres tâches



Le lavage des instruments à l'aide de solutions professionnelles automatisées réduit le risque de blessures du personnel lors de la manipulation de matériel tranchant. Le risque de contamination est ainsi réduit au sein de votre clinique, contribuant ainsi à créer un environnement sûr pour tous.



En savoir plus :
www.miele.ca/pro/exploreline-dent

Des résultats hygiéniques. D'une facilité étonnante.

Bénéficiez de l'utilisation intuitive et de nombreuses autres fonctionnalités qui vous faciliteront vos tâches quotidiennes de traitement des instruments.

Efficace.

Le système de nettoyage entièrement automatisé garantit un nettoyage constant de 24 cassettes de taille moyenne (8 x 6 pouces) ou de 12 cassettes de grande taille (8 x 11 pouces). Grâce à un cycle court de seulement 25 minutes, il optimise le flux de travail et améliore l'efficacité. Sa nouvelle interface utilisateur conviviale, accompagnée d'un guide pratique, assure une utilisation simple et intuitive pour tous les opérateurs.

Adaptable.

Deux programmes dentaires accompagnés de plus de 40 paniers, compléments et adaptateurs, permettant une intégration fluide dans divers segments de la dentisterie. Il répond aux besoins de multiples groupes cibles, allant de la dentisterie générale à la chirurgie orale, jusqu'aux pratiques sous sédation.

Conforme.

Le PWA 8672 est équipée de dispositifs de sécurité intégrés, incluant une surveillance complète, la documentation du processus MOVE, une variante de séchage actif avec filtre HEPA et des indicateurs de nettoyage pour valider le cycle. Classé comme dispositif médical de classe II, il est enregistré auprès de la FDA et de Santé Canada. Les agents ProCare Dent — détergent, neutralisant et agent de rinçage — travaillent en synergie pour nettoyer, protéger et sécher, garantissant la longévité des instruments et la préservation de la cuve de lavage. Un programme supplémentaire « Rafrâchir » contribue à prolonger la durée de vie des instruments et de la chambre.

Rentable.

Une pompe chauffante à vitesse variable, associée à des pompes de dosage précises, contribue à des économies durables en produits chimiques et en coûts d'exploitation. La consommation de détergent est particulièrement faible : seulement 69 mL par cycle. Fidèle à la qualité Miele, l'équipement est testé pour 15 000 heures d'utilisation, offrant une durée de vie supérieure à 10 ans, avec disponibilité des pièces de rechange pendant au moins 15 ans après la fin de sa fabrication.



Un lavage en profondeur. Et pas de simples secousses.

Le modèle PWA 8672 est votre point de départ pour le lavage automatisé des instruments.

Le laveur d'instruments dentaires PWA 8672 est idéal pour les cliniques de toutes tailles, qui cherchent à améliorer l'efficacité de leur personnel et de leurs flux de travail. Le laveur d'instruments dentaires vient compléter l'équipement existant dans les cliniques dentaires en fonctionnant en parfaite synergie avec tous les types de stérilisateurs.

Votre clinique. Votre choix.

Nous proposons une large gamme de composants et de produits chimiques pour que le laveur d'instruments dentaires PWA 8672 puisse répondre parfaitement à vos besoins individuels.

Que vous exerciez la dentisterie générale, l'orthodontie ou l'implantologie, nos composants et accessoires sont spécialement conçus pour nettoyer parfaitement tous les types d'instruments.

De plus, notre gamme de produits chimiques ProCare Dent vous permet de choisir le type de traitement pour vos instruments, garantissant ainsi des résultats fiables et hygiéniques avant la stérilisation.



En savoir plus :
www.miele.ca/pro/exploreline-dent





Largeur , hauteur, profondeur [mm] :	835 (820 ¹), 600, 600 ²
Hauteur, largeur, profondeur [po] :	32 7/8 (32 1/4 ¹), 23 5/8, 23 5/8 ²
Durée de cycle* / Vario Dental [min] :	25
Durée de cycle* / Vario Dental Plus [min] :	29
Cassettes (taille grande 8 x 11 po) [capacité] :	12
Cassettes (taille moyenne 8 x 6 po) [capacité] :	jusqu'à 24
Systèmes de dosage / Options de mise en réseau (par ex. DOS K 85/1 flex) :	1
Adoucisseur d'eau :	◆
Condenseur de vapeur :	—

¹ Appareils sous-comptoir ² Appareil à poser avec couvercle H 835, P 700 mm

* Cycles de lavage basés sur le raccordement électrique 2 CA 208 V; 3 CA 208 V; 60 Hz, 6,2 kW (chauffage: 5,4 kW), température de l'eau chaude 65°

PWA 8672

Numéro de matériel: 12 800 830

Numéro d'article: 62 8672 02NAM

Trouvez ici les composants correspondants :

www.miele.ca/fr/p/composants-1974.htm



Laveur d'instruments dentaires PWA 8672

Appareil encastrable/à poser sans couvercle	◆
Pompe de circulation [Qmax. l/min]	500

Commandes / Programmes

CommandeTactile / Nbre de programmes	5
Nombre d'emplacements de programme libres	5
FermetureAuto – Verrouillage de porte automatique	◆
Signal sonore à la fin du programme	◆
Module de communication Ethernet	—
Module de communication Wi-Fi	◆

Raccordements à l'eau

Eau froide 1x 3/4 po MGHT sur site/Débit 7,5 l/min (1,98 gpm) / Pression d'alimentation en eau 200-1000 kPa (29-145 psi)	◆
Eau chaude 1x 3/4 po MGHT sur site/Débit 7,5 l/min (1,98 gpm) / Pression d'alimentation en eau 200-1000 kPa (29-145psi)	◆
Raccordement de vidange 1x3/4 po Raccord cannelé requis sur site / Débit 16 l/min (4,23 gpm)	2
Pompe de vidange Ø 22, hauteur de refoulement : max. 100 cm	◆

Raccordement électrique

2 CA 208 V 30 A 60 Hz , avec fiche NEMA L6-30P, prise NEMA L6-30R correspondante requise sur site. Alternative: 3 CA 208 V 20 A 60 Hz	◆
Chauffage [kW]	5,4
Pompe de circulation [kW]	0,8
Puissance totale de raccordement [kW]	6,2
Fusible [A]	2 x 30

Systèmes de dosage

1 doseur de porte pour produit de rinçage	◆
1 pompe de dosage pour détergent liquide (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm)	◆
1 pompe de dosage pour agent neutralisant (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm)	◆

Options de mise en réseau

DOS K 85 flex, DOS K 85/1 flex, DOS K 85 comfort ou DOS K 85/1 comfort pour produits liquides	1
---	---

Adoucisseur d'eau

Pour eau chaude et froide, max. 65 °C	◆
---------------------------------------	---

Dimensions, poids

Dimension extérieur, nette H x l x P [mm] (po)	820 x 598 x 598 (32 1/4 x 23 9/16 x 23 9/16)
Dimensions de la cuve H x l x P [mm] (po)	522 x 536 x 523 U ¹ (20 1/2 x 21 1/8 x 20 5/8)
Volume utile de la cuve [l] (cu.pi)	145 (5,12)
Poids net [kg] (lbs)	68 (150)
Dimension extérieur, brute H x l x P [mm] (po)	940 x 675 x 745 (37 x 26 9/16 x 29 5/16)
Poids brute [kg] (lbs)	74 (163)

Boîtier

Inox (SST)	◆
------------	---

Respect des normes


EN 61010-2-040, EN 61326-1	◆
----------------------------	---

Certificats d'essais

Santé Canada : dispositif médical de classe II	◆
États-Unis : 510(k) Exemption	◆
IP 21	◆

¹ O : dans la zone du panier supérieur, U : dans la zone du panier inférieur

Paniers, adaptateurs et filtres

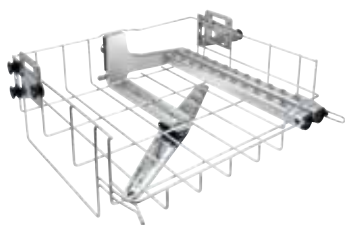


A 105/1

Panier supérieur, réglable en hauteur, sans buses d'injection, pour divers instruments.

- Côté droit : 22 positions d'injecteurs
- Côté gauche libre pour les compléments
- Tuyau de filtration A 800 à utiliser dans l'une des barres à injection (non fourni)
- Bras de lavage intégré
- Dimensions de chargement H 225 +/- 30, l 360, P 445 mm (une profondeur de 460 mm est disponible sur le côté gauche sur une largeur de 215 mm)
- H 202, l 528, P 528 mm

Paquet d'accessoires :


- Ensemble d'outils A 838 [nombre] : 1

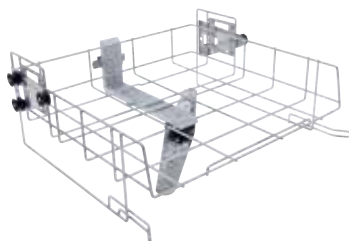

A 102

Panier supérieur, réglable en hauteur, pour compléments.


- Hauteur de chargement 205 +/- 30 mm, largeur 475 mm, profondeur 443 mm
- Avec bras de lavage intégré
- Façade ouverte
- H 206, l 528, P 527 mm

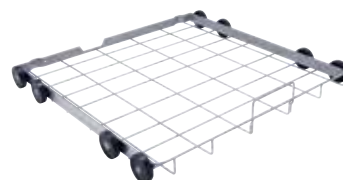

A 151

Panier inférieur, pour différents paniers à mailles DIN standard et différents compléments.

- Hauteur de chargement en fonction du panier supérieur
- Combinaison avec A 102 H 230 +/- 30 mm A 105 H 210 mm
- Largeur de chargement : 490 mm, profondeur de chargement : 498 mm
- H 88, l 529, P 522 mm

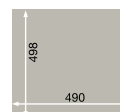

A 315/1

Module, pour une capacité accrue et le traitement d'instruments avec lumen.

- Augmente la capacité de 22 à 44 injecteurs
- Rétrocompatible avec tous les modèles A 151 du marché
- Compatible avec tous les adaptateurs et accessoires dentaires et ENT standard
- Buses d'injection non fournies
- Tuyau de filtration A 800 à utiliser dans l'une des barres à injection (non fourni)
- Dimensions de chargement en cas d'utilisation dans un panier inférieur A 151 tout en utilisant simultanément un panier supérieur A 105/1 : H 210 +/- 30, l 383, P 479 mm
- Hauteur de chargement de la barre à injection en cas d'utilisation d'un panier supérieur A 105/1 135 mm +/- 30
- H 145, l 492, P 542 mm

Paquet d'accessoires :

- Ensemble d'outils A 838 [nombre] : 1



A 800

Tuyau de filtration, pour le traitement sûr et économique des instruments avec lumen.

- Filtre à tamis en inox multicouche pour chariots de chargement
- Taille des mailles 63 µm
- Traitement possible avec une brosse de nettoyage A 804
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur A 105/1, le module A 315/1 et l'appareil APWD 646
- H 405, l 22,5, P 22,5 mm



A 803

Support, pour la charge d'instruments de transmission.

- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur A 105/1, le module A 315/1 et l'appareil APWD 646 avec tuyau de filtration A 800
- Convient pour de nombreuses pièces à main et turbines
- H 31,5, l 32, P 40 mm



A 804

Brosse de nettoyage, pour le nettoyage optimal du tuyau de filtration A 800.


- Convient pour le nettoyage d'un tuyau de filtration A 800
- Brosse métallique torsadée avec poils en spirale
- Poignée avec œillet
- Longueur 500 mm, longueur de la brosse 100 mm
- H 500, l 20, P 20 mm



A 801

Adaptateur pour une utilisation de AUF 1 et AUF 2 en association avec A 105/1.

- H 50, l 50, P 50 mm

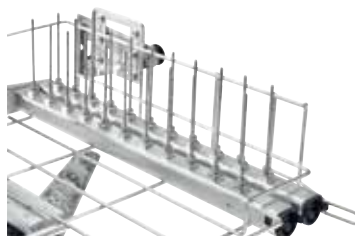


A 836

Ensemble de buses d'injection, pour les instruments avec lumen utilisés dans les applications dentaires.

- Destiné à une utilisation dans le module A 315, l'appareil APWD 646 ou le panier supérieur A 105/1
- Pack de 22 buses d'injection dentaires (A 833)

Compléments

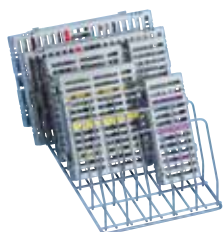

E 523

Complément, pour 6 paniers à mailles.

- Équipé de 7 supports (6 compartiments), H 145, espacement 50 mm
- H 151, l 220, P 450 mm



E 379

Complément, pour instruments divers.

- Grillage de 0,8 mm, maillage de 1,7 mm, cadre périphérique de 5 mm
- Équipé de 2 poignées de transport
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
- H 110, l 180, P 445 mm



E 521/2

Complément, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou molaires orthopédiques.

- Taille de compartiment : 21 x 80 mm
- Convient également pour des pinces comme celles utilisées en podiatrie
- H 135, l 100, P 189 mm



E 522/1

Complément, pour 9 porte-empreinte dentaires.

- Équipé de 9 supports
- H 140, l 100, P 190 mm



E 520

Complément, pour instruments pour canal radiculaire.

- Convient pour 17 instruments pour canal radiculaire
- Rabattable
- Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C / 134 °C
- H 45, l 75, P 30 mm



E 197

Complément, pour instruments divers.

- Largeur des mailles sur la base 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C / 134 °C
- H 42, l 150, P 225 mm



E 363

Complément, pour instruments divers.

- Taille des mailles: 1 mm
- Équipé d'un couvercle
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
- Sans supports pour instruments
- H 55, l 150, P 225 mm



E 473/2

Filtre avec couvercle, pour divers petits composants.

- Crochets en place
- Avec couvercle à fermeture rapide
- H 88,4, l 66, P 66 mm



E 146

Complément, pour instruments divers.

- Pour les masques de sédation dentaire
- Largeur des mailles sur la base 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- Équipé de 2 poignées de transport rabattables
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
- H 55, l 150, P 225 mm



E 378

Complément, pour instruments divers.

- Grillage de 0,8 mm, maillage de 1,7 mm, cadre périphérique de 5 mm
- Équipé de 2 poignées de transport
- Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
- H 110, l 460, P 460 mm



E 337/1

Complément, pour instruments verticaux.

- Convient pour des sondes, des pinces et des miroirs dentaires
- Équipé de 4 supports en plastique
- 12 compartiments, env. 22 x 28 mm
- 4 compartiments, env. 25 x 28 mm
- 48 compartiments, env. 13 x 14 mm
- H 148, l 173, P 445 mm



E 130

Complément, pour 10 tablettes.

- Équipé de 11 supports, hauteur: 170 mm, espacement: 35 mm
- Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
- H 180, l 180, P 445 mm

Compléments Bases



E 131/1

Complément, pour 5 paniers à mailles / haricots.

- Convient pour 5 paniers à mailles ou haricots
- Équipé de 6 supports, hauteur: 160 mm, espacement: 80 mm
- Pour panier inférieur
- Pour le panier à mailles E 363
- H 168, l 180, P 495 mm



UG 30-60/60-85/1

Socle fermé, profondeur 60 cm, largeur 60 cm.

- Convient pour tous les appareils d'une largeur et d'une profondeur de 60 cm
- H 317, l 600, P 600 mm



UG 30-90/60-85/1

Socle fermé, pour appareil et meuble contigu, profondeur 60 cm, largeur 90 cm.

- Convient pour le déminéralisateur PG 8595 et l'armoire DOS PG 8596
- Socle en inox, boulonné à l'appareil
- H 300, l 897, P 542 mm

Accessoires de dosage



PG 8596

Unité de distribution, pour produits chimiques et modules de dosage, inox.

- 2 tiroirs amovibles contenant chacun 3 bidons de 5 l
- Dimensions intérieures: H 285–690, l 250, P 425–555 mm
- Capacité pour 2 modules de dosage par niveau
- Divisée en 2 niveaux: tiroirs amovibles avec bac d'égouttage sur rails télescopiques pour l'alimentation de conteneurs en produits chimiques, taille des bidons (L x l x H)
Capacité max.: 6 bidons de 5 l (245 x 145 x 225 mm*).
- Le tiroir inférieur accueille également des conteneurs plus grands:
 - 2 x 10 l: 140 x 193 x 307 mm
 - 2 x 10 l: 223 x 203 x 321 mm
 - 2 x 10 l: 229 x 193 x 323 mm
 - 2 x 10 l: 194 x 204 x 353 mm
 - 1 x 20 l: 289 x 233 x 396 mm
 - 1 x 25 l: 288 x 234 x 456 mm
- Le bac d'égouttage permet une meilleure vidange résiduelle des bidons de produit
- H 835, l 300, P 600 mm



DOS K 85/1 flex

Module de dosage pour bidons de 5 l, pour le dosage automatique de produits liquides, avec surveillance de « conteneur vide ».

- Contrôle de dosage – sécurité élevée des processus selon la norme EN ISO 15883
- Pour le dosage des détergents liquides / agents neutralisants
- Canne d'aspiration de 214 mm pour bidons de 5 l avec capuchon flexible
- Jeu d'adaptation pour canne d'aspiration pour bidons de 10–30 l, disponible auprès du service à la clientèle

Accessoires pour le traitement avec de l'eau entièrement déminéralisée



PG 8595

Déminéralisateur, pour deux cartouches de déminéralisation totale, inox.

- Convient pour VE P 2800 et VE P 2000
- Raccordement du module de conductivité ConductivityMeter CM/1 possible
- Dimensions externes : H 835 (820 sans couvercle), l 300, P 600 mm
- H 835, l 300, P 600 mm



PG 8595

Déminéralisateur, pour deux cartouches de déminéralisation totale, blanc.

- Convient pour VE P 2800 et VE P 2000
- Raccordement du module de conductivité ConductivityMeter CM/1 possible
- Dimensions externes : H 835 (820 sans couvercle), l 300, P 600 mm
- H 835, l 300, P 600 mm



VE P 2800/1

Cartouche de déminéralisation totale pour le traitement de l'eau.

- Débit max. : 800 l/h
- Le module de conductivité ConductivityMeter CM/1 mesure la capacité restante
- Température d'arrivée d'eau max. 40 °C – plage de pression de 0,5–10 bar
- Volume de résine 19 l
- H 570, Ø 230 mm



LP 2800/1

Cartouche de déminéralisation, vide, pour le remplissage manuel avec des résines à usage unique.

- Débit max. : 800 l/h
- Température d'arrivée d'eau max. 40 °C – plage de pression de 0,5–10 bar
- Volume de résine 19 l
- H 570, Ø 230 mm



CM/1

Module de conductivité ConductivityMeter pour la mesure du niveau de conductivité et indicateur de remplacement de cartouche.

- Convient pour les cartouches de déminéralisation totale
- Indicateur optique et sonore de remplacement de cartouche
- Mesure en 10 points dans la plage 0–199,9 µS/cm
- Affichage sur une ligne, possibilité de raccordement à une DEL externe
- Support mural et bloc d'alimentation inclus
- H 110, l 125, P 52 mm



Miele 360PRO.

Une solution
sur mesure pour
chaque clinique
dentaire.

La sécurité avant tout.

Chez Miele Professional, nous savons que la sécurité des patients et du personnel est une responsabilité essentielle dans toutes les cliniques. C'est pourquoi nous avons créé 360PRO, une solution de système holistique pour le secteur dentaire, qui garantit l'hygiène et le contrôle des infections à 360 degrés.

Grâce à des appareils très performants, des produits chimiques personnalisés, un logiciel moderne et une excellente assistance technique, vous pouvez optimiser le traitement des instruments et offrir les niveaux les plus élevés de maintenance des instruments au sein de votre clinique.



Plus d'informations sur Miele 360PRO
www.miele.ca/pro/dental



Pour une **protection** totale.

Notre service PROtect combine des prestations complètes, un contrôle optimal des coûts et une grande disponibilité des pièces de rechange. Nous fournissons des conseils transparents, nous coordonnons les rendez-vous et nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange appropriées, pendant au moins 15 ans après l'arrêt de la production en série des appareils.



Plus d'informations sur PROtect
PROtect – Service récurrent | Miele Professional

Rien ne remplace un **contact personnel.**

Contactez-nous pour en savoir plus sur votre nouveau gain de temps –
utilisez le formulaire de contact disponible sur notre site Web.

CANADA

professional@miele.ca

www.mieleprofessional.ca



Plus d'informations sur le modèle PWA 8672
de Miele et le formulaire de contact
www.miele.ca/pro/exploreline-dent