

Miele

ProClean Check

Contrôles de routine pour des résultats optimaux.

Miele Professional. Immer Besser. (Toujours mieux.)



Vérification des résultats du processus pendant le fonctionnement courant.


Un traitement fiable est indispensable dans les cabinets dentaires. Une validation réussie du processus jette les bases pour garantir l'efficacité du traitement, mais cette étape ne suffit pas à elle seule. Les processus doivent également être surveillés pendant le fonctionnement courant. La solution de Miele Professional, sous la forme d'indicateurs ProClean Check, donne à votre équipe dentaire les outils nécessaires pour évaluer et documenter les normes d'hygiène.

ProClean Check

Utilisation : pour vérifier l'efficacité du lavage des machines automatiques dans le cadre des contrôles de nettoyage de routine.

Fonction : vérification de routine des cycles de nettoyage dans les laveurs automatiques et les laveurs-désinfecteurs à l'aide de bandelettes indicatrices contenant un mélange de composants de couleur naturelle spécialement combinés. La salissure colorée de l'indicateur se dissout avec la majeure partie du produit de nettoyage et est balayée avec le liquide de lavage.

Application : placez un support de contrôle ProClean Check avec un indicateur ProClean Check à différents endroits sur les paniers inférieur et supérieur afin de contrôler les performances dans toutes les zones du laveur. Après le cycle de nettoyage, retirez chaque support d'indicateur ProClean Check, analysez les indicateurs ProClean Check à l'aide du tableau de référence et consignez les résultats.

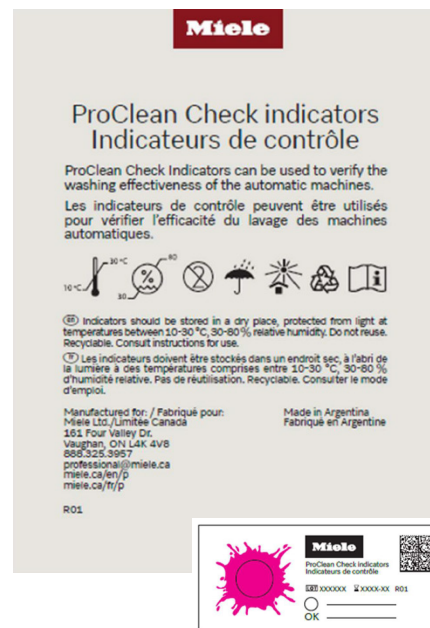

Glisser l'indicateur à l'intérieur du support ProClean Check (x2)



Placer-le dans les paniers supérieur et inférieur de la machine



Cycle de programme



Inspection visuelle des indicateurs



Documentation



200 indicateurs par unité d'emballage