

Miele



Setzen Sie auf Effizienz. Kompakt gedacht.

Entdecken Sie CompactLine —
die clevere, platzoptimierte Lösung
für eine effiziente und intuitive
Instrumentenaufbereitung.



Miele Professional. Immer Besser.


CompactLine



Entdecken Sie eine neue Dimension der Hygiene.

Alles in einem Gerät.

Integrierte Schublade
mit optimiertem Stauraum

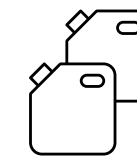

Platz für 2x5-Liter-Kanister für Prozess-
chemikalien + 1 Flasche

Intuitive und **schnelle**  **Touch-Bedienung**



**Für alle
zahnmedizinischen
Disziplinen**



30 Minuten für die effi-
ziente Aufbereitung Ihrer
Instrumente

Gebaut, um **nachhaltig**
zu sein. Optimierte
Programme.

Nachhaltig konzipiert, um länger zu halten – mit Ersatz-
teilen, die mindestens 15 Jahre nach Produktionsende
verfügbar sind. Der Ressourcenverbrauch passt sich an die
Bedürfnisse der einzelnen Zyklen an.



**Miele MOVE
MedDent+**



Mehr über CompactLine
www.miele.ch/pro/compactline-dent

Sechs Gründe, warum CompactLine die richtige Wahl für Sie ist

01 Optimiert und kompakt

CompactLine ist die ideale Lösung für Praxen mit geringerem Instrumentenaufkommen und bietet eine effiziente Aufbereitung in einem platzsparenden Design. Es verfügt über eine integrierte Lagerung und Ausgabe für Prozess Chemikalien und bietet einen einfachen Zugang zu den Kanistern für zusätzlichen Komfort. Die CompactLine bietet sowohl Leistung als auch Wert und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen Ihrer Praxis mit dem Komfort eines Einstiengeräts.



02

Schnell und intuitiv

CompactLine verfügt über ein Schnellprogramm für zahnärztliche Hand- und Winkelstücke und Turbinen, das Ergebnisse in 30 Minuten liefert. Minuten. Das 7-Zoll-Farb-Touch-Display bietet einen einfachen Zugang zu Ihrem bevorzugten Programm, während die animierte Anleitung auf dem Bildschirm bei der grundlegenden Wartung und der Bedienung hilft. Eine Animation mit grossen Symbolen auf dem Bildschirm zeigt auch den Programmstatus und die Chargenfreigabe auf dem Display an und sorgt für einen reibungslosen und problemlosen Betrieb.

03

Bequem und flexibel

CompactLine verbessert die Arbeitsabläufe durch Beleuchtung im Inneren der Kammer, das für klare Sicht beim Be- und Entladen sorgt. Die speziell entwickelten Komponenten und Einsätze eignen sich für verschiedene Disziplinen und ermöglichen eine gründliche Aufbereitung aller Instrumente. Die Bediensprache lässt sich über eine Sensortaste auf dem Display schnell einstellen und bietet eine nahtlose Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Praxis.

04

Leistungsstark und zuverlässig

Erleben Sie überlegene Reinigungsleistung. Die drehzahlvariable Pumpe der CompactLine passt den Spüldruck an die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Zyklusphasen an. Integrierte Sensoren überwachen die Funktion der Sprüharme und den Spüldruck und gewährleisten so eine zuverlässige Leistung. Mehrstufige Filter sorgen zudem für zusätzliche Sicherheit. Die CompactLine erfüllt alle relevanten internationalen Normen, einschliesslich EN ISO 15883, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.



05

Nachhaltig und langlebig

Mit 15'000 Betriebsstunden getestet, garantiert CompactLine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ersatzteile bleiben mindestens 15 Jahre nach Produktionsende verfügbar. Die wirtschaftliche Programmgestaltung des Systems optimiert die Effizienz durch kurze Laufzeiten und spart Wasser, Energie und Chemikalien. Mit digitaler Betriebsanleitung und umweltfreundlicher Verpackung verbindet CompactLine Spitzentechnologie mit Nachhaltigkeit.

06

Intelligent und servicefreundlich

Geniessen Sie die nahtlose Integration in Ihr Praxisnetzwerk, um eine schnelle und einfache Einrichtung zu ermöglichen. CompactLine bietet eine sichere Prozessdokumentation mit individuell einstellbaren Zugriffsrechten für mehr Kontrolle. Dank Miele MOVE MedDent+ können Sie von jedem beliebigen Ort aus auf die Gerätedaten zugreifen und im Falle von Fehlern direkte Serviceanrufe erhalten. Ausserdem vereinfacht der einfache Zugang zu den Komponenten die Wartung und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.

Ein kompakter Überblick

Die CompactLine ist ein effizientes, benutzerfreundliches Reinigungssystem. Es bietet schnelle, hygienische Reinigung und Desinfektion mit fortschrittlichen Funktionen für optimierte Abläufe, die sichere und effektive Ergebnisse gewährleisten.

Schublade für Prozesschemikalien

- Push2Open für einfachere Handhabung
- Ausgestattet mit 2 oder 3 Dosierpumpen für flüssige Prozesschemikalien
- Dosierlanze mit Leerstandserkennung für mehr Prozesssicherheit und einfaches Nachbestellen von Prozesschemikalien

Optimierte Kammer

- Ergonomische Türhöhe für eine komfortable Bedienung
- Kammerbeleuchtung für gründliche Sichtbarkeit
- Leistungsstarke, drehzahlvariable Pumpe für effiziente Reinigung
- Nahtloses Laserschweißen für ein höheres Mass an Hygiene

Intuitives Farb-Touch-Display

- Sichtbare Statussymbole
- Chargenfreigabe direkt am Bedienfeld zur Unterstützung des Arbeitsablaufs
- Animierte Anleitungen zur Selbsthilfe für Routineverfahren

Konnektivität und Prozessdokumentation

- WiFi im Bedienfeld integriert, optional LAN
- Mit Miele MOVE können MedDent+-Gerätedaten eingesehen werden zu jeder Zeit und von jedem Ort aus, was eine Prozessoptimierung ermöglicht
- Zugriff auf Maschinen-Updates und volle Transparenz der Prozessdaten

Effiziente Programme


- Reinigung und Desinfektion von 22 Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen in 30 Minuten
- EcoDry und AutoOpen für effizientes Trocknen
- Weitere Programme und Startvorbahl-Option



Geeignet für alle zahn- medizinischen Disziplinen

Dank einer breiten Palette von Komponenten, die speziell für verschiedene Arten von Instrumenten entwickelt wurden, ist die CompactLine ideal für Fachleute aller zahnmedizinischen Disziplinen sowie für multidisziplinäre Teams. Dank eines flexiblen Korbsystems kann jede Beladung optimiert werden, um die volle Auslastung der Maschine zu gewährleisten. So können Sie Zeit, Kosten und Ressourcen sparen.

Beispielkonfigurationen im neuen Korb APW 153 (Mat.-Nr.: 12537450)

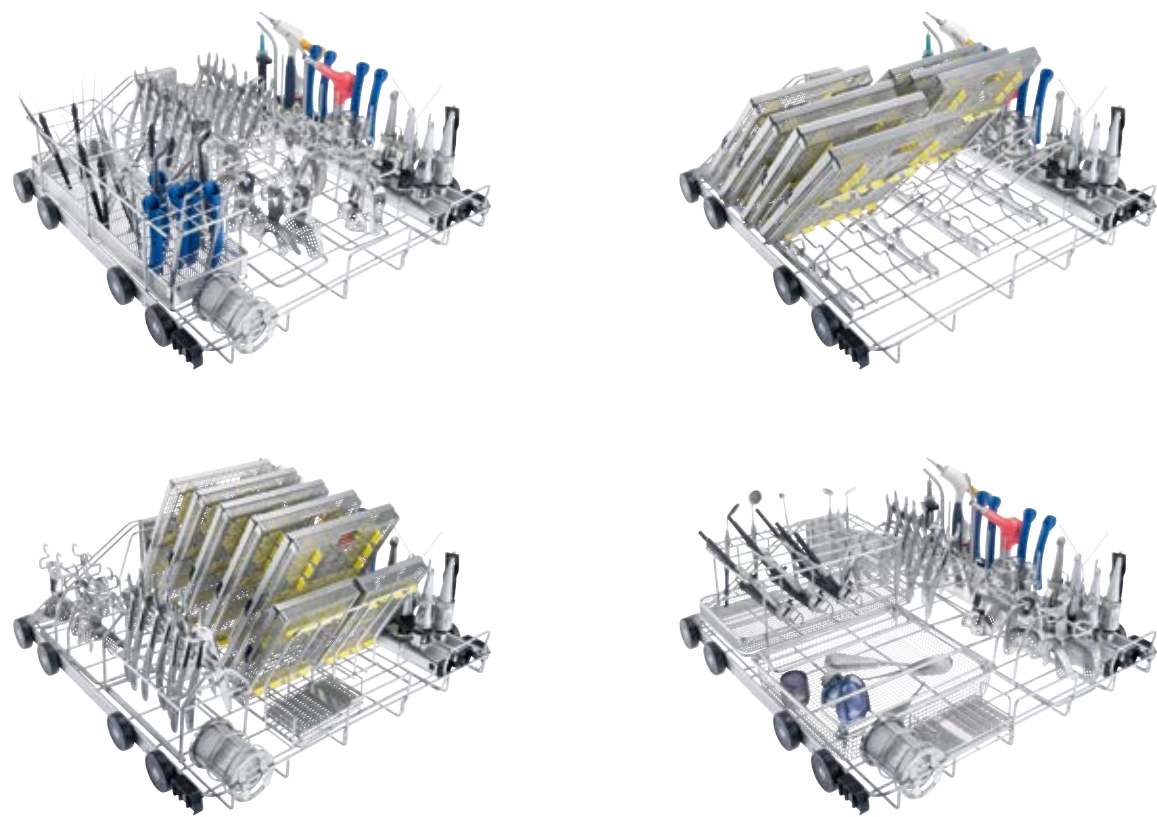

Die perfekte Synergie

Die speziell für die Thermodesinfektoren von Miele Professional entwickelte Prozesschemie ProCare Dent liefert im Zusammenspiel mit den CompactLine-Programmen hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse und schont gleichzeitig die Instrumente und deren Lebensdauer. Entdecken Sie das gesamte Sortiment, von Reinigungs- und Neutralisationsmitteln über Klarspüler bis hin zu Lösungen für Routinekontrollen und Gerätewartung.



Entdecken Sie ProCare Dent
www.miele.ch/pro/procare-dent



Reinigungs-/Desinfektionsgerät	PWD 8682 C [DT DST LAN]
Standgerät mit Deckel	♦
Farbe	weiss
Materialnummer	12949690
Umwälzpumpe [Qmax. l/min]	500
Steuerung/Programme	
TouchControl/Anzahl Programme	8
Freie Programmplätze	5
AutoClose - automatische Türverriegelung	♦
LEDs zur Spülraumbeleuchtung	2
Summer, akustisches Signal bei Programmende	♦
Ethernet-Kommunikationsmodul	♦
WiFi-Kommunikationsmodul	♦
Wasseranschlüsse	
1x Kaltwasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaug sicher nach EN 1717)	♦
1x AD-Wasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaug sicher nach EN 1717)	♦
1x Warmwasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaug sicher nach EN 1717)	♦
Anzahl Zulaufschläuche 1/2" mit 3/4"-Verschraubung, L = ca. 2,0 m	3
Ablaufpumpe Ø 22, Förderhöhe: max. 100 cm	♦
Waterproofsystem (WPS)	♦
Elektroanschluss	
3 N AC 400 V 50 Hz umbaubar auf AC 230V 50Hz, Anschlusskabel ca. 2,0 m, 5 x 2,5 mm² inkl. CEE-Stecker"	♦
Heizung [kW]	8,5
Umwälzpumpe [kW]	0,8
Gesamtanschluss [kW]	9,3
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtungen	
1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger (Länge der Flex-Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	♦
1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel (Länge der Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	♦
1 Dosierpumpe für Klarspüler (Länge der Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	♦
Wasserenthärter	
für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C	♦
Dampfkondensator	
Sprühnebel	♦
Masse, Gewicht	
Aussenmasse H/B/T [mm]	835/600/600
Spülraummasse H/B/T [mm]	400/536/523
Nutzmass Unterkorb H/B/T [mm]	280/490/498
Gewicht [kg]	81
Masse Schublade	
Nutzfläche H/B/T [mm] für 2 x 5 L Kanister	240/305/285
Nutzfläche H/B/T [mm] für 1 x 1 L Flasche	240/160/125
Aussenverkleidung, wahlweise	
Lotosweiss (LW)	♦
Edelstahl (SST)	♦
Normkonformität	
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-040, EN 61326 -1	♦
Prüf- und Kennzeichen	
IP 21	♦
CE 0297	♦
EU 2017/745 (MDR)	♦

Vergleichsblatt

Compact/Expert/SlimLine

CompactLine

PWD 8682 C



ExpertLine

PWD 8682



SlimLine

PWD 7121



Gerätetyp			
Glastür			✓
Thermodesinfektor	✓	✓	✓
Zielgruppe			
Dental	✓	✓	✓
Medizin	✓	✓	
Praxisgrösse	S	M	L
Praktizierende/Zahnärzte bis zu	1 – 3	3 – 8	8 – 12
Häufigkeit der Nutzung pro Tag	1 – 3	1 – 4	3 – 4
Kammergrösse/Spülebenen	1	2	3
Kapazität pro Charge			
Hohlkörperinstrumente bis zu	22	44	66
Patientensets* bis zu	80	160	160
Tabletts (gross) bis zu	10	18	44
Kurzprogramm für Hohlkörperinstrumente	30 min	n.a.	n.a.
Platzierung von Prozesschemikalien	In Schublade integriert	Extern	In technischen Schrank integriert
Trocknen	EcoDry	EcoDry/Aktive Trocknung (je nach Gerätetyp)	Aktive Trocknung
Konnektivität	LAN/WLAN	LAN/WLAN	LAN/WLAN/USB
Prozessdokumentation			
Netzwerk-Drucker	✓	✓	
Miele Move (je nach Schnittstelle)	✓	✓	✓
Process Interface	✓	✓	✓

* Ein Patientenset besteht aus je einem Zahnspiegel, einer Sonde und einer Pinzette



Innovatives Design trifft auf
Umweltverantwortung.

Bei der Entwicklung der CompactLine stand die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Ihre ressourcen-effizienten Programme minimieren den Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch, während die anpassbaren Einstellungen für optimale Leistung sorgen. Auf Langlebigkeit und langfristige Nutzung ausgelegt, lässt sich CompactLine sehr einfach reparieren. Durch die lange Lebensdauer wird Abfall reduziert und ein dauerhafter Wert für Ihre Praxis geschaffen.



Mehr zum Thema Nachhaltigkeit
bei Miele Professional
www.miele.ch/pro/nachhaltigkeit



Vertrauen in die Marke Miele

Miele Professional bietet Spitzenleistung und Qualität. 97% der Kunden würden wieder bei Miele kaufen und vertrauen auf unsere tägliche Exzellenz. Führende Instrumentenhersteller empfehlen Miele für eine sichere und hygienische Aufbereitung, die Materialverträglichkeit und Werterhalt gewährleistet.



Nichts ersetzt den **persönlichen Kontakt.**

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die beste Lösung für die Bedürfnisse Ihrer Praxis zu finden.

Telefon: 0848 551 670

Mo. – Fr. 08:00–17:30



Mehr über CompactLine und Kontakt
www.miele.ch/pro/compactline-dent