

ProCare Dent

Prozesschemikalien für die zahnmedizinische
Reinigung und Aufbereitung

Miele Professional. Immer Besser.



ProCare Dent

Für die effiziente und materialschonende Aufbereitung in der Zahnarztpraxis

Die Systemlösung für Zahnarztpraxen und -zentren

Seit über 60 Jahren steht Miele für Zuverlässigkeit und Innovation in der Medizintechnik. Mit ProCare Dent bieten wir Ihnen eine weiterentwickelte Systemlösung für Zahnarztpraxen und ambulante zahnmedizinische Versorgungszentren – bestehend aus einem umfassenden Portfolio an Prozesschemikalien, die optimal auf die Thermodesinfektoren von Miele Professional abgestimmt sind. Die Aufgabe ist komplex: Sie müssen Verschmutzungen zuverlässig entfernen und Keime wirksam deaktivieren, ohne dabei das empfindliche Aufbereitungsgut, wie etwa hochwertige Übertragungsinstrumente, zu beschädigen.

Materialschonend und vielseitig

Das Sortiment umfasst materialschonende Pulver- und Flüssigreiner, Neutralisationsmittel auf organischer oder anorganischer Basis sowie ein Nachspülmittel, das durch seine spezielle Zusammensetzung eine schnelle und fleckenfreie Trocknung ermöglicht. Sie können zwischen Produkten wählen, die sich für die maschinelle Aufbereitung von Dentalinstrumenten eignen, als auch Prozesschemikalien für Übertragungsinstrumente sowie Hand- und Winkelstücke. Ergänzt wird das Portfolio durch praktisches Zubehör wie Auffangschalen für Kanister und Regeneriersalz – für eine sichere, wirtschaftliche und effiziente Instrumentenaufbereitung.

ProCare Dent - für Sie optimiert

Ein Highlight ist der optimierte Flüssigreiner ProCare Dent 10 MA: Dank verbesserter Rezeptur entfällt die bisherige Kennzeichnung als Gefahrstoff. Die neue Enzymkomponente bietet eine höhere Qualität, und die Gleichwertigkeit in Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit wurde bereits verifiziert – eine zusätzliche Validierung beim Produktwechsel ist nicht erforderlich.

Im Allgemeinen werden unsere ProCare Dent Prozesschemikalien stetig für Sie optimiert. Es reichen kurze Programmlaufzeiten und geringe Dosiermengen, um Verfärbungen sowie Kalkablagerungen zu vermeiden.

Empfindliches Aufbereitungsgut schützen

Mit ProCare Dent sorgen Sie für die zuverlässige Entfernung von Verschmutzungen bei gleichzeitiger Materialschonung.



ProCare Dent

Eigenschaften und Anwendungsbereiche



Der Allrounder für den Praxisalltag

ProCare Dent 10 MA **Flüssigreiniger, mildalkalisch**

- Zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten
- Optimal auf die Prozesse und Reinigungszyklen der Miele Professional Thermodesinfektoren abgestimmt
- Hohe Materialschonung
- Besonders geeignet für empfindliche Materialien
- Schnelle und gründliche Reinigung durch Enzyme
- Gebindegrösse: 5 Liter

Mat.-Nr. 12680640



Der Spezialist für hartnäckige Fälle

ProCare Dent 10 A **Flüssigreiniger, alkalisch**

- Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten
- Optimal auf die Prozesse und Reinigungszyklen der Miele Professional Thermodesinfektoren abgestimmt
- Hohe Materialschonung
- Korrosionsschutz für Instrumente und Trays aus Edelstahl
- Rückstandsarm, da frei von Tensiden
- Sichere Anwendung, da frei von oxidativen Zusätzen
- Gebindegrösse: 5 Liter

Mat.-Nr. 12786440



Der Pulverprofi für die manuelle Anwendung

ProCare Dent 11 A **Pulverreiniger, alkalisch**

- Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten
- Optimal auf die Prozesse und Reinigungszyklen der Miele Professional Thermodesinfektoren abgestimmt
- Hohe Materialschonung
- Korrosionsschutz für Instrumente und Trays aus Edelstahl
- Sichere Anwendung, da frei von oxidativen Zusätzen
- Gebindegrößen: 1 und 10 kg

Mat.-Nr. 12786530 (10kg)

Mat.-Nr. 12786510 (1kg)



Für jede Herausforderung die passende Lösung

Ob alltägliche Verschmutzungen oder hartnäckige Rückstände – die ProCare Dent Reiniger bieten maximale Reinigungsleistung bei optimaler Materialschonung. Die abgestimmten Rezepturen ermöglichen eine sichere maschinelle Aufbereitung in Miele Professional Thermodesinfektoren und decken ein breites Anwendungsspektrum ab – von empfindlichen Übertragungsinstrumenten bis zu robusten Standardinstrumenten. Flüssig oder als Pulver – Sie entscheiden, was am besten zu Ihrem Praxisalltag passt.

ProCare Dent

Eigenschaften und Anwendungsbereiche



Sanfte Neutralisation für empfindliche Instrumente

ProCare Dent 30 C

Neutralisationsmittel, sauer

- Zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten
- Optimal auf die Prozesse und Reinigungszyklen der Miele Professional Thermodesinfektoren abgestimmt
- Gute Materialverträglichkeit
- Umweltfreundlich, da frei von Phosphaten
- Entfernt zuverlässig Rückstände aus vorherigen Reinigungsschritten und neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Auf Basis von Zitronensäure
- Gebindegrößen: 1 und 5 Liter

Mat.-Nr. 12796300 (5L)

Mat.-Nr. 12796280 (1L)



Kraftvolle Neutralisation für Standardinstrumente

ProCare Dent 30 P

Neutralisationsmittel, sauer

- Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten
- Optimal auf die Prozesse und Reinigungszyklen der Miele Professional Thermodesinfektoren abgestimmt
- Entfernt Anlauffarben und säurelösliche Verunreinigungen
- Entfernt zuverlässig Rückstände aus vorherigen Reinigungsschritten und neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Auf Basis von Phosphorsäure
- Gebindegrößen: 1 und 5 Liter

Mat.-Nr. 12796360 (5L)

Mat.-Nr. 12796350 (1L)



Schnelle Trocknung, rückstandsfreie Ergebnisse

ProCare Dent 40

Nachspülmittel, sauer

- Zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten
- Optimal auf die Prozesse und Reinigungszyklen der Miele Professional Thermodesinfektoren abgestimmt
- Verbessert und beschleunigt die Trocknung
- Entfernt zuverlässig Rückstände aus vorherigen Reinigungsschritten und neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Gebindegrösse: 1 Liter

Mat.-Nr. 12796390



Für ein sicheres Finish nach der Reinigung:

Die Neutralisations- und Nachspülmittel von ProCare Dent sorgen für eine zuverlässige Entfernung von Reinigungsrückständen und bereiten die Instrumente optimal auf die thermische Desinfektion vor. Ob sanft mit Zitronensäure oder kraftvoll mit Phosphorsäure – die Produkte sind exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Instrumente abgestimmt. Das Nachspülmittel rundet den Prozess ab und sorgt für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung – für hygienisch saubere Ergebnisse, die überzeugen.

Zusatzprodukte und Zubehör



ProCare Sure I-PM
Prozessindikator

- Zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess
- Zusätzliche Sicherheit bei routinemässigem Einsatz
- Stabiler Kunststoffhalter für eine einfache Positionierung
- Vollständige Dokumentation mit Formblatt als PDF Download
- Einfache Handhabung dank selbstklebender Indikatoren

Mat.-Nr. 11577000



- ProCare Protein Check**
Protein Check
- Zum Nachweis und zur qualitativen Einschätzung eventueller Proteinrückstände
 - Test auf Rückstände nach der Reinigung & thermischen Desinfektion
 - Präzise Applikation
 - Kurze Einwirkdauer von 3 Minuten
 - 3 Stifte pro Verpackungseinheit
 - Bis zu 50 Anwendungen pro Stift

Mat.-Nr. 11626810



- CK/1 DIN 51**
Kanisterschlüssel
- Zum einfachen Öffnen von 5, 10 und 20 Liter ProCare Kanistern
 - Ermöglicht ein angenehmes Öffnen der maschinell verschlossenen Kanister
 - Stabil und langlebig
 - Doppelseitig verwendbar

Mat.-Nr. 11851600



- DTD 2**
Auffangschale
- Zur sicheren Platzierung von 5 und 10 Liter ProCare Kanistern
 - Bietet Platz für 2 Kanister
 - Neigewinkel sorgt für eine optimale Restentleerung
 - Zum Einsatz im Nebenschrank

Mat.-Nr. 10695460



- Miele Regeneriersalz**
- Grobkörniges Speisesalz zur Regeneration des internen Enthärter
 - 750 gr

Mat.-Nr. 91801282



- DV1 DIN51**
Ablasshahn
- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren von ProCare Flüssigprodukten
 - DIN 51 Schraubverschluss für die 5 und 10 l ProCare Kanister
 - Leichtgängiger Hebel für eine einfache Bedienbarkeit

Mat.-Nr. 12594480



- MB1**
Messbecher 250 ml
- Ermöglicht genaues Dosieren von Flüssig- und Pulverprodukten
 - Aufgedruckte 250 ml-Skala in 5er Schritten unterteilt
 - Stapelbarer Messbecher mit stabilem Griff

Mat.-Nr. 12594330

ProCare Dent

Ob Einzelpraxis oder MVZ – mit ProCare Dent und Miele Professional sind Sie bestens ausgestattet



Anwendungstipps für den Praxisalltag

- **Dosierung leicht gemacht:** Nutzen Sie die passenden Dosierhilfen für Flüssig- und Pulverprodukte – für eine sichere und wirtschaftliche Anwendung.
- **Kombinieren Sie clever:** Reiniger, Neutralisationsmittel und Nachspülmittel sind optimal aufeinander abgestimmt – für maximale Hygiene und Materialschutz.
- **Routine vereinfachen:** Mit dem ProCare Protein Check und Sure I-PM behalten Sie die Kontrolle über Ihre Aufbereitungsqualität.



Die passenden Geräte

Unsere Miele Professional Thermodesinfektoren wie PWD 8682 oder PWD 8531 sind perfekt auf die ProCare Dent Produkte abgestimmt. Ob mit zwei oder drei Dosierpumpen – wir bieten Ihnen die passende Technik für Ihre Anforderungen. Für die Aufbereitung von Standard- und Übertragungsinstrumenten und das validierbar, zuverlässig und effizient.



Für jede Praxisgrösse die passende Lösung

- **Kleine Praxen:** Kompakte Gebindegrößen und manuelle Dosieroptionen wie der Pulverreiniger ProCare Dent 11 A bieten Flexibilität und Kontrolle.
- **Mittelgrosse Praxen:** Flüssigreiniger wie ProCare Dent 10 MA und 10 A ermöglichen eine automatisierte Dosierung – ideal für standardisierte Abläufe.
- **Grosse Zentren:** Mit dem vollständigen ProCare Dent Portfolio und passenden Miele Professional Thermodesinfektoren lassen sich auch komplexe Anforderungen effizient abdecken.



PROtect: Planbarer Service

- **Für Sie im Einsatz:** Unser Miele Professional Serviceteam prüft Ihre Maschine regelmässig – für sichere Prozesse und dokumentierte Qualität.
- **Validierung leicht gemacht:** Mit ProCare Dent und Miele Professional Geräten erhalten Sie eine Lösung, die sich einfach und zuverlässig validieren lässt.



Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
www.miele.ch/pro/ProCareDent
professional@miele.ch