

Miele



Désinfection XXL à encombrement réduit.

SlimLine – notre nouvelle solution ergonomique pour le traitement de vos instruments dentaires.



SlimLine

PWD 7121 et PWD 7122

La parfaite
association d'une
performance maximale
et d'un encombrement
minimal.



Avec une largeur de seulement 650 mm, les appareils SlimLine ne prennent que peu de place tout en offrant un volume utile généreux de 252 litres. Les trois niveaux de chargement peuvent être agencés de manière flexible avec des compléments et des modules. Ils vous permettent ainsi de traiter jusqu'à 66 instruments creux, 24 cassettes dentaires, trois compléments à mailles et d'autres instruments en un seul cycle.

Plus qu'un simple gain de place.

Présentation de SlimLine.

Améliorez l'efficacité dans tous les domaines de votre cabinet dentaire. Les appareils SlimLine vous seront d'une grande utilité dès lors qu'il s'agit d'optimiser l'espace disponible. Avec des résultats sûrs et une utilisation conviviale.

Efficace

- Compact avec seulement 650 mm de largeur
- Cuve et supports de charge spacieux avec trois niveaux pour les instruments dentaires et les plateaux
- Durée de programme courte grâce à un système de pompage performant et intelligent avec pompe à vitesse variable
- Performance maximale en cas de besoin
- Économie d'eau optimisée
- Réduction supplémentaire du temps de charge grâce à un réservoir de préchauffage*

* selon le modèle

Ergonomique

- Hauteur de chargement ergonomique pour un chargement et un déchargement sans effort
- Dosage automatique à partir des bidons de produits chimiques placés dans l'appareil
- Réagencement rapide et simple pour répondre à vos différents besoins

Flexible

- Commande flexible pour une adaptation facile des programmes à vos exigences particulières
- 20 emplacements de mémoire de programme libres
- Un seul panier de base, différents modules et compléments pour compiler différents schémas de chargement
- Flexible dans l'utilisation de nettoyants chimiques avec jusqu'à trois bidons de cinq litres de produit intégrés dans l'appareil
- PWD 7122 : version à deux portes pour la séparation côté contaminé/propre

Intuitif

- Commande intelligente avec écran tactile couleur 7", programmes optimisés et 20 emplacements de programme libres
- Nettoyage simple et efficace de l'écran
- Préparé pour le logiciel de traçabilité
- Préparé pour la connexion au Cloud Miele (MOVE)




Regardez de plus près : la désinfection à des niveaux jamais atteints.

Les composants de chargement faciles à manipuler, comme le système de paniers flexible, vous aident dans votre routine quotidienne. La division du support de charge en trois niveaux permet de positionner les compléments pour instruments et d'adapter facilement le support à vos besoins.

Systeme à deux portes en option **PWD 7122**

L'appareil SlimLine PWD 7122 est doté de deux portes permettant de séparer le côté chargement et le côté déchargement. Vous pouvez ainsi séparer le côté contaminé du côté propre dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

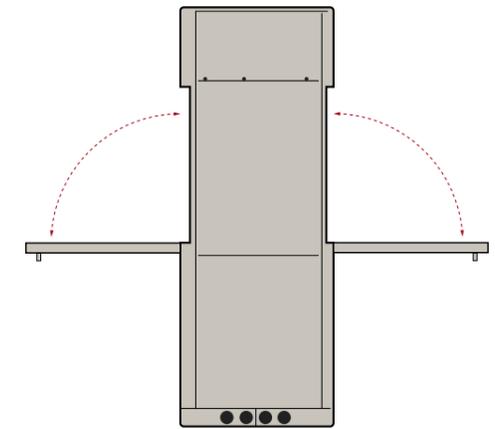

Exemples de configurations pour l'**APWD 217** :



- 66 instruments creux
- 160 sets d'instruments
- Six cassettes dentaires
- 18 porte-empreintes
- Trois compléments à mailles
- Trois petits filtres avec couvercle, adaptés à diverses petites pièces



- 66 instruments creux
- 18 cassettes dentaires
- 14 pinces
- Trois compléments à mailles
- Trois petits filtres avec couvercle, adaptés à diverses petites pièces





PWD 7121

PWD 7122

Généralités

Dimensions extérieures [largeur x hauteur x profondeur mm]	650, 1940, 700	650, 1940, 700
Dimensions de la cuve [largeur x hauteur x profondeur mm]	570, 717, 590	570, 717, 590
Volume utile [l]	252	252
Concept de chargement	Chariot de chargement avec modules et inserts	Chariot de chargement avec modules et inserts
Hauteur de chargement ergonomique	♦	♦
Programmes	Programmes de service Vario TD Dental	Programmes de service Vario TD Dental
Places de programme libres	20	20
Sélection du programme	Écran tactile couleur de 7 pouces	Écran tactile couleur de 7 pouces

Équipement

	PWD 7121 [DT-S-2001]	PWD 7122 [DT-S-2002]
Appareil à une porte	♦	—
Appareil à deux portes	—	♦
Verre plein, porte(s) rabattable(s)	♦	♦
Éclairage de la chambre	uni, blanc	multicolore, avec indicateur d'état
Matériau de la chambre	1.4404/316L (électropoli)	1.4404/316L (électropoli)
Séchage à l'air chaud	♦	♦
Filtre HEPA H14	♦	♦
Condenseur de vapeur	♦	♦
Pompe de vidange	♦	♦
Pompes de dosage [nombre]	2	2
Pompe à vitesse variable	♦	♦
Raccords d'eau	WW, KW, VE	WW, KW, VE
Raccordement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	♦	♦
Puissance de raccordement totale [kW]	10,1	10,1
WLAN	♦	♦
Port USB	♦	♦
Interface Ethernet	♦	♦
Capacité de nettoyage	3 x 5 litres	3 x 5 litres
Capteur de fuite	♦	♦
Adoucisseur d'eau intégré	♦	♦

Équipement supplémentaire

	PWD 7121 [DT-S-2003]	PWD 7122 [DT-S-2004]
Réservoir de préchauffage	♦	♦
Capteur de conductivité	♦	♦

Modules d'appareils en option

Contacts sans potentiel	♦	♦
Pompe(s) de dosage supplémentaire(s)	♦	♦
Pompe de surpression VE-Water	♦	♦
Refroidissement des eaux usées	♦	♦

Capacité des lots (exemples))

66 corps creux 24 plateaux de criblage, 18 porte-empreintes 3 plateaux de criblage	♦	♦
6 corps creux, 160 sets d'instruments, 18 porte-empreintes 3 plateaux de criblage	♦	♦



Miele 360PRO.

Pour chaque cabinet, sa solution sur mesure.

La précision est au cœur de notre métier. Elle est pour nous source d'inspiration.

Nous savons que le retraitement des instruments est une tâche importante pour les cabinets dentaires, quelle que soit la spécialité. Pour vous assister dans cette mission, nous vous proposons 360PRO, notre système complet comprenant des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres, d'une seule et même main. De la planification à la durabilité, des accessoires à la mise en réseau, des produits de lavage à l'entretien, sans oublier le traitement optimal de vos vêtements de travail : nous sommes à votre disposition pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur vos patients.



En savoir plus sur Miele 360PRO
www.miele.ch/pro/dental



Durabilité et design primé.

Bien pour votre équipe. Encore mieux pour la planète.

“Immer Besser.” est notre philosophie depuis 1899. Elle nous incite à être meilleurs demain que nous ne l’étions hier. Elle nous motive à développer chaque jour de meilleurs appareils, plus intelligents. Par exemple, la disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans permet de réduire les coûts d’exploitation et l’empreinte écologique, ou encore d’atteindre une extrême durabilité testée pour 15'000 heures de fonctionnement. Désormais, notre solution s’accompagne d’un mode d’emploi numérique en réponse à la réduction des déchets.



En savoir plus sur la durabilité chez Miele Professional
www.miele.ch/pro/durabilite



Pour une protection intégrale.

Le service Miele PROtect combine des prestations de service complètes, un contrôle maximal de votre budget et un approvisionnement sans faille en pièces de rechange. Nous vous apportons un conseil transparent et spécifique à votre secteur, nous coordonnons les rendez-vous et garantissons la disponibilité des pièces de rechange adaptées, même 15 ans après l’arrêt de la production en série.



En savoir plus sur PROtect
www.miele.ch/pro/protect



Miele

Rien ne remplace un **contact personnel.**

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur votre solution "gain de place" – tout simplement par téléphone ou via le formulaire de contact sur notre site Internet.

Téléphone: 0848 551 670

Lu – Ve 8 h 00 – 17 h 00



En savoir plus sur Miele SlimLine
et sur le formulaire de contact
www.miele.ch/pro/pwd7121