

Miele



Misez sur l'efficacité. Pensé de manière compacte.

Découvrez CompactLine —
la solution intelligente et optimisée en
termes d'espace pour un traitement
efficace et intuitif des instruments.






Découvrez une nouvelle dimension de l'hygiène.
Le tout dans un seul appareil.

Miele

Tiroir intégré avec espace de rangement optimisé

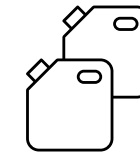

De la place pour deux bidons de 5 L de produits chimiques + 1 bouteille

Utilisation tactile  **intuitive** et **rapide**



Pour toutes les disciplines dentaires



30 minutes pour un traitement efficace de vos instruments

Construit pour être **durable**. Programmes optimisés.

Conçu de manière durable pour durer plus longtemps — avec des pièces de rechange disponibles au moins 15 ans après l'arrêt de la production. La consommation de ressources s'adapte aux besoins de chaque charge.



**Miele MOVE
MedDent+**



En savoir plus sur CompactLine
www.miele.ch/pro/compactline-dent

Six raisons

justifiant le choix de CompactLine dans votre cas

01

Optimisé et compact

CompactLine est la solution idéale pour les cabinets qui traitent peu d'instruments et offre un traitement efficace dans un design peu encombrant. Il dispose d'un stockage et d'une distribution intégrés pour les produits chimiques de traitement et offre un accès facile aux bidons de produits pour plus de commodité. Le CompactLine offre à la fois performance et valeur et répond aux besoins exigeants de votre cabinet avec le confort d'un appareil d'entrée de gamme.



02

Rapide et intuitif

CompactLine dispose d'un programme rapide pour les pièces à main et contre-angles dentaires et les turbines, qui fournit des résultats en 30 minutes. L'écran tactile couleur de 7 pouces permet d'accéder facilement à votre programme préféré, tandis que les instructions animées à l'écran vous guident pour la maintenance de base et l'utilisation. Une animation avec de grandes icônes à l'écran indique également l'état du programme et la libération des lots sur l'écran, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et sans problème.

03

Confortable et flexible

CompactLine améliore les processus de travail grâce à l'éclairage à l'intérieur du compartiment, qui assure une vision claire lors du chargement et du déchargement. Les composants et compléments spécialement conçus conviennent à différentes disciplines et permettent un traitement approfondi de tous les instruments. La langue d'utilisation peut être réglée rapidement à l'aide d'une touche sensitive sur l'écran et offre une adaptation parfaite aux besoins de votre cabinet.

04

Puissant et fiable

Découvrez des performances de nettoyage supérieures. La pompe à vitesse variable du CompactLine adapte la pression de lavage aux exigences de chaque phase du cycle. Des capteurs intégrés surveillent la fonction des bras de lavage et la pression de lavage, garantissant ainsi des performances fiables. Des filtres à plusieurs niveaux assurent en outre une sécurité supplémentaire. CompactLine répond à toutes les normes internationales pertinentes, y compris la norme EN ISO 15883, pour que vous n'ayez aucun souci à vous faire.



05

Durable et résistant

Testé pendant 15'000 heures de fonctionnement, CompactLine garantit longévité et fiabilité. Les pièces de rechange restent disponibles pendant au moins 15 ans après l'arrêt de la production. La programmation économique du système optimise l'efficacité grâce à des durées de programme courtes et permet d'économiser de l'eau, de l'énergie et des produits chimiques. Avec un mode d'emploi numérique et un emballage respectueux de l'environnement, CompactLine allie technologie de pointe et durabilité.

06

Intelligent et facile à entretenir

Profitez d'une intégration transparente dans le réseau de votre cabinet pour une configuration rapide et facile. CompactLine offre une traçabilité sécurisée des processus avec des droits d'accès personnalisables pour un meilleur contrôle. Grâce à Miele MOVE MedDent+, vous pouvez accéder aux données de l'appareil depuis n'importe quel endroit et profiter d'appels directs avec le service après-vente en cas d'anomalie. En outre, l'accès facile aux composants simplifie la maintenance et garantit un fonctionnement sans problème.

Un aperçu concis

CompactLine est un système de nettoyage efficace et facile à utiliser. Il offre un nettoyage et une désinfection rapides et hygiéniques, avec des fonctions avancées pour des déroulements optimisés qui garantissent des résultats sûrs et efficaces.

Tiroir pour produits chimiques

- Push2Open pour une manipulation plus facile
- Équipé de deux ou trois pompes de dosage pour produits chimiques liquides
- Canne d'aspiration avec détection de jauge vide pour une plus grande sécurité du processus et un réapprovisionnement facile des produits chimiques

Compartiment optimisé

- Hauteur de porte ergonomique pour une utilisation confortable
- Éclairage de la cuve pour une visibilité approfondie
- Pompe puissante à vitesse variable pour un nettoyage efficace
- Soudage laser lisse pour un niveau d'hygiène supérieur

Écran tactile couleur intuitif

- Symboles visibles de l'état
- Validation des lots directement sur le panneau de commande pour faciliter le flux de travail
- Instructions animées pour des procédures de routine en toute autonomie

Connectivité et traçabilité

- Wi-Fi intégré au panneau de commande, réseau local en option
- Avec Miele MOVE, les données des appareils MedDent+ peuvent être consultées à tout moment et en tout lieu, ce qui permet d'optimiser les processus
- Accès aux mises à jour des appareils et transparence totale des données de processus

Des programmes efficaces


- Nettoyage et désinfection de 22 pièces à main, contre-angles et turbines en 30 minutes
- Technologie EcoDry et AutoOpen pour un séchage efficace
- Autres programmes et option de démarrage différé



Convient à toutes les disciplines dentaires

Grâce à une large gamme de composants spécialement conçus pour différents types d'instruments, le CompactLine est idéal pour les professionnels de toutes les disciplines dentaires ainsi que pour les équipes multidisciplinaires. Grâce à un système de paniers flexible, chaque chargement peut être optimisé afin de garantir une pleine utilisation de l'appareil. Vous pouvez ainsi économiser du temps, de l'argent et des ressources.

Exemples de configurations dans le nouveau panier APWD 153 (réf. mat. : 12537450)

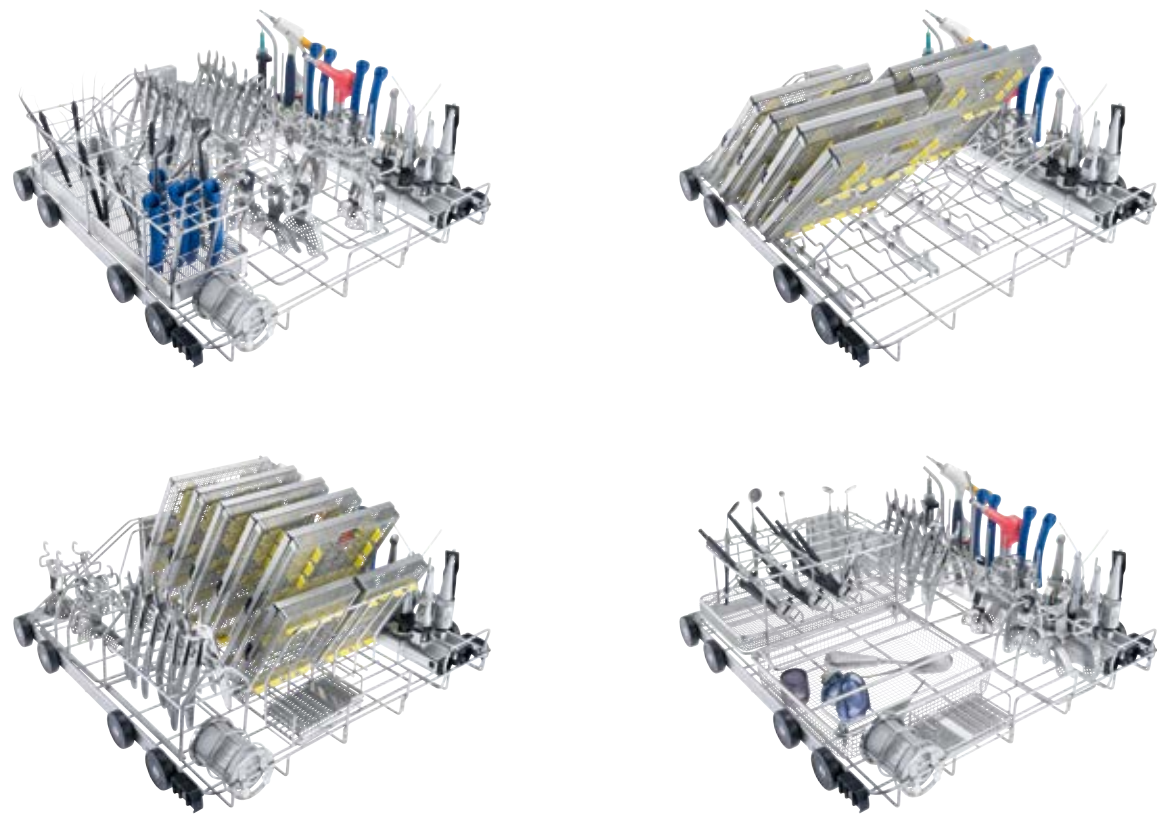

La synergie parfaite

La gamme de produits chimiques ProCare Dent, spécialement développée pour les laveurs-désinfecteurs de Miele Professional, fournit, en interaction avec les programmes du CompactLine, d'excellents résultats de nettoyage et de désinfection tout en préservant les instruments et leur durée de vie. Découvrez l'ensemble de la gamme, des produits de nettoyage et de neutralisation aux solutions de contrôle de routine et de maintenance des appareils, en passant par les produits de rinçage.



Découvrez ProCare Dent
www.miele.ch/pro/procare-dent



Laveur-désinfecteur	PWD 8682 C [DT DST LAN]
Appareil à pose libre avec couvercle	◆
Couleur	Blanc
Numéro de matériel	12949690
Pompe de circulation [Qmax. l/min]	500
Commande/Programmes	
TouchControl/Nombre de programmes	8
Emplacements de programme libres	5
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	◆
LED pour l'éclairage de la cuve	2
Alarme, signal sonore à la fin du programme	◆
Module de communication Ethernet	◆
Module de communication Wi-Fi	◆
Raccordements à l'eau	
1 x eau froide, pression du raccordement à l'eau 2,0 à 10 bar (200–1'000 kPa) (protection contre le reflux, selon EN 1717)	◆
1 x eau déminéralisée, pression du raccordement à l'eau 2,0–10 bar (200–1'000 kPa) (protection contre le reflux, selon EN 1717)	◆
1 x eau chaude, pression du raccordement à l'eau 2,0 à 10 bar (200–1'000 kPa) (protection contre le reflux, selon EN 1717)	◆
Nombre de tuyaux d'arrivée d'eau 1/2" avec raccord 3/4", L = env. 2,0 m	3
Pompe de vidange Ø 22, hauteur de refoulement : 100 cm max.	◆
Système Waterproof (WPS)	◆
Raccordement électrique	
3 N CA 400 V 50 Hz transformable en CA 230 V 50 Hz, câble d'alimentation secteur env. 2,0 m, 5 x 2,5 mm², fiches CEE comprises	◆
Chauffage [kW]	8,5
Pompe de circulation [kW]	0,8
Puissance totale de raccordement [kW]	9,3
Fusible [A]	3 x 16
Dispositifs de dosage	
Une pompe de dosage pour détergent liquide (longueur de la lance d'aspiration Flex: 217 mm, utilisable pour des hauteurs de bidon jusqu'à 202 mm)	◆
Une pompe de dosage pour agents neutralisants (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des hauteurs de bidon jusqu'à 202 mm)	◆
Une pompe de dosage pour produit de rinçage (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des hauteurs de bidon jusqu'à 202 mm)	◆
Adoucisseur d'eau	
Pour de l'eau froide et de l'eau chaude jusqu'à 65 °C	◆
Condenseur de vapeur	
Brumisateur	◆
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures H/L/P [mm]	835/600/600
Dimensions de la cuve H/L/P [mm]	400/536/523
Dimensions utiles du panier inférieur H/L/P [mm]	280/490/498
Poids [kg]	81
Dimensions du tiroir	
Surface utile H/L/P [mm] pour deux bidons de produit de 5 L	240/305/285
Surface utile H/L/P [mm] pour une bouteille de 1 L	240/160/125
Habillage extérieur, au choix	
Blanc lotus (LW)	◆
Inox (SST)	◆
Conformité aux normes	
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-040, EN 61326-1	◆
Labels de conformité	
IP 21	◆
CE 0297	◆
UE 2017/745 (MDR)	◆

Fiche de comparaison

Compact/Expert/SlimLine

CompactLine

PWD 8682 C



ExpertLine

PWD 8682



SlimLine

PWD 7121



Type d'appareil			
Porte vitrée			✓
Laveur-désinfecteur	✓	✓	✓
Groupe cible			
Dentaire	✓	✓	✓
Médecine	✓	✓	
Taille du cabinet	S	M	L
Praticiens/dentistes jusqu'à	1-3	3-8	8-12
Fréquence d'utilisation par jour	1-3	1-4	3-4
Dimensions du compartiment/niveaux de lavage	1	2	3
Capacité par charge			
Instruments creux jusqu'à	22	44	66
Sets patients** jusqu'à	80	160	160
Tablettes (grandes) jusqu'à	10	18	44
Programme court pour instruments creux	30 min.	n.a.	n.a.
Mise en place des produits chimiques	Intégrée dans le tiroir	Externe	Intégrée dans une armoire technique
Séchage	EcoDry	Technologie EcoDry/Séchage actif (selon le type d'appareil)	Séchage actif
Connectivité	Réseau local/Wi-Fi	Réseau local/Wi-Fi	RÉSEAU LOCAL/WI-FI/USB
Traçabilité			
Imprimante réseau	✓	✓	
Miele MOVE (selon l'interface)	✓	✓	✓
Interface de processus	✓	✓	✓

** Un set patient comprend un miroir dentaire, une sonde et une pincette

Un design innovant allié à une **responsabilité environnementale.**

La durabilité a été au cœur du développement du CompactLine. Ses programmes économes en ressources minimisent la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques, tandis que ses réglages personnalisables garantissent des performances optimales. Conçu pour une longue durée de vie et une utilisation à long terme, CompactLine est très facile à réparer. Sa longue durée de vie permet de réduire les déchets et de créer une réelle valeur durable pour votre cabinet.



En savoir plus sur le thème de la durabilité chez Miele Professional www.miele.ch/pro/durabilite



Miele, une marque à laquelle vous pouvez faire confiance

Miele Professional offre des performances et une qualité de pointe. 97 % des clients achèteraient à nouveau chez Miele et font confiance à notre excellence quotidienne. Les principaux fabricants d'instruments recommandent Miele pour un traitement sûr et hygiénique, qui garantit la compatibilité des matériaux et la préservation de leur valeur.



Rien ne remplace un **contact personnel.**

Nous sommes impatients de travailler avec vous afin de trouver la meilleure solution pour les besoins de votre cabinet.

Téléphone: 0848 551 670

Lu.–Ven. 08 h 00–17 h 30



En savoir plus sur CompactLine et nous
contacter
www.miele.ch/pro/compactline-dent