



Steelco

Mycí a dezinfekční automaty podložních mís

pro nemocnice, kliniky
a pečovatelské domy

Miele

Group Member

Přizpůsobení. Inovace. Dokonalost.

Řízeno potřebami zákazníků

Společnost Steelco je předním dodavatelem řešení pro kontrolu infekcí v oblasti zdravotnictví, laboratorního výzkumu a farmacie. Společnost Steelco, která působí ve více než 100 zemích světa, vybavila řadu světově proslulých nemocnic a mezi své zákazníky počítá zvučná jména v laboratorním, farmaceutickém a průmyslovém odvětví.

Řídíme se zpětnou vazbou od zákazníků a vyvíjíme a dodáváme řešení, která maximalizují kontrolu infekcí, bezpečnost, optimalizují procesy a minimalizují náklady. Integrace v rámci organizace Miele, která již byla lídrem v inovacích v oblastech, jako je automatizace, přinesla další impuls v technologickém vývoji.

Naše volitelné možnosti dálkové diagnostiky a celosvětový tým techniků vyškolených ve výrobním závodě vám zajistí servisní podporu, kterou potřebujete k nákladově efektivnímu maximalizování provozuschopnosti vašeho zařízení.

Steelco

Miele

Group Member



Mycí a dezinfekční automaty podložních mís pro nemocnice, kliniky a pečovatelské domy

Ať už renovujete stávající objekt, nebo navrhujete nové pracoviště, společnost Steelco nabízí efektivní a kompletní řešení, která pečlivě reagují na vaše potřeby. Nekonečné možnosti konfigurace poskytují nejlepší možnost ošetření pro čištění a dezinfekci základních zdravotnických pomůcek, zásobníků a nádob. Naše různé modely vyplachovacích a dezinfekčních zařízení lze integrovat do vyhrazených mycích prostor.



BP 100

Volně stojící nebo
podstolový model



BP 100 HE

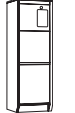
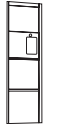
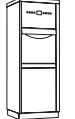
Volně stojící model nebo
nástěnná instalace bez/WC



BP 100 HXL

Volně stojící model

Technické informace

Model		Rozměry (š × h × v)		
BP 100 M BP 100 A		600 mm	600 mm	850 mm
BP 100 M9 BP 100 A9		900 mm	600 mm	850 mm
BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HAE		545 mm	475 mm	1 630 mm
BP 100 HE nástěnné provedení		595 mm	475 mm	1 753 mm
BP 100 HXL		602 mm	560 mm	1 695 mm

Hlavní výhody – vítězná kombinace

Naše řada mycích a dezinfekčních automatů nabízí rozsáhlý výběr pečlivě promyšlených přístrojů přizpůsobených nejrozličnějším požadavkům tohoto odvětví. Zaručuje bezkonkurenční hygienické a čisticí standardy díky nejmodernějším technologiím, účinnosti sušení HEPA 14 a termické dezinfekci všech předmětů určených k opakovanému použití, jako jsou podložní mísy, močové lahve a kbelíky.





Naše řada myček podložních mís je vybavena univerzálním držákem, který umožňuje současné ošetření močových lahví, podložních mís, odsávacích lahví a kbelíků. Pro specifické potřeby jsou k dispozici různé stojany a držáky.



Vysoce účinné sušení/chlazení s filtrem HEPA 14 zajišťuje rovnoměrné a rychlé sušení všech nádob a zároveň také jejich ochlazení.



Všechny mycí a dezinfekční automaty podložních mís Steelco mohou být vybaveny automatickým ovládáním dveří, které zajišťuje hygienickou bezpečnost ošetřujícího personálu.

Otevírání a zavírání dveří lze ovládat pomocí pedálů nebo infračerveného senzoru, což zcela eliminuje fyzický kontakt obsluhy se zařízením.

Znečištěné pomůcky se vkládají ve výšce, která odpovídá ergonomickým požadavkům na pracovní prostředí.



Zavedení této technologie umožňuje snížit spotřebu vody, chemikálií a dobu cyklu. Vynikající účinnost mytí byla dosažena přepracováním mycího okruhu a kombinací pevných a otočných trysek.



Kombinace pevných a otočných trysek zajišťuje rovnoměrné rozložení vody na vnější i vnitřní povrch zdravotnických pomůcek – pro maximální účinnost a perfektní výsledky mytí.

Pára je během každého cyklu vedena přímo skrz trysky, což zaručuje kompletní dezinfekci celého mycího okruhu a nejvyšší hygienický standard.



Kapacita zařízení závisí na velikosti a tvaru zpracovávaných předmětů.

Nádrže s chemikáliemi lze bezpečně uložit do uzamykatelné skříňky ve spodní části zařízení.

U nástěnných verzí je uzamykatelný úložný prostor pro chemikálie umístěn v horní části přístroje.

Modely pod pracovní deskou lze volitelně vybavit speciálními bočními skříňkami.

Udržitelný výkon pro moderní zdravotnictví



Pevné a otočné trysky

Díky kombinaci pevných a otočných trysek je zajištěno rovnoměrné a účinné rozložení vody na vnější i vnitřní plochy všech ošetřovaných předmětů.

Vnější i vnitřní konstrukce komory je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, což zaručuje dlouhou životnost a snadnou údržbu. Vnitřní prostor komory je navržen s oblými rohy a hladkými hranami dveří, aby se minimalizovalo riziko usazování nečistot a množení bakterií.

Pára je během každého cyklu distribuována skrze mycí okruhy a trysky, čímž je zajištěna dokonalá dezinfekce nejen ošetřovaných předmětů, ale i celé komory a hydraulického systému.



Vysokotlaké mytí

Špičková technologie mytí s optimalizovanou spotřebou vody a chemikálií. Objem vody se automaticky přizpůsobuje zvolenému mycímu cyklu, což zajišťuje efektivní čištění i při nízké spotřebě. Díky superrychlým cyklům a inteligentnímu řízení procesu je každé mytí nejen účinné, ale i časově úsporné.

Přepracovaný mycí okruh v kombinaci s pevnými a otočnými tryskami zajišťuje vynikající výsledky mytí a zároveň snižuje spotřebu vody, chemikálií i celkovou dobu cyklu.



Bezpečnost na prvním místě

Termická dezinfekce je doporučenou a nejúčinnější metodou pro dezinfekci všech opakovaně použitelných pomůcek, jako jsou podložní mísy, močové lahve, odsávací lahve a nádoby. Dezinfekční automaty Steelco představují klíčový nástroj v boji proti nemocničním infekcím a zároveň výrazně zlepšují pracovní podmínky zdravotnického personálu.

Podle odborné studie nezávislého hygienického institutu dosahují mycí a dezinfekční zařízení Steelco mimořádné účinnosti při eliminaci mikroorganismů, zejména spor *Clostridium difficile*, z nemocničního vybavení.



BP 100 M/A

Podstolové nebo volně stojící mycí automaty podložních mís

Řada BP 100 představuje multifunkční řešení pro efektivní mytí a dezinfekci všech běžně používaných nádob ve zdravotnictví – od podložních mís, přes močové lahve, až po odsávací lahve. Díky široké nabídce držáků a rámců lze zařízení snadno přizpůsobit specifickým potřebám jednotlivých oddělení a typům používaných pomůcek.



Současné ošetření 2 močových lahví a 1 podložní mísy s víkem, nebo až 4 močových lahví.



Řada BP 100 je k dispozici jako volně stojící verze nebo jako modely pod pracovní desku, s různými možnostmi přizpůsobení, a to s manuálním nebo automatickým otevíráním a zavíráním dveří.



BP 100 HE

Volně stojící nebo nástěnné provedení

Řada BP 100 HE představuje multifunkční řešení pro efektivní mytí a dezinfekci všech běžně používaných nádob ve zdravotnictví – od podložních mís, přes močové lahve, po odsávací lahve. Díky vysoce účinnému systému sušení a chlazení s HEPA 14 filtrem je zajištěno rovnoměrné a rychlé usušení všech pomůcek, které jsou tak připraveny k opětovnému použití v co nejkratším čase.



Současné ošetření 1 močové lahve a 1 podložní mísy s víkem, nebo až 3 močových lahví najednou.*



Řada BP 100 HE lze instalovat na stěnu, což představuje prostorově úsporné řešení ideální pro menší prostory. Tato konfigurace minimalizuje nutnost přesunu mezi kontaminovanou a dezinfekční zónou, čímž výrazně snižuje riziko přenosu infekce a zvyšuje bezpečnost pracovního prostředí.

Špičkové materiály pro dlouhou životnost

Vysoce kvalitní nerezová ocel AISI 304 zaručuje maximální spolehlivost, odolnost a snadnou údržbu. Kombinace pevných a otočných trysek zajišťuje optimální rozvod vody pro důkladné mytí.

BP 100 HXL

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty podložních mís

Řada BP 100 HXL představuje flexibilní řešení s vysokou kapacitou, navržené pro efektivní mytí a dezinfekci všech opakovaně použitelných pomůcek. Zajišťuje maximální hygienickou bezpečnost jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál.



Současné ošetření 2 mís s víkem až se 4 lahvemi na moč. 1 uzavřená nádoba na stolici nebo 2 nádoby s až 4 lahvemi na moč*.



Naše řada mycích a dezinfekčních automatů podložních mís je vybavena univerzálním držákem, který umožňuje současné mytí a dezinfekci močových lahví, podložních mís, odsávacích lahví i kbelíků. Pro specifické potřeby jsou k dispozici různé typy držáků a rámov, které se snadno přizpůsobí konkrétním požadavkům zdravotnického provozu.



Nádrže s chemikáliemi lze pohodlně uložit do uzamykatelné skříňky ve spodní části přístroje. Toto řešení zajišťuje snadný přístup, bezpečnost a čistý vzhled pracovního prostoru.

Intuitivní ovládací panel pro maximální pohodlí

Uživatelsky přívětivý ovládací panel s měkkými dotykovými tlačítky a barevným grafickým LCD displejem je vybaven funkcí autodiagnostiky. Umožňuje snadnou optimalizaci celého procesu díky možnosti spouštění přizpůsobených programů dle konkrétních potřeb.

Příslušenství a doplňky ruku v ruce



Držáky mytých předmětů

Zařízení je vybaveno univerzálním držákem. Multifunkční držák umožňuje současné mytí a dezinfekci močových lahví, podložních mís, odsávacích lahví i nádob.

Díky široké nabídce držáků a rámců lze zařízení snadno přizpůsobit nejčastěji používaným nádobám v různých zemích. Pro specifické potřeby jsou k dispozici i speciální varianty.

Příslušenství

Příslušenství hraje klíčovou roli pro efektivní a uživatelsky přívětivý dezinfekční proces. Steelco proto nabízí komplexní řadu doplňků – od pracovních pultů s dřezem i bez, přes vyprazdňovače, až po nástěnné držáky určené k sušení a skladování podložních mís a močových lahví.



Opěrné lišty pro výměnný držák
Různé nosiče mytých předmětů
umožňují různé použití



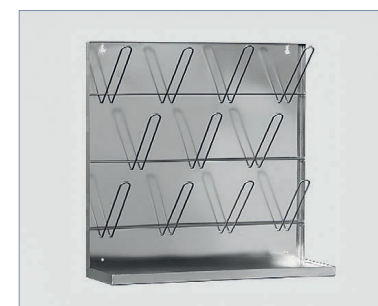
Výměnný držák pro vědra
velkého objemu a mísy



Speciální otočný držák je určen pro ještě snazší nakládání předmětů.



Vyprazdňovače dostupné
v manuální i automatické verzi



Nástěnné držáky na podložní
mísy a močové lahve



Přizpůsobení. Inovace. Dokonalost.

STEELCO - Miele Group Member

Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy
Ph. +39 0423 7561
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Branches:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEA
Dubai, UAE
info-mea@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Glostrup, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

Miele Professional CZ
Brno, the Czech republic
info@miele.cz

Miele Professional SK
Bratislava, Slovakia
info@miele.sk



*Pouze pro produkty uvedené
v certifikátu 909/MDD