

Miele

Til lægeklinikker

Rengørings- og desinfektionsmaskiner

Overholder de **Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer** fra Statens Serum Institut.

Miele Professional. Immer Besser.





**Plads til
alle typer
instrumenter**

**Godkendt
- overholder
alle krav**

**Rengøring og
desinfektion
- uden
forrengøring**

De **Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer** (NIR) fra Statens Serum Institut

HVILKE KRAV SKAL DU OVERHOLDE?

Ifølge Statens Serum Instituts Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) er der en række krav, du som læge skal være opmærksom på i forbindelse med rengøringen af dine instrumenter og maskiner.

Udpluk fra NIR:

· Dine instrumenter skal forskyldes med koldt vand (under 45 °C), hvorefter de skal rengøres med et medicinsk godkendt rengøringsmiddel og varmt vand.

- Til sidst skal instrumenterne desinficeres med varmt vand ved f.eks. 90 °C i 1 minut.
- Maskinen skal være medicinsk godkendt og mærket med en CE-godkendelse iht. EN ISO 15883.
- Lejlighedsvis selvdesinfektion af maskinen kræver 90 °C i 5 min.
- En sikker fjernelse af HPV-virus kræver en holdetid på 90 °C i 2 min.

KAN DIN OPVASKEMASKINE DET?

Vælg den rigtige desinfektionsmaskine, og **vær sikker** på, at du **overholder kravene**.

Miele Professional er kendt for stabilitet og ikke mindst maskiner i førsteklasses kvalitet.

Vi leverer maskiner, løsninger og service til lægeklinikker i hele landet. Vi sørger for levering, installation og løbende service, så du har en løsning, der fungerer hver dag, året rundt.

Med en desinfektionsmaskine fra Miele Professional får du en maskine, som overholder alle lovkrav - og du får dokumentation for, at den gør det.

Det giver dig:

- **Mulighed for at spare tid og penge.** Maskinen giver dig hurtigt og nemt rene instrumenter klar til sterilisation uden forrengøring. På den måde sparer du tid, som kan bruges til andre formål.
- **God kapacitet,** så du ikke skal vaske op hele tiden.

- **Patient- og personalesikkerhed, som er helt i top.** Her får du dokumentation for, at du overholder retningslinjerne i NIR. Den minimale håndtering af instrumenterne indebærer også, at der er en meget lav smitterisiko for personalet.
- **Lave driftsomkostninger,** som gør denne løsning billigst på den lange bane. Her får du en førsteklasses kvalitetsmaskine med en lang levetid, som er billig i drift.
- **En medicinsk godkendt maskine,** som overholder alle punkter i EN ISO 15883 vedrørende krav til produktion, test, sikkerhed, skylletemperatur og temperaturholdetid i forhold til de høje krav. Godkendelse fremgår af CE-mærkningen på maskinen, efterfulgt af et registreringsnummer på den myndighed, der har godkendt registreringen.

Vi validerer maskinen på installationsadressen, så den med sikkerhed lever op til kravene i NIR.



Forbrugsstoffer/sæbe

5,00 kr. - PG 8582

1,80 kr. - PWD 8534*

Miele Professional

Billigst på den lange bane

Spar tid

I en travl hverdag med mange opgaver er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på tiltag, som kan frigøre tid, uden at det går ud over den kvalitet, som du gerne vil yde over for dine kunder.

Her er en desinfektionsmaskine fra Miele Professional en mulighed, hvor du kan spare al den tid, som du i dag bruger på at rengøre dine instrumenter, samtidig med at du får en høj ensartet vaskekvalitet, hver gang du sætter maskinen i gang.

Maskinen er hurtigt tjent hjem

Få en specifik udregning hos enten Miele eller din forhandler, så du ved, hvad det vil koste dig.

Brug mindre energi, vand og sæbe

En desinfektionsmaskine fra Miele Professional har en lang levetid, få driftsstop og et lavt energi-, vand- og sæbeforbrug.

* Prisene er inkl. moms., sæbe, neutraliseringsvæske, afspændning og salt.

PWD 8534 bruger ikke neutraliseringsvæske.



Vælg den rigtige maskine

En gennemtænkt løsning til lægeklinikker

Helt enkelt: en desinfektionsmaskine og det rigtige tilbehør og kemi

Det er helt enkelt: Vælg først en kvalitets-desinfektionsmaskine fra Miele Professional - og herefter det tilbehør, som passer præcist til dit behov. Så får du en helt unik, sikker og effektiv rengøring af dine instrumenter, og med det rigtige tilbehør kan det udføres nemmere og hurtigere.

Vi har flere maskiner, som opfylder behovene i en lægeklinik.

Fælles for dem er følgende funktioner:

- **Sikkerhed med kontrol.** Højtudviklede sensorer i maskinen kontrollerer vaske kvaliteten og giver dig straks besked ved afvigelser.
- **Hygiejnisk opvaskebeholder.** Maskinen er selv-desinficerende. Du undgår aflejring af snavs og blod, og hygiejnen er i top.
- **Overvågning af spulearme.** Spulearmene er udviklet til at fremme opløsningen af tilsmudsninger for et optimalt rengøringsresultat med et mindre vandforbrug samt overvågning af korrekt rotation.
- **Betjeningskomfort.** Betjeningen er intuitiv og foregår nemt på dørgrebet på maskinen.
- **God ergonomi.** Med saltpåfyldning i døren undgår du at bukke dig, og døren lukker du nemt ved et let tryk.
- **Højeffektiv tørring.** Med EcoDry, hvor døren automatisk åbner efter endt vask, samt dampkondensator, der medvirker til en god tørring af dine instrumenter.


Miele
anbefaler

Unik og sikker rengøring af dine instrumenter.
Nemmere og hurtigere.

Fakta

om desinfektionsmaskinerne

Model	PG 8592 Til flydende sæbedosering	PG 8582 Til flydende sæbedosering	PG 8582 Til flydende sæbedosering	PWD 8534 Til flydende sæbedosering
Medicinsk godkendt maskine*	•	•	•	•
Kabinet	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Hvidt	Rustfrit stål
Fritstående og til underbygning	•	•	•	Bordmodel
Bredde/højde/dybde (i mm)	600/835/600	600/835/600	600/835/600	645/555/575
Højde til underbygning	820 mm	820 mm	820 mm	
Tørring**	DryPlus	EcoDry	EcoDry	DryPlus
Antal programmer	15	14	14	8
Egnet til hulrumsinstrumenter***	•	•	•	•
AutoClose og automatisk dørlås	•	•	•	Dørlås
Maks. efterskylstemperatur	93 °C	93 °C	93 °C	93 °C
Testede driftstimer	15.000	15.000	15.000	10.000
Spuletryks- og spulearmovervågning	•	•	•	Spuletryk
Max. vandgennemstrømning i cirkulationspumpe	450 l/min	450 l/min	450 l/min	90 l/min
Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	1N AC 230V 50Hz
Vandtilslutning	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Interface til procesdokumentation	•	•	•	•
Koldt/ varmt/demi	Koldt/varmt/demi	Koldt/varmt/demi	Koldt/varmt/demi	Koldt/demi
Sæbe – flydende, automatisk dosering	•	•	•	•
Sæbe - pulver	Ikke muligt	Ikke muligt	Ikke muligt	Ikke muligt
Neutralisation	Tilkøb	•	•	Ikke muligt

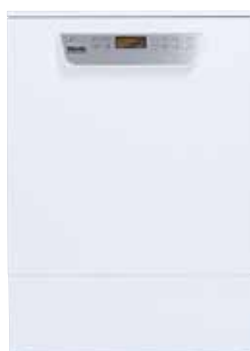

NYHED

*Medicinsk godkendt i henhold til EN ISO 15883 og mærket med en CE-godkendelse af et autoriseret organ.

** DryPlus er aktiv tørring med varm hepa-filteret luft, der giver mulighed for tørring af hule instrumenter. EcoDry er effektiv tørring med dampkondensator og AutoOpen-funktion.

*** Læs mere om de forskellige kurvemuligheder for hulrumsinstrumenter på side 8-11.


Specielt opvaskeprogram til lægeklinikker

Flere programmer er iht. ISO 15883 specielt velegnet til genbehandling af termostabile instrumenter på lægeklinikker.


Programmerne starter med en afskylning ved lav temperatur, så proteinrester ikke denaturerer. Efter afskylningen og en intensiv rengøringsfase følger neutraliseringsfasen, som fjerner sæberester og sikrer, at instrumenterne holder sig pæne. Herefter sker den termiske desinfektion ved 93 °C med en holdetid på 5 min. efterfulgt af tørring. Hele forløbet tager fra 39 minutter eksklusive tørringen.

Maskinen regenererer efter hver 6. vask ved en vandhårdhed på 19 °C dH. I termodesinfektor PG 8592 og PWD 8534 sørger varmlufttørringen for en afsluttende, grundig indvendig og udvendig tørring af instrumenterne.

Programforløb på PG 8582:

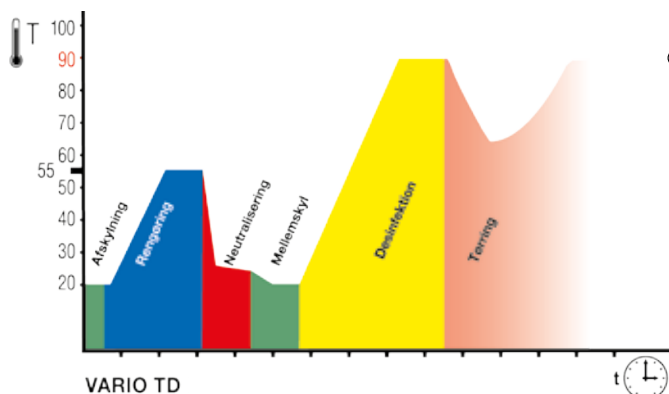

Programforløb på PWD 8534

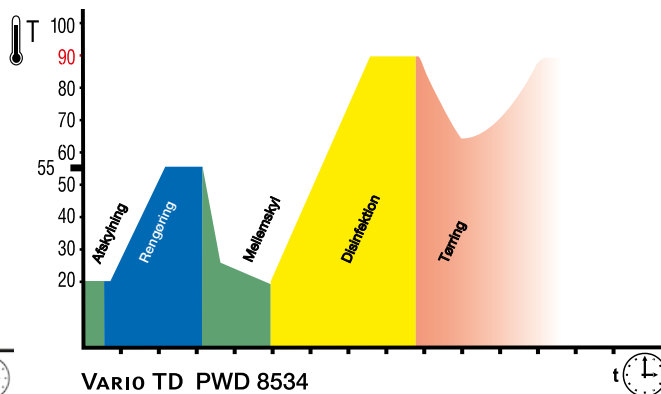

PG 8582/8592	Rengøring					Tørring	
	Tid (min)	KW (J)	WW (J)	AD (J)	Energi (kWh)	Tid (min)	Energi (kWh)
Vario TD ins 4 kurve	39	17,4	18,2	9	2,1	47	0,8
Vario TD ins 6 kurve	49	25,2	27,3	13	2,8	55	1
Vario TD MIC	40	18,6	12,5	16	2,2	42	0,7
Vario TD AN	51	25,9	29,6	14	2,4	94	1,7
Vario TD GYN	46	17,4	28,2	7,5	1,8	37	0,6
Oftalmologi	40	13,8	21,7	17,5	2	57	0,9
Vario TD ØNH	41	17,4	18,2	9	2,3	52	0,8
Vario TD ØNH Optik	22	10		9	1,6	32	0,5
Sutteflasker	37	17,4	21,2	7,5	2,3	62	1,2
PWD 8534							
Vario TD GYN	66	25		7	1,79	11	0,093
Vario TD ENT	60	19		7	1,56	11	0,093
Vario TD instrumenter	60	19		7	1,57	11	0,093

2

Vælg det rigtige tilbehør

Konfigurer din desinfektionsmaskine til behovet i din lægeklinik.

For at få mest muligt ud af din desinfektionsmaskine er det vigtigt, at du får en tilbehørspakke, som giver dig den størst mulige kapacitet i hverdagen. Det er mest effektivt og er med til at gøre brugen af maskinen billigst på den lange bane. Miele Professional har et bredt sortiment af over- og underkurve samt indsætter til forskellige typer af instrumenter. Kurve og indsætter på de følgende sider kan anvendes i både PG 8582 og PG 8592. Miele anbefaler PG 8592 til specifikke områder, da desinfektionsmaskinen har indvendig tørring til hule instrumenter. Følgende kurve og indsætter er de mest anvendte. Har du andre behov, så kontakt os.

Anbefaling på tilbehør - sikurve


A 103 overkurv

- Åben front
- Til indsætter
- Bestykningshøjde 95 mm
- Indbygget spulearm
- Særlig egnet til rengøring af DIN-sikurve samt lave rekvisitter
- H 133, B 528, D 528 mm



A 202 vogn

- Til 4 DIN-sikurve på 2 niveauer
- Indbygget spulearm
- Bestykningshøjde nedefra:
 - Niveau 1: inkl. ramme
H 95, B 519, D 485 mm, ekskl. ramme
 - Niveau 2: H 135, B 494, D 500 mm
 - Niveau 2: H 135, B 516, D 462 mm
- 6 ekstra tilslutningsmuligheder til stive skoper vha. Luer-Lock-forbindelse
- Ramme til DIN-sikurve (kan tages ud til rengøring af højere rekvisitter, fx nyreskåle)
- H 223, B 531, D 542 mm

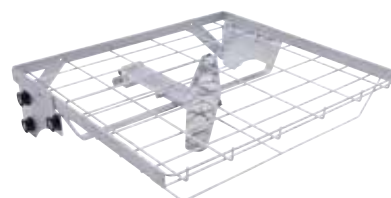

Velegnet
til almen
praksis



6 x E 142 indsats 1/2 sikurv

- DIN-sikurv
- 1 mm trådflet, 5 mm maskebredde, 5 mm ramme
- To nedklappelige greb
- Maks. kapacitet 10 kg
- H 45/55, B 255, D 480 mm



Anbefaling på tilbehør - MIC

A 203 vogn

- Til MIC-instrumenter
- Bestykning på 2 niveauer
- Til:
 - E 451 sikurve til små dele
 - E 457 indsats til MIC-instrumenter, der kan skilles ad
 - E 460 indsats til stive optikker
 - E 473 si til meget små dele
 - E 444 tromle til koldlyskabler og sugeslanger
- H 520, B 531, D 542 mm

A 203 vogn leveres med følgende tilbehør:

- 3 x E 336 hylster, 121 mm
- 2 x E 362 blindskrue
- 15 x E 442 hylster, 121 mm, til MIC-instrumenter Ø 4 - 8 mm
- 5 x E 443 hylster, 121 mm, til MIC-instrumenter Ø 8 - 12 mm
- 1 x E 445 12 kapper, åbning: 6 mm til hylster
- 1 x E 446 12 kapper, åbning: 10 mm til hylster
- 3 x E 447 hun-adapter, til han-Luer-Lock
- 6 x E 448 silikoneslange 300 mm lang, 5 x 1,5 mm med han-Luer-Lock-adapter
- 5 x E 449 han-adapter til hun-Luer-Lock
- 1 x E 451 indsats 1/6 sikurv med låg
- 3 x E 452 injektordyse, Ø 2,5 x 60 mm
- 8 x E 453 injektordyse, Ø 4,0 x 110 mm med klemme
- 6 x E 454 injektordyse til trokar-hylster 10 - 15 mm
- 4 x E 456 åbningsfjeder til MIC-instrumenter som sakse, klemmer osv.
- 3 x E 464 holder til injektordyse E 454

Miele
anbefaler
PG 8592



Anbefaling på tilbehør - MIC og sikurve

A 104 overkurv/injektor

- Til klinikker med få stive skoper
- Til instrumenter inden for MIC, artroskopi, urologi
- Den venstre side er fri til indsats
- Den højre side til 11 stive skoper
- Fire ekstra Luer-Lock-tilslutningssteder til flere stive skoper
- Med spulearm: På nederste lafette kan sikurve anbringes
- H 332, B 528, D 526 mm


A 151 underkurv/lafette

- Til gængse DIN-sikurve samt diverse indsats
- Bestykningshøjde afhænger af valgt overkurv
- H 88, B 531, D 522 mm

A 104 overkurv leveres med følgende tilbehør:

- 4 x E 362, blindskrue
- 2 x E 442, hylstre til instrumenter med Ø 4 - 8 mm, længde 121 mm, Ø 11 mm, kappe med åbning Ø 6 mm
- 2 x E 448, silikoneslange med Luer-Lock-adapter ♂ til Luer-Lock♀, længde 300 mm
- 1 x E 452, injektordyse, længde 60 mm, Ø 2,5 mm
- 1 x E 453, injektordyse med klemfjeder, længde 100 mm, Ø 4 mm
- 1 x E 454, injektordyse til hulrumsinstrumenter med Ø 10 til 15 mm, fx trokarhylstre, med fjeder til højdejustering, længde 150 mm, 8 mm
- 2 x spuledyse, Ø 2,5 mm
- 4 x spuledyse, længde 30 mm, Ø 4 mm
- 4 x tragte

Miele
anbefaler
PG 8592

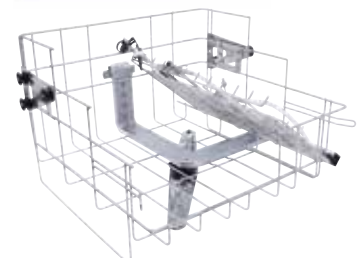

Anbefaling på tilbehør - anæstesi


A 201 vogn

- Til AN-s.t
- 8 dyser med fjederunderlag til maks. 1,5 m lange åndedrætsslanger
- Spiralformet holder
- 15 injektordyser til intubationsmateriale
- H 434, B 531, D 546 mm

A 201 vogn leveres med følgende tilbehør:

- 1 x E 430 sikurve
- 1 x E 432 holder til 3 - 4 foldeåndedrætsposer
- 2 x E 433 holder til 3 - 4 silikoneåndedrætsslanger
- 1 x E 434 holder til 3 - 4 børneåndedrætsslanger
- 6 x E 466 injektordyse til åndedrætspose, 8 x 333 mm
- 1 x E 431 injektordyse til bælg, 8 x 193 mm
- 15 x E 496 injektordyse, 4 x 120 mm
- 1 x A 3 afdækningsnet

Miele
anbefaler
PG 8592

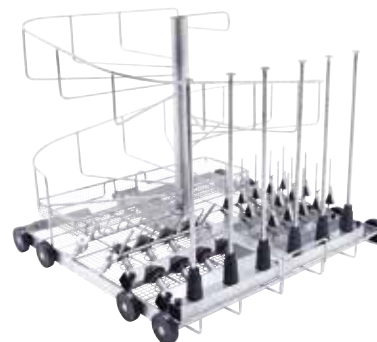

Anbefaling på tilbehør - oftalmologi


A 204 vogn

- Til mikroinstrumenter (øjnoperation)
- Indbygget spulearm
- Bestykning på 2 niveauer:
 - Niveau 1: til placering af indsats:
 - (fx E 441/1 eller E 142)
 - Niveau 2, højre side: 22 tilslutninger til stive skoper (10 han-Luer-Lock-adapter, 10 hun-Luer-Lock-adapter)
 - Niveau 2, venstre side: 11 han-Luer-Lock-adapter, med slange i horisontal anordning
- Filterrør A 800 kan anvendes i alle injektorlister (ikke standard)
- H 365, B 531, D 542 mm

A 204 vogn leveres med følgende tilbehør:

- 1 x E 476, 50 holdere til mikroinstrumenter med Ø4 til 8 mm, kan anvendes i sikurve med 5 mm maskevidde
- 1 x 477, 20 stopstykker til mikroinstrumenter, kan anvendes i sikurve med 5 mm maskevidde
- 11 x E 447 Luer-Lock-adaptore ♀ til Luer-Lock ♂
- 11 x E 517 Luer-Lock-adaptore ♂ til Luer-Lock ♀
- 6 x E 790, 4 forbindelsesstykker Luer-Lock ♀ / Luer-Lock ♂
- 5 x E 791, 4 forbindelsesstykker Luer-Lock ♀ / Luer ♂
- 11 silikoneslanger med Luer-Lock-adapter ♂ til Luer-Lock ♀, længde 160 mm

Miele
anbefaler
PG 8592

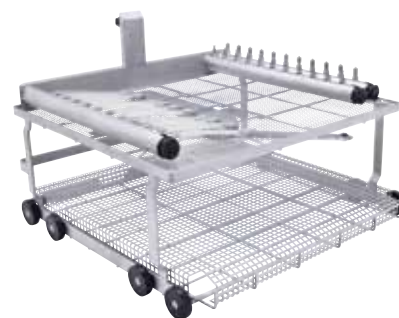

A 800 filterrør

- Filter i Plymesh rustfrit stålvæv til overkurv A 105 og vogn A 204
- Maskebredde 63 µm
- Kan rengøres med rengøringsbørste A 804
- D 405 mm, O 22,5 mm

A 804 rengøringsbørste


- Til rengøring af filterrør A 800
- Drejet børste med spiralformet trimning
- Skaft med øsken
- 500 mm lang, børstelængde 100 mm



Anbefaling på tilbehør - ØNH

A 105/1 overkurv/injektor

- Venstre side til påsætning af indsatser
- Højre side med 22 injektorpladser, fx til spulehylstere A 837 (medfølger ikke)
- Højdejusterbar
- Aktiv indvendig tørring af hule instrumenter (kun i PG 8592)
- Centralfilter kan anvendes i begge injektorlister (medfølger ikke)
- Integreret spulearm
- Fyldningsmål H 225 +/- 30, B 360, D 445 mm
(i venstre side er der ved en bredde på 215 mm en dybde på 460 mm)
- H 202, B 528, D 526 mm

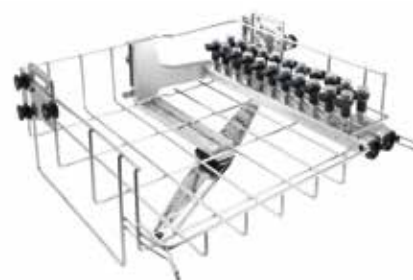

A 151 underkurv/lafette

- Til gængse DIN-sikurve og diverse indsatser
- Bestykningshøjde afhænger af overkurv
- H 88, B 529, D 546 mm

Ekstra tilbehør:

- E 790 forbindelsesstykker Luer-Lock hun/hun
- E 791 forbindelsesstykker Luer-Lock hun/han
- E 499 spuleanordning til kanyler
- E 792 tilslutning Luer-Lock han med silikoneslange
- E 131/1 indsats til 5 sikurve
- E 417 indsats 2/5 til 30 øre- og næsespekulum
- 2 x E 146 indsats 1/6 sikurv med lag
- E 379 indsats 1/2 sikurv
- E 142 indsats til diverse instrumenter
- A 315 indsats til instrumenter med hulrum - **NYHED**



NYHED



Indsatserne passer til A151

Anbefaling på tilbehør - gynækologi

A 102 overkurv/lafette

- Åben front
- Til indsats
- Højdejusterbar
- Bestykningshøjde 205 +/- 30 mm
- Integreret spulearm
- H 206, B 528, D 527 mm

4 x E 416 1/4 indsats

- Til 6 specula i et stykke og todelte
- 7 holdere, afstand 40 mm
- Til over- og underkurv
- H 157, B 178, D 279 mm

A 151 underkurv/lafette

- Til gængse DIN-sikurve og diverse indsats
- Bestykningshøjde afhænger af overkurv
- H 88, B 529, D 546 mm

E 379 indsats 1/2

- Til diverse utensilier
- 0,8 mm trådflet
- 1,7 mm maskevidde
- 5 mm ramme
- 2 håndtag
- Til over- og underkurv
- H 80/110, B 180, D 445 mm

E 430/1 indsats 1/3 sikurv

- Til instrumenter
- Trådflet med 5 mm maskebredde
- H 40, B 150, D 445 mm

E 143 indsats

- Indsats til diverse instrumenter.
- 1 mm trådflet, 5 mm omløberramme
- Udstyret med 2 drejelige håndtag

Andre indsats -sikurve

E 146 Til optimal anbringelse af diverse instrumenter



- Maskebredde i bund 3 mm, side 1,7 mm, låg 8 mm
- Udstyret med 2 drejelige bærehåndtag
- Kan indsættes i over- og underkurv
- H 50, B 140, D 120 mm

E 197 Til optimal anbringelse af diverse instrumenter

- Maskebredde i bund 3 mm, side 1,7 mm, låg 8 mm
- Kan steriliseres med damp ved 121 °C/134 °C
- H 30, B 140, D 220 mm

E 363 Til optimal anbringelse af GYN- og ØNH-instrumenter

- Maskebredde 1 mm
- Udstyret med et låg
- Kan indsættes i over- og underkurv
- H 50, B 145, D 220 mm

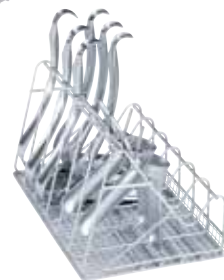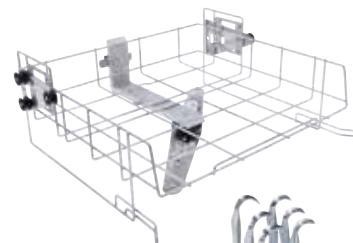

E 142 Til anbringelse af diverse instrumenter

- 1 mm trådflet, 5 mm maskebredde, 5 mm rammer hele vejen rundt
- Udstyret med 2 drejelige bærehåndtag
- Den maksimale bæreevne er 10 kg
- H 55, B 255, D 480 mm

**E 379 Til anbringelse af diverse instrumenter**

- 0,8 mm trådflet, 1,7 mm maskebredde, 5 mm rammer hele vejen rundt
- Udstyret med 2 bærehåndtag
- Kan indsættes i over- og underkurv
- H 80, B 170, D 440 mm

**E 363 indsats 1/6 sikurv**

- Maskevidde 1 mm, med låg uden holdere til fastgørelse af instrumenterne
- H 55, B 150, D 225 mm



Indsatse til sikurve med låg og bakker

E 198 Til optimal anbringelse af op til 6 sikurve og nyreskåle


- Til 6 sikurve eller nyreskåle
- 7 holdere (6 rum), højde 160 mm, afstand 67 mm
- H 160, B 180, D 495 mm

**E 131/1 Til optimal anbringelse af 5 sikurve og nyreskåle**

- Til 5 sikurve eller nyreskåle
- Udstyret med 6 holdere, højde: 160 mm, afstand: 80 mm
- H 168, B 180, D 495 mm

**E 523 Til optimal anbringelse af 6 sibakker**


- Udstyret med 7 holdere (6 rum), H 145, afstand 50 mm
- H 150, B 220, D 450 mm

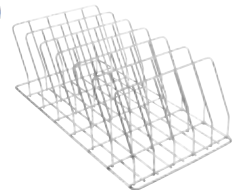**E 807 Til optimal anbringelse af 3 sikurve eller nyreskåle**

- 4 holdere (3 rum), H 165, afstand 68 mm
- H 144, B 140, D 290 mm

**E 339 Indsats til 12 bakke-underdele og bakker**

- Udstyret med 12 holdere
- Den maksimale bakkestørrelse er 290 x 20 mm
- Kan sættes i underkurven
- B 295, D 21,5 mm

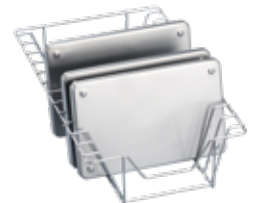

Diverse

A 307 til OP-sko Indsats til 20 operationssko op til størrelse 48

- Egnede til 20 operationssko
- Med 265 mm lange holdere
- Til brug i underkurven A 151
- Mulighed for rengøring af operationssko op til størrelse 48



A 308 til såler Indsats til 34 indlægssåler til operationssko

- Egnede til op til 34 indlægssåler
- Til brug i over- eller underkurve

Velegnet
med A 103
overkurv



E 441/1 Indsats til Mikro-instrumenter

- Maskebredden i bunden er 1,7 mm
- Siderne er lukkede, stabelbare
- Inddeling med 6 justerbare holdere til skånsom opbevaring
- Kan steriliseres med damp ved 121 °C/134 °C
- H 60, B 180, D 280 mm



E 473/2 Si med låg, egnet til diverse smådele

- Til ophængning
- Med nem låglukning
- H 65, B 65, D 75 mm


A 6 Afdækningsnet til optimal fiksering af sarte instrumenter

- Rammer i rustfrit stål med polypropylenråde
- Meget modstandsdygtig og holdbar
- 215 x 445 mm



A 810/1 Afdækningsnet til optimal fiksering af sarte instrumenter

- Afdækningsnet til optimal fiksering af sarte servicedele.
- Rammer i rustfrit stål med kunststofnet
- Meget modstandsdygtig og holdbar
- 206 x 215 mm

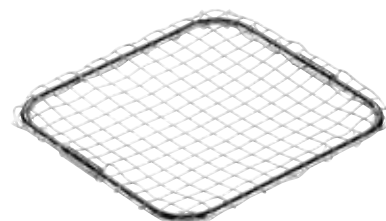

Tilbehør til PWD 8534


APWD 060 kurv

- Til optimal anbringelse af diverse indsats og sikurve
- H 230, B 370, D 395 mm



APWD 079 injektorkurv

- Til optiske instrumenter, indsats og sikurve
- Forsynet med 16 injektordyser; 8 med A 817 dysemuffer og 8 med APLB 072 blindpropper
- Fyldningsmål H 230, B 320, D 395 mm
- H 85, B 395, D 469 mm

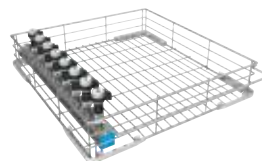


APWD 062 indsats

- Til stående instrumenter
- Til fx filer, mejsler og andre instrumenter inden for ortopædkirurgi
- H 120, B 125, D 395 mm



E 807 indsats

- Til 3 sikurve/nyreskåle eller instrumentbakker
- 4 holdere (3 rum) H 165, med en afstand på 58 mm
- H 144, B 140, D 290 mm

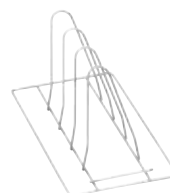

E 491 indsats

- Indsats til rotationsinstrumenter inden for ortopædkirurgi
- 18 skafter, maks. Ø 1,8 mm
- 30 skafter, maks. Ø 2,8 mm
- H 53, B 70, D 120 mm



E 521/2 indsats

- Til 7 pincetter
- Rumstørrelse 21 x 80 mm
- H 135, B 100, D 189 mm



E 373 indsats 1/6

- Til ØNH-instrumenter, fx øretragter
- Trådnet, maskebredde i bund 3 mm, sider 1,7 mm, låg 3 mm
- 28 lodrette holdere
- 2 hængslede håndtag
- Til over- og underkurv
- H 55, B 150, D 225 mm



E 416 indsats 1/4

- Til 6 en- eller todelte spekuler
- 7 holdere i en afstand på 40 mm
- Til over- og underkurv (overkurv kun med endelt-spekula)
- H 157, B 178, D 279 mm



E 803 indsats 2/5

- Til øre- eller næsespeklere
- 160 rum, ca. 13 x 13 mm
- Maskebredde i bund: 1,7 mm
- Til over- eller underkurv
- H 63, B 165, D 317 mm



E 802/1

- Til sonder, pincetter og skalpelhåndtag
- 3 kunststofholdere
- 8 rum med en bredde på ca. 30 x 28 mm
- 8 rum med en bredde på ca. 16 x 28 mm
- 15 rum med en bredde på ca. 16 x 20 mm
- H 113, B 163, D 295 mm



E 473/2 indsats

- Si med låg, til smådele
- Til ophængning
- H 88, B 66, D 66 mm



3

Vælg medicinsk godkendt kemi

For at opnå det optimale vaskeresultat spiller den kemi, som du anvender sammen med din desinfektionsmaskine, en stor og vigtig rolle. På baggrund af utallige tests og vores store viden inden for dette område har vi udvalgt nogle effektive produkter, der er skånsomme mod dine instrumenter.

- neodischer MedicClean Forte – flydende sæbe – effektiv med enzymer, 5 l
- neodischer Z, neutraliseringsvæske, 5 l
- Mielclear, afspændingsmiddel, 1 l
- ProCare salt, 6x1 kg
- Værktøj til at åbne 5- og 10-liters dunke
- Fleksibel hældetud til dunke (benyttes på PWD 8534)



Miele
anbefaler

Udskyd din opvask, uden at instrumenterne tager skade.

Korrosionshindrende skum uden enzym **Benyt neodisher® PreStop**

Til sprøjtning af kirurgiske instrumenter umiddelbart efter brug.

- Forhindrer rustpletter på instrumenter af rustfrit stål, også ved brug af saltopløsninger.
- Forhindrer vækst af mikroorganismer på instrumenter i kontakttiden (bakteriostatisk).
- Forhindrer indtørring af kirurgisk tilsmudsning, da instrumenterne holdes fugtige.

Med dette produkt kan du udskyde rengøring af instrumenterne, til du har en fyldt eller næsten fyldt maskine. På den måde passer du både på dine instrumenter og miljøet.

Fjern rust fra instrumenterne **Benyt neodisher® IR**

Til grundig rengøring af kirurgiske instrumenter med flyverust, fremmedrust, misfarvninger eller aflejring. Misfarvninger fra vandkvaliteten fra dampautoklaver fjernes også. Dette gøres via enten nedsænkingsbad eller gennem ultralydsbad. Midlet gendanner også den originale finish og gør instrumentet klar til anvendelse igen. Må kun anvendes på instrumenter, som er fremstillet af hærdet- eller krom-nikkel stål.

Med dette produkt får du flotte instrumenter, som holder længere. Det er bæredygtigt.

Over 70 serviceteknikere,
24 måneders garanti og
15 års garanti for at du kan
få reservedele. Det er en del
af din sikkerhed.



Din garanti

Der er 24 måneders garanti på alle Miele-modeller. Derudover garanterer vi, at du i 15 år herefter kan få reservedele til maskinen.

Hvis uheldet er ude...

Hvis din maskine en dag ikke virker, så er Miele Professional Service altid tæt på dig. Over 70 lokalt boende serviceteknikere dækker hele landet – så ventetiden er kort, hvis du har brug for hjælp.

En serviceaftale er din sikkerhed

Hos Miele Professional har du mulighed for at tegne en serviceaftale. Vi har flere produkter at vælge imellem - og som noget helt unikt tilbyder Miele validering af din desinfektionsmaskine, så du har dokumentation for, at du fortsat overholder reglerne også efter flere års brug.

Miele Professional tilbyder følgende serviceaftaler:

- Eftersyn med dokumenteret temperaturkontrol – årligt eftersyn. Gennemgang af maskinens funktioner samt dokumenteret temperaturmåling i henhold til EN ISO 15883.
- Service – gælder som en forlængelse af din 2-års garanti, så du undgår uforudsete udgifter
- Kombineret service og eftersyn med dokumenteret temperaturkontrol – årligt eftersyn. Denne aftale er en kombination af de to ovenstående aftaler.

Husk den
rigtige kemi for
den bedste
vaske kvalitet

Miele
anbefaler
Miele ProColor

Vask af **kliniktøj**

Også når det gælder vask af kliniktøj og øvrige tekstiler, har Miele Professional en løsning i høj kvalitet med lave driftsomkostninger.



PWM 507 Hygiene Performance-vaskemaskine i hvid til pulversæbe

Her får du:

- Dokumenteret overholdelse af NIR med et vaskeprogram på enten 60 °C i 60 min. eller 80 °C i 10 min.
- Patenteret SoftCare-tromle til skånsom behandling af tøjet.
- Patenteret CoolDown-system, så tøjet krøller langt mindre end i andre vaskemaskiner.
- En fremtidssikret maskine, der er forberedt til procesdokumentation.
- Miele's førsteklasses kvalitet og en maskine, der er testet til 30.000 driftstimer.
- Mulighed for tilslutning af pumpe til automatisk sæbedosering (tilkøb).

PDR 507 Tørretumbler i hvid med varmepumpe

Her får du:

- En kapacitet på 7 kg.
- Stort programudbud.
- Det patenterede Miele PerfectDry-system, som sikrer en præcis tørring af tekstilerne.
- Patenteret SoftCare-tromle til skånsom behandling af tøjet.
- Markant billigere tørring end ved brug af en elopvarmet tørretumbler.

Alle har råd til en Miele

Du behøver ikke gå på kompromis med dine drømme.

Drømmen om en ny desinfektor fra Miele Professional er inden for rækkevidde. Vælg selv, hvordan den skal finansieres.

1. Kontant - du kan vælge at betale den nye desinfektor kontant.
2. Leasing - du kan vælge at lease den nye desinfektor. Her betaler du en fast månedlig ydelse.

⋮ Tal med din forhandler, og find frem til den rette finansieringsløsning for dig.

Ring til os, og få professionel rådgivning

Hvis du er interesseret i mere vejledning og information om en løsning til din klinik, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 4327 1510 – tryk 1, eller sende en mail til: professional@miele.dk

BEMÆRK: For at du kan få en hurtig og nem installation af din desinfektor, skal følgende tekniske installationer være på plads:

PG 8582 og PG 8592:

- El: 400V 3x16 AMP.
- Koldt vand: ¾" tilslutning.
- Afløb: maks. 1,0 m over maskinens bund.
- Plads: min. H 83,3 cm, B 60 cm, D 60 cm.

PWD 8534:

- El: 230V 1 x 16 A
- Koldt vand: 3/4" tilslutning.
- Afløb: maks. 1,0 m over maskinens bund
- Plads: H 53,5 cm, B 57 cm, D 57,5 cm - maskinen skal opstilles på et bord.

Miele Professional. Immer Besser.



Miele

Miele Professional
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Telefon 4327 1510
Man-tors.: 08.00 - 16.00
Fre.: 08.00 - 15.30
E-mail: professional@miele.dk

miele-professional.dk