

Miele

Soluciones para clínicas dentales

Miele Professional. Immer Besser.



Nuestra solución 360° para su clínica dental

Calidad a todos los niveles

Disfrute de nuestra solución de sistema integral en todos los niveles de la consulta. Al utilizar las potentes soluciones dentales de nuestra solución completa de cuatro fases System4Dent, no solo optimizará el ciclo de tratamiento del instrumental, sino que también ahorrará tiempo y dinero. Miele Professional también ofrece soluciones eficientes para el cuidado de la ropa y la vajilla, para sus salas de lavandería y de descanso. Disfrute también de los modelos de financiación personalizados y de nuestro servicio técnico las 24 horas del día. Una solución integral. De un solo proveedor.

LAVANDERÍA
Cuidado de la ropa

SALA DE DESCANSO
Lavavajillas

SALA DE ESPERA
Purificación del aire

Servicio técnico





► Sostenibilidad:
nuestra contribución
a su economía

► SALA DE PREPARACIÓN
Lavadoras desinfectadoras
Componentes de las lavadoras
desinfectadoras
Esterilizadores pequeños
Documentación de procesos
Productos químicos de procesos

Índice

Lavadoras desinfectadoras

PG 8581 «El todoterreno» y

PG 8592 «El exclusivo»

Características destacadas de los productos	4
Resumen de los modelos	5

Componentes de las lavadoras desinfectadoras

Resumen de los componentes.....	8
Componentes para PG 8581, PG 8592	10
Componentes generales	22

Documentación de procesos

Posibilidades de la aplicación	25
Componentes.....	26

Cuidado de la ropa

Lavadoras y secadoras

Características destacadas de los productos	31
Resumen de los modelos.....	32

Lavavajillas

Lavavajillas

Características destacadas de los productos	34
Resumen de los modelos.....	35

Purificador de aire AirControl de Miele

PAC 1045, PAC 1080, PAC 1200

Resumen de modelos y características destacadas de los productos.....	37
---	----

Servicio técnico	38
------------------------	----

Lavadoras desinfectadoras PG 8581, PG 8592

Las grandes ventajas de Miele



Mayor capacidad

Las lavadoras desinfectadoras de Miele Professional destacan por su extraordinario rendimiento de limpieza con una elevada capacidad de carga.

- La innovadora bomba de agua adapta la presión de lavado a cada bloque de programa ofreciendo un resultado de lavado óptimo.
- Capacidad: 44 instrumentos de cuerpo hueco + juegos de instrumental* para hasta 160 pacientes

* Juego de instrumental compuesto por un espejo, una sonda y pinzas



Mayor seguridad

La nueva generación representa un elevado nivel de higiene y seguridad durante la preparación.

- El sistema de filtrado multietapa elimina las partículas de suciedad del agua de lavado con gran eficacia
- Gracias a la tecnología láser se logran uniones soldadas sin resistencia calefactora que impiden cualquier acumulación de suciedad en el interior de la cuba



Mayor confort

Los numerosos detalles de confort facilitan los procesos de trabajo para el usuario.

- El depósito de sal patentado colocado en la puerta facilita el acceso.
- AutoClose: basta un ligero contacto entre la puerta y el aparato para que la puerta se cierre automáticamente
- Manejo «Toque en acero inoxidable»: el panel de mando consta de una superficie continua de acero inoxidable.



Seguridad mediante controles

Las lavadoras desinfectadoras están equipadas con un sistema de supervisión de la presión de lavado y de los brazos aspersores, así como con un sistema de supervisión de la conductividad dependiendo del modelo. Estos sofisticados sensores contribuyen de forma decisiva a obtener resultados de tratamiento fiables.

Las desviaciones de los parámetros de programa necesarios se notifican gracias a los sensores del aparato y permiten una rápida intervención del usuario.



Secado eficiente

- EcoDry: gracias a la función AutoOpen, la puerta de la PG 8581 se abre automáticamente. De esta forma, la humedad residual de la cuba se puede evaporar con facilidad y los utensilios se secan con más rapidez
- DryPlus: el secado activo con aire caliente del PG 8592 con el filtro HEPA 13 es la solución ideal para instrumental de cuerpo hueco



Calidad demostrada de Miele

En el día a día se necesitan productos de confianza. Por eso, todas las lavadoras desinfectadoras Miele se prueban y optimizan de manera minuciosa en el laboratorio de Miele. Los años de experiencia en técnica de aplicación influyen en la evaluación para que todos los aparatos cumplan con los altos estándares de calidad de Miele, para el máximo rendimiento de limpieza con una alta presión constante, y así, unos resultados de preparación seguros.

Resumen de los modelos

Equipamiento, programas, duración del programa



Mantenimiento: cada 24 meses o tras 1.000 horas como máximo.

Lavadoras desinfectadoras	PG 8581	PG 8592
Ancho [mm]	600	600
Alto, fondo [mm]	Al 835 (820*), F 600	Al 835 (820*), F 600
Duración/Vario TD** [min]	42	40
Instrumental de transferencia [capacidad]	44	44
Extractor de saliva [capacidad]	44	44
Secado	EcoDry	DryPlus
Conexión eléctrica	Corriente trifásica***	Corriente trifásica***
Revestimiento exterior, opcional		
Carcasa blanca, metal (AW)	•	•
Acero inoxidable (AE)	•	•
Control/programas		
TouchControl/número de programas	6	7
2 posiciones de programa libres	•	•
AutoClose: bloqueo automático de la puerta	•	•
Avisador acústico, indicación acústica al final del programa	•	•
Módulo Ethernet/módulo RS232/DataDiary para la trazabilidad de procesos	Opción	Opción
Conexiones de agua		
1 x Agua fría, 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo según EN 1717)	•	•
1 x Agua fría para condensador de vapor, 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo según EN 1717)	•	•
1 x Agua desmineralizada 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo según EN 1717)	•	•
Número total de mangueras de entrada de agua 1/2" con rosca 3/4", L = aprox. 2,0 m	3	4
Bomba de desagüe Ø 22, elevación máx. 100 cm	•	•
Sistema antifugas Waterproof (WPS)	•	•
Potencia de la bomba propulsora [kW]	0,8	0,8
Sistemas de dosificación/posibilidad de conexión DOS K 85 flex	-	1
Descalcificador de agua	•	•
Condensador de vapor	•	•

Equipe su lavadora desinfectadora con:

- Cestos y componentes a partir de la página 13
- Documentación de procesos: a partir de la página 25

Lavadora desinfectadora

PG 8581 y PG 8591

Lavadora desinfectadora	PG 8581	PG 8592
Aparato de libre instalación/de instalación bajo encimera con tapa	•	•
Bomba propulsora [Qmáx. l/min]	500	500
Control/programas		
TouchControl/número de programas	6	7
2 posiciones de programa libres	•	•
AutoClose: bloqueo automático de la puerta	•	•
Avisador acústico, indicación acústica al final del programa	•	•
Módulo Ethernet/módulo RS232/DataDiary para la trazabilidad de procesos	Opción	Opción
Conexiones de agua		
1 x Agua fría, 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo según EN 1717)	•	•
1 x Agua fría para condensador de vapor, 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo según EN 1717)	•	•
1 x Agua desmineralizada 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo según EN 1717)	•	•
1 x Agua caliente, 2,0–10 bares de sobrepresión (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo según EN 1717)	–	•
Número total de mangueras de entrada de agua 1/2" con rosca 3/4", L = aprox. 2,0 m	3	4
Bomba de desagüe Ø 22, elevación máx. 100 cm	•	•
Sistema antifugas Waterproof (WPS)	•	•
Conexión eléctrica		
3 N CA 400 V 50 Hz, conmutable a CA 230 V 50 Hz, cable de conexión aprox. 2,0 m, 5 x 2,5 mm ² ; incl. conector CEE	•	•
Calefacción [kW]	8,5	8,5
Bomba propulsora [kW]	0,8	0,8
Potencia nominal total [kW]	9,3	9,3
Fusible [A]	3 x 16	3 x 16
Sistemas de dosificación		
1 dosificador (en puerta) para abrillantador	•	•
1 bomba dosificadora para detergente líquido (longitud de la lanza de aspiración: 217 mm)	•	•
1 bomba dosificadora para neutralizante (longitud de la lanza de aspiración: 217 mm)	•	–
Opciones de conexión		
Bomba externa DOS K 85 flex o DOS K 85/1 flex para medios líquidos	–	1
Descalcificador de agua		
Para agua fría y caliente hasta 65 °C	•	•
Condensador de vapor		
Atomizador	•	•
Unidad de secado/Ventilador radial		
Ventilador [kW]	–	0,3
Registro calefactor [kW]	–	2,2
Potencia nominal total [kW]	–	2,5
Caudal de aire [m ³ /h]	–	47
Ajuste de temperatura en pasos de 1 °C [°C]	–	50–115
Ajuste de tiempo en incrementos de 1 min [min]	–	0–120
Filtro para materias volátiles/filtro HEPA/tasa de filtración (DIN EN 1822)/tiempo de inactividad	–	H 13/> 99,95 %/200 h
Dimensiones/peso		
Dimensiones Al/An/F (sin tapa Al 820 mm) [mm]	835/600/600	835/600/600
Medidas de la cuba Al/An/F [mm]	522/536/O = 518, U = 523	522/536/O = 518, U = 523
Peso [kg]	74	78
Revestimiento exterior, opcional		
Carcasa blanca, metal (AW)	•	•
Acero inoxidable (AE)	•	•
Declaración de conformidad según normas		
DIN EN ISO 15883–1/2/6, EN 61010–2–040, EN 61326–1	•	•
Homologaciones y distintivos		
IP 21	•	•
CE 0297	•	•

Duraciones del programa y consumo

PG 8581	Limpieza/Desinfección					Secado	
	Duración	KW	WW	AD	Energía	Duración	Energía
	min	l	l	l	kWh	min	kWh
Vario TD Dental	42	37,1	-	9,0	2,5	7	-
Vario TD Dental +	56	49,5	-	13,0	3,1	5	-
VarioTD Intensiv	94	15	-	74,0	3,7	8	-
Especial 93 °C-10 min	56	41,5	-	14,0	3,8	3	-
Aclarado	4	10,0	-	-	0,01	-	-

PG 8592	Limpieza/Desinfección					Secado	
	Duración	KW	WW	AD	Energía	Duración	Energía
	min	l	l	l	kWh	min	kWh
Vario TD Dental	40	18,6	18,5	9,0	2,2	34*	0,9
Vario TD Dental +	54	22,8	26,7	13,0	2,7	52	0,9
VarioTD Intensiv	94	15,0	-	74,0	3,7	51	1,0
Especial 93 °C-10 min	52	11,9	29,6	14,0	3,3	79	1,4
Aclarado	4	10,0	-	-	0,01	-	-
Secado	-	-	-	-	-	40	0,7

Resumen de versiones

Aparato	Equipamiento	N.º de material
PG 8581 AW AD LD LAN	Revestimiento exterior en blanco, 2 bombas dosificadoras integradas, módulo Ethernet, LAN, EcoDry	10169830
PG 8581 AE WW AD LD	Revestimiento exterior en acero inoxidable, 2 bombas dosificadoras integradas, módulo Ethernet, LAN, EcoDry	10169860
PG 8592 AE WW AD	Revestimiento exterior en acero inoxidable, 1 bomba dosificadora integrada, toma de agua caliente, 1 módulo para la dosificación exterior, módulo Ethernet, LAN, DryPlus	10547370
Componentes		
DE-CS6-85	Tapa lavadora desinfectadora en acero inox. para cubierta superior de máquina incl. armario lateral, F 60 cm , An 90 cm	10101450

Equipe su lavadora desinfectadora con:

- Cestos y componentes a partir de la página 16
- Documentación de procesos: a partir de la página 25

Componentes dentales para la preparación segura del instrumental en lavadoras desinfectadoras

Las grandes ventajas de Miele



Extensa gama de productos

Ofrecemos la solución de preparación adecuada para cada instrumento, ya sea un adaptador, complemento o inyector, según los requisitos.



Soluciones innovadoras

Gracias al intercambio continuo de experiencias con los usuarios, logramos soluciones prácticas que pueden combinarse de manera flexible para las diferentes disciplinas.



Alta capacidad

Con los diversos adaptadores y complementos de los aparatos de la serie PG 85xx se pueden preparar hasta 44 instrumentales de cuerpo hueco más juegos de instrumental, formados por un espejo, una sonda y pinzas, para hasta 160 pacientes.



De ajuste flexible

Nuestras opciones de equipos modulares aseguran que la carga se pueda configurar de forma personalizada de acuerdo con el rendimiento del instrumental.



Seguridad tranquilizadora

Este proceso de preparación de confianza está respaldado por muchos años de experiencia en tecnología de aplicaciones y documentación segura desde el punto de vista jurídico.




Rentabilidad extraordinaria

Nuestros productos se caracterizan por su durabilidad, alta calidad y disponibilidad garantizada de piezas de recambio.

Componentes para todos los requisitos: ejemplos de aplicación

Odontología general

Ejemplo de carga para la preparación de instrumental de cuerpos huecos y sólidos

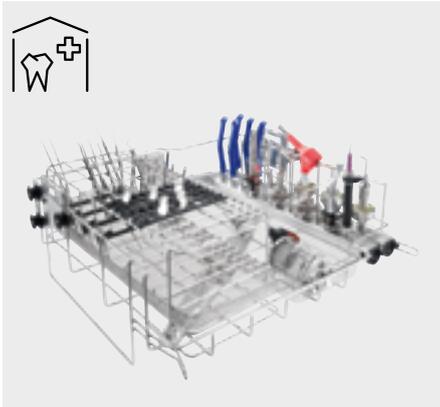

Cesto superior A 105/1

- Juego de toberas Dental A 836, tubo del filtro A 800 y cepillo limpiador A 804
- Alojamiento A 803 para instrumental de transmisión o AUF 1 con ADS 1/2/3 y adaptador A 801
- Adaptador A 813/1 para instrumental de transmisión con canal de pulverización externa
- Alojamiento A 814/1 para puntas
- Vaina de lavado A 819 para instrumental de cuerpo hueco, por ejemplo, picos de ultrasonidos magnetoscriptivos
- Complemento E 337/1 para instrumental colocado en vertical con complemento A 830/1 para espejo bucal
- Complemento E 430/1 bandeja de malla 1/3
- Complemento para piezas pequeñas E 473/2




Cesto inferior A 151

- Listón inyector E 315 con 22 espacios de inyectores
- Bandeja de malla E 430
- Complemento E 198/1 para bandejas de malla con bandeja de malla E 197

Implantología y MKG

Ejemplo de carga para la preparación de hasta 18 bandejas grandes y 22 instrumentales de cuerpo hueco

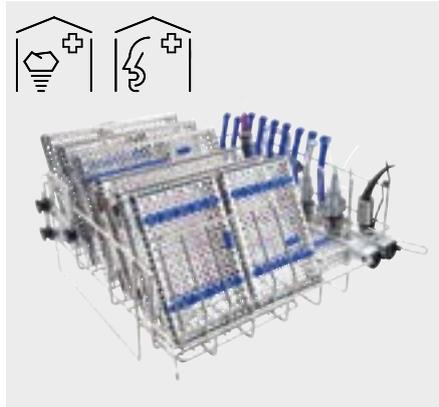

Cesto superior A 105/1

- Juego de toberas Dental A 836, tubo del filtro A 800 y cepillo limpiador A 804
- Alojamiento A 803 para instrumental de transmisión o AUF 1 con ADS 1/2/3 y adaptador A 801
- Adaptador A 865 para jeringas 3F/MF
- Adaptador A 813/1 para instrumental de transmisión con canal de pulverización externa
- Vaina de lavado A 819 para instrumental de cuerpo hueco, por ejemplo, picos de ultrasonidos magnetoscriptivos
- 1x complemento E 523 para bandejas filtrantes




Cesto inferior A 151

- 2x complemento A 317 para bandejas filtrantes


Ortodoncia

Ejemplo de carga para la preparación de instrumentos, fórceps y cubetas individuales

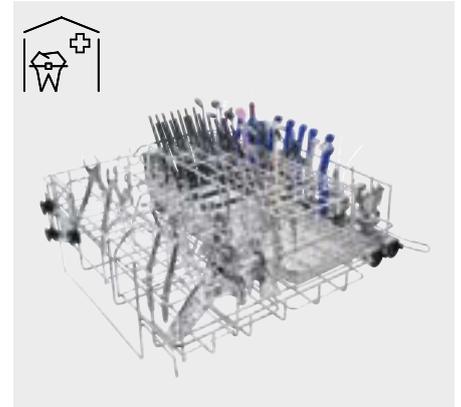

Cesto superior A 105/1

- Juego de toberas Dental A 836, tubo del filtro A 800 y cepillo limpiador A 804
- Adaptador A 803 para H&W/turbinas o AUF 1 con ADS 1/2/3 y adaptador A 801
- Adaptador A 813/1 para instrumental de transmisión con canal de pulverización externa
- Adaptador A 865 para jeringas 3F/MF
- Alojamiento A 814/1 para puntas
- Complemento E 337/1 para instrumental colocado en vertical con complemento A 830 para espejo bucal
- 2x complemento E 521/2 para fórceps
- 2x complemento E 522/1 para cubetas individuales

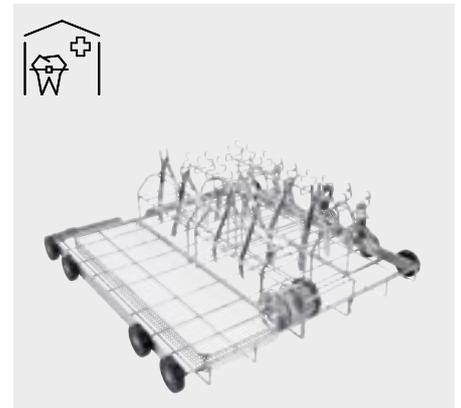

Cesto inferior A 151

- Bandeja de malla E 430
- 2x complemento E 521/2 para fórceps
- 2x complemento E 522/1 para cubetas individuales
- Complemento para piezas pequeñas E 473/2

Relación de componentes de Dental para lavadoras desinfectadoras

Paquete de ventajas para PG 8581 y PG 8592



Paquete de ventajas con la preparación de piezas de mano dentales y angulares								
A 105/1 Página 9	A 151 Página 9	A 800 Página 13	A 804 Página 13	A 803 Página 14	A 836 Página 13	E 337/1 Página 18	Complemento E 430/1 Página 20	E 473/2 Página 22

Paquete de ventajas sin la preparación de piezas de mano dentales y angulares					
A 105/1 Página 9	A 151 Página 9	A 836 Página 13	E 337/1 Página 18	E 430/1 Página 20	E 473/2 Página 22

Componentes para PG 8581 y PG 8592



Cestos y componentes de cestos							
A 105/1 Página 9	A 102 Página 23	A 151 Página 9	A 800 Página 13	A 804 Página 13	A 836 Página 13	UBS 3 Página 13	A 315 Página 13

Alojamientos, adaptadores		Toberas de lavado				
A 803 Página 14	A 812 Página 14	A 819 Página 17	E 336 Página 17	A 817 Página 17	A 865 Página 14	APWD 326 Página 15

Otras toberas de lavado
Consultar la página 17

Componentes para PG 8581 y PG 8592



Alojamientos y filtros

A 801 Página 16	AUF Página 16	Placas filtrantes FP Página 16	ADS Página 16

Complementos para diferentes instrumentos

E 337/1 Página 18	A 830 y A 830/1 Página 18	E 198/1 Página 18	E 131/1 Página 18	E 468 Página 16	E 146 Página 15	E 130 Página 19	E 339/1 Página 19	E 806/1 Página 19	E 523 Página 19	A 317 Página 19

E 476 Página 18	E 363 Página 18	E 379 Página 19	E 378 Página 19	E 441/1 Página 20	E 147/1 Página 20	E 520 Página 20	E 430/1 Página 20

Componentes para la dosificación

Bases

PG 8596 Página 21	DOS K 85/1 flex Página 21	DOS K 85 flex Página 21	UG 30-60/60-85 Página 21	UG 30-90/60-85 Página 21

Componentes para todas las lavadoras desinfectadoras Miele



Complementos para diferentes instrumentos


Complemento E 197 Página 22	E 521/2 Página 22	E 522/1 Página 22	E 491 Página 22	E 473/2 Página 22	E 807 Página 22	E 801/1 Página 16	E 143 Página 23	E 802/1 Página 22	A 813/1 Página 23	A 815 Página 23

Para la preparación con agua completamente desmineralizada

PG 8595 Página 24	VE P 2800 Página 24	VE P 2000 Página 24	ConductivityMeter Página 24


Paquete de ventajas de Dental para PG 8581 y PG 8592

Paquete de ventajas del juego Dent 1 con la preparación de piezas de mano dentales y angulares

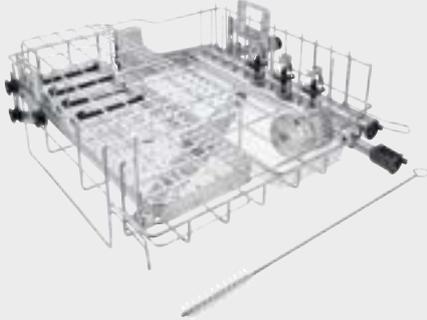

Componentes	Descripción	N.º de material
A 105/1	Cesto superior	(10777260)
A 151	Cesto inferior	(9862410)
E 473/2	Complemento	(10623720)
E 430/1	Complemento	(06643200)
A 803	Adaptador para HuW/turbinas (3 uds.)	(9863100)
E 337/1	Complemento para instrumental colocado en vertical	(7984130)
A 800	Tubo filtrante	(9960680)
A 804	Cepillo limpiador para tubo filtrante	(9960720)
A 836	Juego de toberas Dental	(11054660)


Paquete de ventajas del juego Dent 2 sin la preparación de piezas de mano dentales y angulares

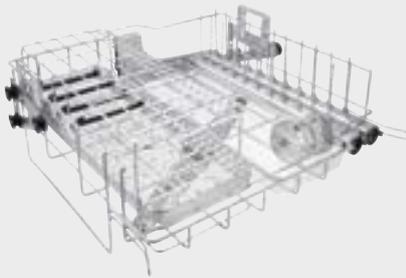

Componentes	Descripción	N.º de material
A 105/1	Cesto superior	(10777260)
A 151	Cesto inferior	(9862410)
E 430/1	Complemento	(06643200)
E 473/2	Complemento	(10623720)
E 337/1	Complemento	(7984130)
A 836	Juego de toberas Dental	(11054660)

Componentes de cestos para PG 8581 y PG 8592


Cestos y componentes de cestos

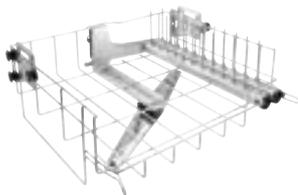

Cesto superior A 105/1

- Lateral izquierdo para alojar complementos
- Lado derecho con 22 espacios de inyectores, p. ej., para tobera inyectora A 833 (no incluida en el suministro)
- Ajustable en altura
- Secado interior activo de piezas manuales y contra-ángulos
- Tubo del filtro A 800 utilizable en ambos listones inyectores (no se suministra conjuntamente)
- Brazo aspensor integrado
- Medidas de carga Al 225 +/- 30, An 360, F 445 mm (en el lado izquierdo hay una anchura de 215 mm y un fondo de 460 mm)
- Al 202, An 528, F 526 mm


N.º de mat. 10777260

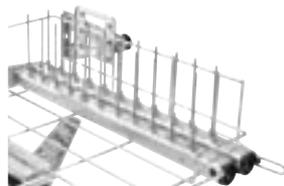

Juego de toberas Dental A 836


- Para carga del cesto superior A 105/1 y preparación de instrumental de cuerpo hueco
- Incorpora 22 toberas inyectoras A 833

N.º de mat. 11054660

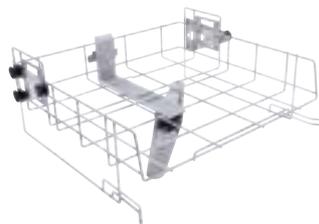

Cesto superior A 102

- Frontal abierto
- Para el alojamiento de diversos complementos
- Ajustable en altura
- Medidas de carga Al 205 +/- 30, An 475, F 443 mm
- Brazo aspensor integrado
- Al 206, An 528, F 527 mm

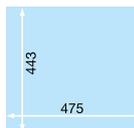


N.º de mat. 9862360



Cesto inferior A 151

- Para alojar bandejas de malla DIN normales y otros complementos
- Altura de carga en combinación con A 102 Al 230 +/- 30 mm
- A 105 Al 210 mm
- Al 88, An 529, F 522 mm

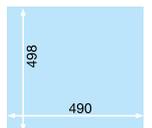

N.º de mat. 9862410



Módulo inyector A 315

- Para duplicar la capacidad de los instrumentos de cuerpo hueco mientras se utiliza el inyector del cesto superior A 105 o A 105/1
- Apto para cesto inferior A 151
- Para 22 toberas inyectoras (no incluidas en el suministro, se puede usar, por ejemplo, A 836)
- Secado interior activo de piezas manuales y contra-ángulos
- Tubo del filtro A 800 utilizable en ambos listones inyectores (no se suministra conjuntamente)
- Medidas de carga al usar el cesto inferior A 151 y al mismo tiempo el cesto superior A 105/1 Al 210 +/- 30, An 383, F 479 mm
- Altura de carga del listón inyector al usar el cesto inferior A 105/1 135 mm +/- 30 mm
- Al 145, An 492, F 542 mm

N.º de mat. 11055980



Tubo filtrante A 800

- Para su uso en el cesto superior A 105/1 y en el módulo inyector A 315

N.º de mat. 9960680



Cepillo limpiador A 804

- Para la preparación manual del tubo del filtro A 800

N.º de mat. 9960720



Juego de cambio UBS 3

- Para utilizar el cesto superior O 177/1 en PG 8581 o PG 8591
- Es necesario que el Servicio Técnico haga la modificación

N.º de mat. 10131110

Componentes para PG 8581 y PG 8594

Alojamientos, adaptadores, juego de llaves



A 803 Alojamiento para instrumentos de transmisión

- Para alojar instrumental de transmisión en el cesto superior A 105/1 y el módulo A 315 en conexión con el tubo del filtro A 800
- Adecuado para una gran variedad de fabricantes de piezas de mano y angulares y turbinas dentales

N.º de mat. 9863100



A 812 Adaptador

- Para el uso de A 814 o A 815 en G 7881/G 7891
- Para su uso en el cesto superior O 177/1 con FP
- 4 x tornillos ciegos E 362
- 5 x FP
- Para obtener información sobre el uso en G 7831, póngase en contacto con nosotros.

N.º de mat. 10619680



NOVEDAD: Adaptador A 865

- Para el alojamiento óptimo de cánulas de jeringas MF y 3F
- Uso con cesto superior A 105/1 y módulo A 315
- Solo apto en conexión con el tubo del filtro A 800
- Compatible con cánulas de gran cantidad de fabricantes habituales
- Al 122 mm, An 32 mm, F 28 mm

N.º de mat. 11709860



Juego de llaves A 838

- Formado por llave Torx y de boca
- Adaptado para los cestos superiores y carros de carga de Miele

N.º de mat. 11054290

Componentes para PG 8581 y PG 8592

Preparación de sistemas de sedación con óxido nitroso



NOVEDAD: Complemento APWD 325

- Para la preparación de mangueras y sistemas de sedación con óxido nitroso
- Con juego de adaptadores, ampliable para la preparación simultánea de hasta cinco mangueras dobles
- Limpieza y secado interior y exterior fiables gracias a la adaptación segura al sistema de inyección
- Preparación paralela de mascarillas en bandeja de malla E 146
- Obtención de gran capacidad para cuerpos huecos
- Otros instrumentos dentro de la misma carga

N.º de mat. 12036420

Disponible a partir del T2/2022



NOVEDAD: Complemento APWD 328

- Set de ampliación para preparar hasta 5 mangueras dobles de sistemas de óxido nitroso dental
- 5 chapas plegables y giratorias

N.º de mat. 12036450

Disponible a partir del T2/2022



NOVEDAD: Adaptador APWD 326

- Juego de equipamiento para manguera doble de sistemas de óxido nitroso
- Adaptador de 2 piezas

N.º de mat. 12036440

Disponible a partir del T2/2022



Complemento E 146

- Para alojamiento de mascarillas de sedación dental
- Abertura de malla del fondo: 3 mm
- Abertura de malla lateral de 1,7 mm
- Abertura de malla en tapa de 8 mm
- Dos asas de transporte abatibles
- Para cesto superior o inferior
- Al 55, An 150, F 225 mm

N.º de mat. 03346680



Componentes para PG 8581 y PG 8592

Alojamientos y filtros que pueden utilizarse con el adaptador A 801



Alojamiento AUF 1

- Alojamiento para instrumental de transmisión en el cesto superior O 177/1 para G 7881 y G 7891
- También puede utilizarse con el adaptador A 801 en el cesto superior A 105/1
- Se compone de: junta, casquillo roscado, estribo de soporte, piezas inferior y superior de sujeción, cinco placas filtrantes

N.º de mat. 5159510



Alojamiento AUF 2 para G 7831

- Alojamiento para instrumental de transmisión en el cesto superior O 801/2
- También puede utilizarse con el adaptador A 801 en el cesto superior A 105/1
- Se compone de: junta, casquillo roscado, estribo de soporte, piezas inferior y superior de sujeción, cinco placas filtrantes

N.º de mat. 5282470



Placas filtrantes FP para AUF 1 y AUF 2

- 20 unidades
- Porosidad 2
- Diámetro 30 mm

N.º de mat. 6059480



A 801 Adaptador

- Adaptador para la utilización de AUF 1 y AUF 2 en conexión con A 105/1

N.º de mat. 9862940



Adaptador ADS 1/silicona para AUF 1 y AUF 2

- Adaptador para alojar instrumental de transmisión
- Para piezas de mano y angulares/turbinas con un Ø de aprox. 20 mm
- Blanco

N.º de mat. 5159530

Adaptador ADS 2/silicona para AUF 1 y AUF 2

- Adaptador para alojar instrumental de transmisión
- Para piezas de mano y angulares/turbinas con un Ø de aprox. 16 mm
- Verde

N.º de mat. 5159540

Adaptador ADS 3/silicona para AUF 1 y AUF 2

- Adaptador para alojar instrumental de transmisión
- Para piezas de mano y angulares/turbinas con un Ø de aprox. 22 mm
- Rojo

N.º de mat. 5159550

Componentes para PG 8581 y PG 8592

Toberas de lavado para cestos con listón inyector



Tobera inyectora A 832

- Longitud 60 mm, Ø 2,5 mm, atornillable
- Con orificios lateral adicionales

N.º de mat. 10635440



Tobera inyectora A 816

- Longitud 90 mm, Ø 2,5 mm, atornillable
- Con orificios lateral adicionales

N.º de mat. 10635660



Tobera inyectora A 833

- Abrazadera de retención
- Longitud 110 mm, Ø 4 mm, atornillable
- Con orificios lateral adicionales

N.º de mat. 10635480



Tobera inyectora A 834

- Longitud 150 mm, Ø 8 mm, atornillable
- Muelle para el ajuste de altura (N.º de mat. 4 692 430)
- Con orificios lateral adicionales

N.º de mat. 10635650



Vaina de lavado E 336

- Longitud 121 mm, Ø 11 mm

N.º de mat. 3809390



Vainas de lavado A 817

- Longitud 65 mm, Ø 11 mm
- Tapa, orificio Ø 6 mm (N.º de mat. 4 174 960)
- Abrazadera de fijación (N.º de mat. 4 174 850)

N.º de mat. 10706260



Tapas A 818

- 12 tapas para vainas de lavado
- Orificio Ø 2,5 mm

N.º de mat. 10706620



Vainas de lavado A 819

- Para instrumental de cuerpo hueco como picos de ultrasonidos magnetoscriptivos, como Cavitron® (con asas clásicas y FitGrip)*
 - Dimensiones interiores 108 mm, dimensiones exteriores 128 mm, Ø 11 mm
 - Tapa, orificio Ø 10 mm
 - Con abrazadera de fijación, utilización solo con uso
- * Cavitron es una marca registrada de Dentsply-Sirona

N.º de mat. 10721750

Componentes para PG 8581 y PG 8592

Complementos



Complemento E 198 1/2

- Para 6 jaulas de malla metálica/ bateas arriñonadas
- 7 soportes (6 compartimentos)
Al 160, distancia 50 mm
- Al 160, An 180, F 495 mm
- Para el alojamiento de la bandeja de malla E 197

N.º de mat. 7984040



E 363 Complemento 1/6 bandejas de malla

- Abertura de mallas de 1 mm, con tapa
- Sin alojamiento para fijar el instrumental
- Al 55, An 150, F 225 mm


N.º de mat. 3149790



Complemento E 131/1 1/2

- Para 5 jaulas de malla metálica/ bateas arriñonadas
- Seis soportes, altura 160 mm, distancia 80 mm
- Para cesto inferior
- Al 168, An 180, F 495 mm (solo se puede usar en el cesto inferior en combinación con E 363)
- Para el alojamiento de la bandeja de malla E 363

N.º de mat. 5771030

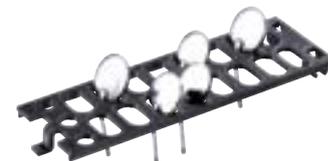

Complemento A 830

- Para su uso en el complemento E 337/1, para alojar todas las partes del espejo bucal desmontable
- 3 compartimentos Ø 8 mm, 14 compartimentos 10 x 19 mm, 2 compartimentos 8 x 19 mm
- Los mangos del espejo bucal (tamaño ≥ 3) pueden ajustarse en los compartimentos del E 337/1
- Al 12, An 49, F 154 mm

N.º de mat. 10730400



E 337/1 Complemento 2/5

- Para instrumental, colocado en vertical
- 4 soportes de plástico
12 compartimentos aprox.
22 x 28 mm
4 compartimentos aprox.
25 x 28 mm
48 compartimentos aprox.
13 x 14 mm
- Al 148, An 173, F 445 mm

N.º de mat. 7984130



Complemento E 468

- Cesto de malla con tapa
- Para la preparación de motores quirúrgicos tras la retirada de la barra
- Tener en cuenta las instrucciones de preparación del fabricante
- de acero inoxidable
- Abertura de malla 5 x 5 x 1 mm
- Al 70/76, An 250, F 170 mm
- no se puede usar en E 198

N.º de mat. 05043640



Alojamiento E 476

- Se puede usar en filtros con abertura de malla de 5 mm
- Para el alojamiento de instrumentos de 4–8 mm de diámetro y para la fijación de motores quirúrgicos en la bandeja de malla E 468
- 50 unidades por bolsa

N.º de mat. 05692400

Componentes para PG 8581 y PG 8592

Complementos



Complemento E 130 1/2

- Para 10 bandejas
- 11 soportes (10 compartimentos)
Al 170, distancia 35 mm
- Al 180, An 180, F 445 mm

N.º de mat. 2648950



Complemento E 523 1/2

- Para bandejas filtrantes
- 7 soportes (6 compartimentos)
Al 145, distancia 50 mm
- Al 151, An 220, F 450 mm

N.º de mat. 5649700



NOVEDAD: Complemento A 317

- Para el alojamiento óptimo de 6 bandejas filtrantes grandes
- Equipado con 7 soportes
- La inclinación ajustable permite insertar hasta 18 bandejas filtrantes grande en los aparatos PG 8581 y PG 8591
- Al 145 mm, An 155 mm, F 465 mm

N.º de mat. 11710110



Complemento E 339/1 3/5

- Para 12 bases portabandejas/bandejas
- 14 soportes (13 compartimentos)
An 295, distancia 37 mm
- Tamaño máx. de bandejas 290 x 30 mm (An x F)
- Al 115, An 305, F 498 mm

N.º de mat. 9233840



Complemento E 378 1/1 cesto de malla

- Con abertura de mallas de 1,7 mm
- 2 asas de transporte
- Al 80 + 30, An 460, F 460 mm

N.º de mat. 3203530



Complemento E 379 1/2 cesto de malla

- Con abertura de mallas de 1,7 mm
- 2 asas de transporte
- Al 80 + 30, An 180, F 445 mm

N.º de mat. 3203500



Complemento E 806/1

- Para 8 bases portabandejas/bandejas
- 9 soportes (8 compartimentos)
- Tamaño máx. de bandejas 290 x 30 mm (An x F)
- Al 114, An 305, F 348 mm

N.º de mat. 9013220

Componentes para PG 8581 y PG 8591

Complementos



E 430/1 Complemento 1/3 jaulas de malla

- Para el alojamiento de instrumental
- Con abertura de mallas de 5 mm
- Al 40, An 150, F 445 mm

N.º de mat. 06643200



Complemento E 441/1 1/4

- Bandeja de malla metálica para microinstrumental
- Con abertura de mallas de 1,7 mm, laterales cerrados, apilable
- División interior con 6 separadores intercambiables para el alojamiento protegido del instrumental
- Apto para la esterilización a vapor a 121 °C/134 °C
- Al 60, An 183, F 284 mm

N.º de mat. 5988240



Complemento E 520

- Para 17 instrumentos para conducto radicular
- Abatible
- Apto para la esterilización a vapor a 121 °C/134 °C
- Al 45, An 75, F 30 mm

N.º de mat. 5409080



Complemento E 147/1 1/2

- Para 10–12 vasos para enjuague bucal, máx. Ø 80 mm
- Bastidor de metal rilsanizado
- Al 155, An 220, F 455 mm

N.º de mat. 4746620

Componentes para PG 8581 y PG 8592

Para la dosificación de productos químicos de procesos y bases



Armario PG 8596

Armario para el alojamiento de módulos de dosificación y agentes químicos de procesos

- Al 835 (820), An 300, F 600 mm
- Apto para PG 8581, PG 8591
- Aparato independiente, empotrable bajo encimera
- Armario con puerta desmontable
- Revestimiento exterior opcionalmente en acero inoxidable (AE) o blanco (AW)
- Dimensiones interiores: Al 690/380/285 mm (cajón superior desmontable/cajón superior/inferior), An 250 mm, F 555/425 mm (sin/con bandeja colectora y módulos de dosificación)

Dividido en 2 niveles:
Extraíble, cajones introducidos sobre guías telescópicas con bandeja colectora para alojar depósitos con agentes químicos de procesos

Tamaños de los depósitos (longitud x ancho x alto)
En total se pueden alojar un total de seis garrafas de 5 l cada una (245 x 145 x 225 mm*).
La caja inferior además ofrece la posibilidad de introducir depósitos más grandes:

- 2 x 10 l: 140 x 193 x 307 mm
- 2 x 10 l: 223 x 203 x 321 mm
- 2 x 10 l: 229 x 193 x 323 mm
- 2 x 10 l: 194 x 204 x 353 mm
- 1 x 20 l: 289 x 233 x 396 mm
- 1 x 25 l: 288 x 234 x 456 mm

PG 8596 D AW DOS – Armario
N.º de mat. 10087330

PG 8596 D AE DOS – Armario
N.º de mat. 10087340

* Solo es posible con el módulo de dosificación DOS K 85/1 flex con lanza de aspiración corta.



Módulo de dosificación DOS K 85/1 flex

- Para productos líquidos como detergentes alcalinos, productos para desinfección química, neutralizantes
- Bomba dosificadora con lanza, ajustable a través de control electrónico de la máquina
- Con función de control de dosificación integrada para una mayor seguridad de procesos según norma UNE-EN 15883
- Lanza de succión corta (217 mm) para garrafa de 5 l, incl. control de nivel de llenado de la garrafa
- Longitud del cable de conexión eléctrica: 3,00 m
- Lanza de succión larga: 1,80 m
- Sucesor de DOS K85/1

N.º de mat. 11498920



Módulo de dosificación DOS K 85 flex

- Como DOS K 85/1 flex
- Pero con lanza larga para depósitos de 5 y 10 l (352 mm)
- Opción: lanza de aspiración larga para depósitos de 20–30 litros (467 mm) y tapa correspondiente disponible mediante el Servicio Post-venta (n.º de mat. 11033480 y 11033560)
- Sucesor de DOS K85

N.º de mat. 11498880



Base UG 30-60/60-85

- Apta para PG 8581 y PG 8591
- Base de acero inoxidable, atornillable a la máquina
- Al 300, An 600, F 600 mm

N.º de mat. 10087350



Base UG 30-90/60-85

- Apta para PG 8581 y PG 8591 en combinación con PG 8595 o PG 8596 (es posible el montaje a ambos lados PG 8595/PG 8596)
- Base de acero inoxidable, atornillable a la máquina
- Al 300, An 900, F 600 mm

N.º de mat. 10087360

Componentes para todas las lavadoras desinfectadoras Miele

Complementos



E 197 Complemento 1/6 bandejas de malla

- Para el alojamiento de instrumental
- Abertura de mallas con las siguientes medidas: suelo 3 mm, laterales 1,7 mm, tapa 8 mm
- Apto para la esterilización a vapor a 121 °C/134 °C
- Al 42, An 150, F 225 mm

N.º de mat. 7984090



Complemento E 473/2

- Jaula de malla metálica con tapa para piezas pequeñas
- Para colgar en las bandejas de malla
- Al 88, An 66, F 66 mm

N.º de mat. 10623720



Complemento E 491

- Complemento para instrumental rotatorio
- Para 18 ejes de turbina
- Para 30 ejes de contra-ángulo
- Al 53, An 70, F 120 mm

N.º de mat. 7600210



Complemento E 802/1

- Para instrumental, colocado en vertical
- 3 soportes de plástico
- 8 compartimentos aprox. 30 x 28 mm
- 8 compartimentos aprox. 16 x 28 mm
- 15 compartimentos aprox. 16 x 20 mm
- Al 148, An 163, F 295 mm

N.º de mat. 7984170




NOVEDAD: Complemento A 830/1

- Para su uso en el complemento E 337/1 y E 802/1, para alojar todas las partes del espejo bucal desmontable (tamaño ≥ 3)
- 3 compartimentos \varnothing 8 mm, 14 compartimentos 10 x 19 mm, así como 2 compartimentos 8 x 19 mm
- Los mangos del espejo bucal pueden ajustarse en los compartimentos del E 337/1 o E 802/1.
- Al: 12, An 49, F 159 mm

N.º de mat. 11729480

Disponible a partir del T2/2021

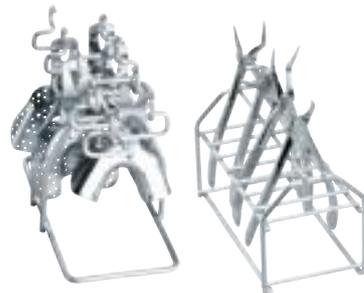

Complemento E 522/1 (a la izquierda)

- 9 soportes para colgar cubetas individuales
- Al 140, An 100, F 190 mm

N.º de mat. 6697010

Complemento E 521/2 (a la derecha)

- Para alojar 7 pinzas de extracción, ortodoncia maxilar o pinzas técnicas
- Subdivisiones 21 x 80 mm
- Al 135, An 100, F 189 mm


N.º de mat. 7476430



E 801/1 Complemento

- Para 8 vasos para enjuague bucal, máx. \varnothing 75 mm
- Bastidor de metal rilsanizado
- Al 155, An 200, F 320 mm

N.º de mat. 5673820

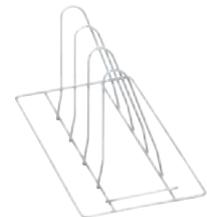

Complemento E 807

- Para 3 jaulas de malla metálica/bateas arriñonadas
- 4 soportes (3 compartimentos) Al 165, distancia 58 mm
- Al 144, An 180, F 330 mm

N.º de mat. 7984220

Componentes para todas las lavadoras desinfectadoras Miele

Complementos



Complemento E 143

- Complemento para el alojamiento óptimo de instrumental variado.
- Grosor de malla de 1 mm, marco perimetral de 5 mm
- Equipado con 2 asas de transporte abatibles

N.º de mat. 03830310



A 815 Boquilla

- Para la preparación de instrumental de transmisión con pulverización externa
- Para el uso con A 812, A 813/1 o en cesto superior A 105 con filtro A 800
- 4 x boquillas con tubo de silicona

N.º de mat. 10619690



Adaptador A 813/1

- Para la preparación de hasta 4 instrumentales de transmisión con pulverización externa
- De dos piezas, compuesto por una pieza sup. e inf. inc. accesorio
- 4 x boquillas con tubo de silicona
- 3 x tornillos ciegos E 362
- Para su uso en los cestos superiores A 105 y A 105/1 y en el módulo A 315 - Uso solo en conexión con el tubo del filtro A 800
- NOVEDAD: Para su uso en el cesto APWD 061 - Uso solo con placa de filtro APWD 069 y adaptador A 822

N.º de mat. 11763880



Adaptador A 814/1

- Para la preparación de puntas para Air Scaler y Piezo Scaler
- Indep. del fabricante, para una variedad de puntas diferentes
- Posibilidad de uso de varios alojamientos en una conexión de inyector con A 813/1 o A 812
- Para su uso en los cestos A 105, A 105/1, O 177/1 y APWD 061 y módulo A 315
- Uso en A 105, A 105/1 y A 315 solo en conexión con el tubo del filtro A 800
- Uso en O 177/1 solo en conexión con el alojamiento A 812 y la placa de filtro FP
- Uso en APWD 061 solo con adaptador A 822 y adaptador A 813/1 con filtro APWD 069
- Ø 22 mm x Al 48 mm

N.º de mat. 11691870

Componentes para todas las lavadoras desinfectadoras Miele

Para la preparación con agua completamente desmineralizada



PG 8595 Aqua Purificator

Armario para el alojamiento de 2 bombonas de desmineralización VE P 2000/VE P 2800

- Apto para PG 8581, PG 8591
- Calidad recomendada para el aclarado posterior < 19 µS/cm
- Al 835 (820), An 300, F 600 mm
- Aparato de libre instalación, empotrable bajo encimera
- Revestimiento exterior opcionalmente en acero inoxidable (AE) o blanco (AW)
- Volumen de suministro: armario para el alojamiento vacío; el equipamiento necesario debe pedirse por separado

PG 8595 D AW Aqua Purificator

N.º de mat. 10087310

PG 8595 D AE Aqua Purificator

N.º de mat. 10087320

Acoplamiento rápido SK para agua bombonas

Juego de conversión para cambiar las bombonas fácilmente formado por:

- 2 conexiones enchufables de 3/4" / SK, para atornillar directamente en las bombonas
- 2 acoplamiento rápido con racor doble de PVC de 3/4", juntas incluidas para el juego de mangueras existente

N.º de mat. 09782600

Juego de cambio para bombonas de recambio UfZ

En el caso de que se trabaje con dos bombonas, estas 2 conexiones enchufables VA de 3/4" se pueden atornillar a la segunda bombona. Con ello no es necesario el desmontaje de las conexiones de la primera bombona.

N.º de mat. 10020100



Bombona de desmineralización LP 2800, vacía

- Como VE P 2800, pero: Volumen de suministro: sin resinas. Rellenable con 19 l de resina de un solo uso.

N.º de mat. 09782590

Resinas de un solo uso E 315

- 20 l de mezcla homogénea de resinas para LP 2800
- Cartón con 2 bolsas de plástico de 10 litros c/u, envasadas al vacío
- Manga filtrante para sustitución

N.º de mat. 03830350

Kit de llenado E 316

- Barril de plástico, con tapa y embudo para 30 l de resinas de un solo uso

N.º de mat. 03830360



Bombonas de desmineralización de agua completa VE P 2000 llenas

- Bombona de acero inoxidable, resistente a la presión
- Caudal máx. 450 l/h
- Al 410, Ø 230 mm
- Equipada con válvula de purgado y de sobrepresión
- Llena con 12,5 litros de una mezcla homogénea de resinas regenerables

N.º de mat. 09773410



ConductivityMeter CM/1

Módulo medidor de la conductividad para bombonas de agua desmineralizada

VE P 2000 y VE P 2800

- Display de una fila, iluminado
- 10 puntos de conmutación en el rango de medición 0-199,9 µS/cm
- Indicación óptica y acústica para sustituir la bombona
- Indicación óptica y acústica de anomalías
- Soporte de pared
- Conexión a LED externo (opcional)
- Al 118, An 235, F 110 mm
- Entrada: 110-240 V, 50/60 Hz, 85 mA; salida: 9 V, 400 mA, 3,6 VA
- Volumen de suministro Célula de medición con visualización LED y cable de conexión (longitud 1,0 m), 2 mangueras de presión 3/4" (longitud: 1 x 1,94 m, 1 x 1,5 m)

N.º de mat. 10889920

Sistema de documentación de procesos

Solución basada en app

La nueva app DataDiary: sencilla, rentable, segura

Miele Professional ofrece la solución especial Plug & Play a través de la app DataDiary para documentar los procesos de principio a fin. Esta recibe automáticamente los datos del proceso de las lavadoras desinfectadoras PG 8581 y PG 8592 y permite crear el protocolo a través de la App en una tablet, sin cables, memorias USB u otros pasos intermedios. La práctica solución ahora es compatible con hasta nueve aparatos Miele a través de una red de conexión WiFi de la clínica.



Manejo fácil

Con DataDiary, Miele ofrece una aplicación intuitiva, con una moderna interfaz de usuario para documentar los procesos. Se trata de una solución Plug & Play, es decir, tan solo conectar y listo.

Compatibilidad con hasta nueve aparatos diferentes al mismo tiempo

DataDiary ahora es compatible con hasta nueve lavadoras desinfectadoras de la serie PG 858x/9x.

Vinculación en la red de la consulta

La app DataDiary se comunica con todos los aparatos vinculados a través de la red local existente de la consulta. Si únicamente hubiera que documentar un aparato, esto se puede realizar de la forma habitual en el modo Access Point.



Autenticación rápida

La autenticación del usuario se puede realizar mediante NFC-Tag o ID de usuario y contraseña.



Inalámbrica y segura

La transmisión de datos se realiza de forma inalámbrica y segura mediante WiFi (WPA2) a través de la red local de la consulta. La conexión WiFi es fácil de establecer con SSID (Service Net Identifier) y contraseña.



Protocolo como PDF

La correcta preparación del instrumental se debe documentar por completo. Para ello, DataDiary permite crear un protocolo en formato PDF.



DataDiary

- Solución Plug & Play moderna y sin mantenimiento para lavadoras desinfectadoras de la serie PG 858x/9x
- Transmisión de datos segura e inalámbrica por WiFi encriptada
- Creación de protocolos en formato PDF
- Identificación de usuario por ID con contraseña o etiqueta NFC
- Incluye acceso a la app, un módulo de comunicación y 5 tarjetas¹ NFC

N.º de mat. 10689630



DataDiaryID

- Incluye 5 tarjetas de chip para DataDiary y DataDiary CUBE
- Para el registro fácil de usuarios por etiqueta NFC

N.º de mat. 10735270



Acompañe al Dr. Dent en la documentación de procesos con la App DataDiary.

Requisitos del sistema:

Tablet a partir de 7" con una resolución de pantalla mínima de 1280 x 800 píxeles y un sistema operativo a partir de Android™ 8 o iOS® 10.

¹ La tablet no está incluida en el precio/suministro



APS 101 Sego – Segosoft Miele Edition

- Software de documentación de proceso para conexión directa a PC o conexión a red

Volumen de prestaciones

- Descarga* de software, paquete de software: Comfort Plus, instrucciones de instalación en PDF, tarjeta de licencia¹ para un dispositivo

Transmisión de datos

- Conexión directa entre aparato y PC o aparato y ordenador de la clínica vinculado

Compatibilidad de modelos

- Lavadoras desinfectadoras Miele y esterilizadores pequeños
- Aparatos de otros fabricantes: consultar

N.º de mat. 10019160



APS 102 Sego – SegoAssign Plus:

- Licencia opcional para vincular el Segosoft Miele Edition con el sistema de gestión de pacientes interno de la clínica para asignación sencilla, rápida y sin gasto de papel de las cargas a los pacientes.

Volumen de prestaciones

- Tarjeta de licencia¹

N.º de mat. 10106600

Requisitos del sistema para todos los sistemas de software

- Frecuencia CPU de al menos 3 GHz, se recomienda a partir de 4 GHz
- Sistema gráfico SVGA con 1024 x 768 píxeles, se recomienda monitor de 21" o más con HD 1920 x 1080 píxeles
- Memoria RAM de al menos 4 GB, se recomiendan 8 GB
- Disco duro con al menos 256 GB de espacio libre de almacenamiento, se recomienda a partir de 500 GB
- Mínimo 2 puertos USB, se recomiendan 3 puertos USB, puerto de red, acceso a Internet
- Sistema operativo: Windows 10
- Adobe Acrobat Reader a partir de la versión 11.08 o superior
- Se recomienda un sistema de copia de seguridad

Descarga del software

- <https://www.miele.de/professional/service-und-support-52.htm>

Prestación adicional del servicio técnico concertado de Miele:

Tarjeta de servicio con volumen de prestaciones (obligatoria para Miele Segosoft Edition)

- Actualización de la firma electrónica para mayor validez legal
- Soporte telefónico, actualización de software
- Importe global tasa anual por clínica: 215 € (sin SegoAssign Plus)
- Importe global tasa anual por clínica: 295 € (con SegoAssign Plus)

Nota: validez legal de la firma electrónica en Segosoft Miele Edition según las directrices del BSI (Servicio federal alemán para la seguridad en las técnicas de información). La ampliación de la validez legal se realiza junto con la tarjeta ServiceCard sujeta a costes. (Importe global tasa anual por clínica: 215 €, (sin SegoAssign Plus)

¹ Prestación adicional necesaria: ServiceCard (mantenimiento de software/Support)



APH 550 Sego – Impresora de etiquetas para Segolabel Miele Edition

- Paquete completo formado por software y hardware para crear etiquetas para los utensilios estériles

Volumen de prestaciones

- CD de software*, instrucciones de instalación, impresora de etiquetas PRT 200 con cable de red incluido (3,8 m de longitud) y cable USB (2 m de longitud)
- 1 rollo de etiquetas de aprox. 1.000 etiquetas
- Banda de transferencia a color

N.º de mat. 7951400

APH 595 – Banda de transferencia a color

- Banda de transferencia a color para impresora de etiquetas APH 550 Sego que se puede adquirir posteriormente

N.º de mat. 7951520

APH 596 – Etiquetas

- Etiquetas para impresora de etiquetas APH 550 Sego

Suministro

- 1 rollo de 1.000 etiquetas

N.º de mat. 7951530



APH 510 PRT110 – Impresora de protocolos

- Impresora para la impresión de los protocolos de procesos

Compatibilidad de modelos

- Todas las lavadoras desinfectadoras Miele
- PG 8581 y PG 8592 solo en conexión con el módulo serial de comunicación XKM RS232 10 Med

N.º de mat. 11053310

APH 530 – Cable de impresora para impresora APH 510 PRT110

- Longitud del cable de impresión 10 m (cable no incluido en el suministro de la impresora)

N.º de mat. 6095260

APH 592 – Cartucho de color negro para APH 510 PRT110

N.º de mat. 11053500

APH 591 – Rollos de papel, 5 uds. para APH 510 PRT110

N.º de mat. 9063410



APH 110 Net500 – Convertidor de red Net500

- Conexión de aparatos con interfaz serial a una red de la clínica (conexión de red según opción 3)
- Transformación de datos serie (RS 232) en datos de red (TCP/IP)
- Es posible conectar aparatos de otros fabricantes

Volumen de prestaciones

- Conector fuente de alimentación
- Longitud del cable de alimentación 1,4 m
- Medidas (Al x Lo x An): 31 x 90 x 109 mm

Cable de conexión para Net500

- Cable del aparato: cable de conexión serial (TIPO 1 o TIPO 2 en función del modelo de aparato) para conectar Net500 con el aparato
- Cable de red del aparato: cable de red (TIPO 6 o TIPO 7 en función de la longitud deseada) para conectar Net500 con la red de la clínica

N.º de mat. 9687440

Otros componentes para la documentación de procesos

Otros productos	N.º de material
APH 301 – Cable de prolongación, de serie, longitud 3 m (TIPO 1)	7951420
APH 302 – Cable de prolongación, de serie, longitud 3 m (TIPO 2)	7951410
APH 303 – Cable de prolongación 3 m (TIPO 3) para cable de prolongación TIPO 1 o 2	7951430
APH 304 – Cable de prolongación 5 m (TIPO 4) para cable de prolongación TIPO 1 o 2	7951440
APH 305 – Cable de prolongación 10 m (TIPO 5) para cable de prolongación TIPO 1 o 2	7951450
APH 330 – Adaptador «Gender Changer», p. ej., para herramienta de sellado Hawo	7986870
APH 406 – Cable de red, longitud 3 m (conexión a red) (TIPO 6)	7951470
APH 407 – Cable de red, longitud 5 m (conexión a red) (TIPO 7)	7951480
APH 408 – Cable de red, Crossover, longitud 3 m (conexión directa a PC) (TIPO 8)	7951490
APH 409 – Cable de red, Crossover, longitud 5 m (conexión directa a PC) (TIPO 9)	7951500
APH 531 – Adaptador (módem nulo) para cable de impresora APH 510 PRT110	9573970
APH 190 – Soporte para convertidor de red Net500, convertidor industrial de serie	9573570

¹ Prestación adicional necesaria: ServiceCard (mantenimiento de software/Support)

Módulo de comunicación para documentación de procesos

Componentes



Módulo Ethernet/WiFi XKM 3200 WL LMD

- Módulo de comunicación para interconexión de dispositivos con conexión con cable o WiFi
- Para una conexión segura al portal web Miele MOVE
- Es compatible con Segosoft Miele Edition y otros software de documentación de procesos
- Posibilidad de controlar impresoras de red compatibles con PostScript3
- Memoria cíclica máx. 30 protocolos proceso y 2 protocolos gráficos
- Velocidad de transmisión: 100 Mbit/s
- Longitud del cable de conexión: 1,5 m

N.º de mat. 11795280



Módulo Ethernet XKM 3000 L Med

- Módulo de comunicación para conexión con Segosoft Miele Edition u otro software de documentación de procesos
- Memoria cíclica máx. 30 protocolos proceso y 2 protocolos gráficos
- Utilizable sin componentes adicionales para conexión directa o de red
- Compatible con DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para configurar automáticamente los parámetros de red
- Velocidad de transmisión: 10/100 Mbit/s
- Longitud del cable de conexión: 1,5 m
- Posibilidad de ampliar el cable mediante pieza de acoplamiento adjunta

N.º de mat. 10440980



Módulo serial XKM RS232 10 Med

- Módulo de comunicación para conectar a una impresora de protocolos APH 510 PRT110
- Memoria cíclica para hasta 25 protocolos de proceso
- Diferenciación entre protocolo largo y corto para realizar la adaptación de la longitud del protocolo a las necesidades de cliente
- Velocidad máxima de transmisión: máx. 38 kBits
- Longitud del cable de conexión: 1,5 m
- Posibilidad de prolongación de cable hasta 15 m en total

Opcional para los aparatos PG 8581 y PG 8591.

N.º de mat. 10444420



DataDiary

- Para lavadoras desinfectadoras PG 8581 y PG 8591
- Para la conexión a la red de la consulta local
- Módulo de comunicación WiFi XKM 3100 W CDS
- 5 tarjetas de chip NFC
- Instrucciones de manejo e instalación
- Tablet no incluida en el suministro

Incluido en el suministro de los aparatos PG 8581 y PG 8591 cuando se elige el juego con WiFi.

N.º de mat. 10689630

Documentación de procesos

Todo a la vista


Documentación de procesos							
		Conexión directa entre PC y aparato		Conexión a la red de la consulta			Impresora
		Opción 1:	Opción 2:	Opción 3:	Opción 4:	Opción 5:	
		Conexión del PC en el aparato con interfaz serial	Conexión del PC en el aparato con módulo de comunicación (Ethernet, WiFi)	Conexión del red en el aparato con interfaz serial	Conexión de red en el aparato con la interfaz de red del aparato (Ethernet, WiFi)	Conexión de red en aparatos con módulo de comunicación XKM 3200 WL LMD o XKM 3000 L Med	
		p. ej., Miele Lavadora desinfectadora PWD 853x	p. ej., Miele Lavadora desinfectadora PG 858x/9x (con XKM 3200 WL LMD o XKM 3000 L Med)	p. ej., Miele Lavadora desinfectadora PWD 853x	p. ej., Miele Lavadora desinfectadora PG 858x/9x, PG 8536	p. ej., Miele Lavadora desinfectadora PG 858x/9x	p. ej., Miele Lavadora desinfectadora PG 858x/9x (con XKM RS232 10 Med)
App DataDiary		Nº de mat.					
DataDiary: para PG 858x/9x	10689630				X (conexión vía WiFi)		
Segosoft Miele Edition		Nº de mat.					
APS 101 Sego – Segosoft Miele Edition (licencia) ¹	10019160	X	X	X	X	X	
APH 301: cable de prolongación TIPO 1, de serie, longitud 3 m	7951420	X (TIPO 1 o TIPO 2, en función del modelo de aparato)		X (TIPO 1 o TIPO 2, en función del modelo de aparato)			
APH 302: cable de prolongación TIPO 2, de serie, longitud 3 m	7951410						
APH 303 – Cable de prolongación TIPO 3, 3 m para cable de conexión TIPO 1 o 2	7951430	Opción					
APH 304 – Cable de prolongación TIPO 4, 5 m para cable de conexión TIPO 1 o 2	7951440	Opción					
APH 305 – Cable de prolongación TIPO 5, 10 m para cable de conexión TIPO 1 o 2	7951450	Opción					
APH 110 Net500 – Convertidor de red (RS 232 en red RJ45)	9687440			X			
APH 406 – Cable de red TIPO 6, 3 m (conexión de red)	7951470			X (TIPO 6 o TIPO 7, en función de la longitud deseada.)	X (TIPO 6 o TIPO 7, en función de la longitud deseada.)	X (TIPO 6 o TIPO 7, en función de la longitud deseada.)	
APH 407 – Cable de red TIPO 7, 5 m (conexión de red)	7951480						
APH 408 – Cable de red TIPO 8, Crossover, 3 m (conexión directa al PC)	7951490		X (TIPO 8 o TIPO 9, en función de la longitud deseada.)				
APH 409 – Cable de red TIPO 9, Crossover, 5 m (conexión directa al PC)	7951500						
APH 510 PRT110 – Impresora de protocolos, interfaz serial	11053310						X
APH 530 – Cable de impresora para impresora de 10 m, serial para impresora APH 510 PRT110	6095260						X
APH 531 – Adaptador de módem nulo para cable de impresora	9573970						X

X = necesario, ¹potencia adicional necesaria: ServiceCard, mantenimiento del software

Cuidado de la ropa de trabajo

Ventajas y gestión de calidad perfecta del cuidado industrial de la ropa

Cuidado de la ropa en la clínica dental: limpieza respetuosa, desinfección segura, cumplimiento de las directrices

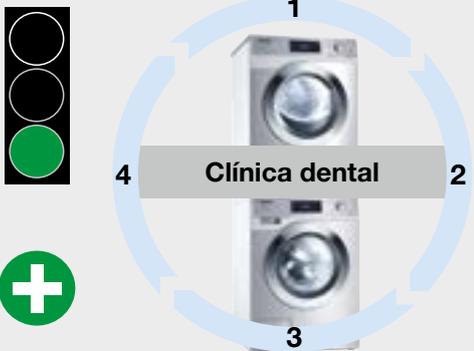

1. Ropa de trabajo después del tratamiento del paciente

2. La ropa sucia va a la lavadora industrial

3. Lavado en el programa de desinfección y secado en máquinas industriales

4. Ropa de trabajo impecable para médicos y personal




Ventajas y gestión de calidad perfecta

- Logística sencilla gracias a un sistema interno cerrado
- Limpieza conforme a las directrices para ropa de trabajo
- Lavado con procedimientos de lavado eficaces, desinfectantes y de eficiencia probada
- Ropa de trabajo limpia rápidamente disponible
- Limpieza rentable incluso de pequeñas cantidades de ropa
- El proceso de lavado de desinfección se supervisa de forma continua (sin interrupción del programa debido a un funcionamiento incorrecto, supervisión de temperatura y tiempo de parada, detección de nivel vacío con dosificación de detergente líquido)

En este conjunto de normas se recomienda un proceso de lavado desinfectante

- Robert Koch Institut (RKI)
- Seguro obligatorio de accidentes alemán
- Grupo de trabajo alemán para la higiene en la odontología
- Centro especializado para productos médicos y de higiene de la Asociación de Médicos y la Asociación Federal de Médicos alemanas
- Guía de higiene en la consulta médica

Cuidado de la ropa en viviendas privadas: profilaxis de infección inadecuada, alto riesgo de contaminación

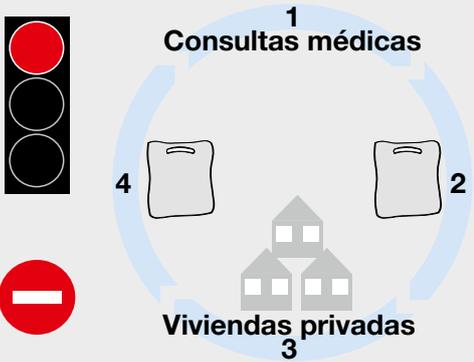

1. Ropa de trabajo después del tratamiento del paciente

2. Transporte de la ropa sucia por espacios públicos

3. Vivienda privada: lavado de la ropa de trabajo en la lavadora doméstica privada sin programa de desinfección

4. Transporte de los tejidos limpios por espacios públicos



Desventajas y riesgos incontrolables

- Transporte abierto de tejidos contaminados
- Ciclo de lavado prolongado (se debe tener más ropa de consulta disponible)
- Posible contaminación cruzada con prendas de uso privado
- Las lavadoras domésticas no tienen programas adecuados para la desinfección
- Posible contaminación de la ropa de consulta durante el transporte desde la vivienda privada hasta la consulta médica

Lavadora antiséptica PEQUEÑOS GIGANTES

Carga de 7 kg/control M Select



Lavadora	PWM 508
Manejo	M Select
Capacidad de carga [kg]	8
Volumen del tambor [l]	73
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1.600
Factor g/humedad residual* [%]	704/48
Duración** [min]	49
Tipo de calentamiento	EL
Desagüe [DP DN 22/DV DN 70]	DP o DV
Color/material frontal	LW o SST
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	850/596/714
Número de material (DP, SST (bomba de desagüe, acero inoxidable))	11 049 730
Número de material (DP, LW (bomba de desagüe, blanco loto))	11 049 710
Número de material (DV, SST (válvula de desagüe, acero inoxidable))	11 049 740
Número de material (DV, LW (válvula de desagüe, blanco loto))	11 049 720

EL = eléctrico, DP = bomba de desagüe, DV = válvula de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado, SST = acero inoxidable

* Humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente

Control M Select

- Selector giratorio y display táctil de segmento
- Panel fácilmente comprensible solo con símbolos
- Display táctil con información en el idioma local, disponible en 29 idiomas

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado minucioso de la ropa gracias al nuevo tambor protector patentado
- Humedad residual reducida gracias al elevado factor g
- Posibilidad de instalación en columna lavadora-secadora para optimizar el espacio

Accesorios opcionales

- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Adaptadores y bombas de dosificación para la dosificación automática de detergente líquido

XCI-Box

- Unidad de comunicación para conexión en red con bombas dosificadoras, sistemas de gestión energética

Secadora PEQUEÑO GIGANTE

Carga de 8 kg/control M Select



Secadora	PDR 508 EL	PDR 508 HP
Manejo	M Select	M Select
Sistema de secado	Salida de aire	Bomba de calor**
Capacidad de carga [kg]	8	8
Volumen del tambor [l]	130	130
Duración de algodón, tejidos mixtos* [min]	42/37	79/67
Tipo de calentamiento	EL	HP
Potencia calefactora [kW]	6,14	-
Salida de aire	DN 100	-
Color/material frontal	LW o SST	LW o SST
Dimensiones exteriores A1/An/F [mm]	850/596/717	850/596/777
Número de material (HP, SST (bomba de calor, acero inoxidable))	-	11905980
Número de material (EL, LW (eléctrico, blanco loto))	12081240	12081180
Número de material (HP, LW (bomba de calor, blanco loto))	-	11905970

EL = Eléctrico, HP = Bomba de calor, LW = Blanco loto, esmaltado, SST = Acero inoxidable * Duración en programa secado normal, ** Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 0,61 kg, potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potencial de calentamiento atmosférico de la secadora: 872 kg CO₂ e,

Control M Select

- Selector giratorio
- Panel fácilmente comprensible solo con símbolos
- Display táctil con información en el idioma local, disponible en 29 idiomas
- Numerosos programas especiales de serie, por ejemplo, antiséptico

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: secado de la ropa cuidadoso y homogéneo gracias al nuevo tambor protector patentado
- Secado perfecto con el sistema PerfectDry
- Ahorro de tiempo y comodidad gracias al filtro de pelusas de gran superficie
- Elevada rentabilidad gracias al eficiente motor de accionamiento que no necesita mantenimiento
- Posibilidad de instalación en columna lavadora-secadora para optimizar el espacio

Características destacadas de las secadoras de bomba de calor

- Emplazamiento en función del lugar sin instalar una conducción de salida de aire
- Clase de eficiencia energética A++: Ahorro energético de hasta el 60 % frente a una secadora de condensación convencional

Accesorios opcionales

- Bases para una carga y descarga ergonómica **XCI-Box**
- Módulo de comunicación para establecer conexiones con sistemas externos

Lavavajillas con la serie PFD 10x

Las grandes ventajas de Miele



Programas realmente cortos

¿Necesita programas cortos y resultados excelentes? Conozca los nuevos lavavajillas ProfiLine: conexiones a agua caliente y corriente trifásica, técnica de lavado inteligente y dos potentes bombas consiguen programas súper cortos a partir de solo 17 minutos y resultados perfectos. Benefíciense de múltiples detalles de equipamiento innovadores para que su vajilla brille día tras día con programas de lavado muy cortos.



Cestos flexibles + bandeja portacubiertos MultiFlex 3D¹⁾

Hemos mejorado la bandeja portacubiertos: ahora también puede colocar en su lavavajillas piezas de vajilla pequeñas, como tazas de café. La bandeja portacubiertos MultiFlex 3D1) tiene una sección central abatible y dos secciones laterales. La parte izquierda se desplaza a la derecha para acomodar vasos altos en el cesto superior. La pieza derecha se baja para colocar cómodamente cubiertos grandes y piezas de vajilla pequeñas.



Interfaz de usuario intuitiva

La lógica de funcionamiento de los electrodomésticos de integración de la Generación 7000 de Miele se ha adaptado a los lavavajillas ProfiLine. Esto significa que los aparatos se pueden manejar con la misma facilidad que los lavavajillas domésticos. Gracias al diseño del panel con símbolos interactivos, se entiende el manejo del lavavajillas ProfiLine independientemente del idioma.



Knock2open (solo para PFD 104 SCVi)

No es magia, sino Miele: Knock2open convierte el lavado de los platos en una experiencia mágica y proporciona la solución perfecta para una cocina sin tiradores. Con solo 2 golpecitos en el frontal del lavavajillas integrable, la puerta se abre aprox. 10 cm de forma totalmente automática con su sofisticado mecanismo de apertura. Una comodidad que te encantará cada día.



Secado mejorado AutoOpen²⁾

Vajilla seca en tiempo récord. Incluso piezas de menaje de difícil secado como las piezas de plástico pueden secarse hasta la descarga. Gracias a la apertura automática de la puerta al finalizar programa de lavado, el proceso de secado comienza automáticamente sin necesidad de intervención manual.



Conexión cómoda

Miele@home le permite la conexión en red de aparatos de Miele. De esta forma puede manejar y controlar cada aparato a través de la aplicación Miele@mobile* con la ayuda de un dispositivo móvil.

¹⁾ Patente europea EP 2433549B1

²⁾ Patente europea EP 2120671B1

* Requisito mínimo: Android 4.2+ / iOS 9+

Lavavajillas ProfiLine de la serie PFD 10x

Lavavajillas FreshWater



Lavavajillas	PFD 101	PFD100 Smartbiz
Diseño constructivo	Aparato de libre instalación	Aparato de libre instalación
Rendimiento [servicio/carga]	13	13
Duración del programa más corto [min]	17	36
Programas	8	8
Dimensiones exteriores A/An/F [mm]	845-880/598/600	845/ 598/ 600
Conexiones de agua	KW o WW hasta 60 °C	KW o WW hasta 60 °C
Descalcificador de agua	•	•
Conexión eléctrica: 3 N AC 400 V, 50 Hz	•	•
Potencia nominal total [kW]	7,3	7,3

PFD 101

- Modelo básico para pequeñas cocinas en oficinas, salas de exposición y bufetes
- Ideal para un máximo de 5 ciclos de lavado al día

Plus

- Dotación de cestos de serie
- Alto confort de manejo con un equipamiento completo comparado con OverView de lavado
- Descalcificador de agua integrado y conexión para dosificación de detergente líquido
- WiFiConn@ct de serie (conectividad WiFi)



Equipamiento de cestos ExtraComfort (PFD 101)

Lavavajillas ProfiLine de la serie PFD 10x

Lavavajillas FreshWater



Lavavajillas	PFD 104 SCVi XXL
Diseño constructivo	Aparato completamente integrable
Rendimiento [servicio/carga]	14
Duración del programa más corto [min]	17
Programas	8
Dimensiones exteriores A/An/F [mm]	845-910/598/570
Conexiones de agua	KW o WW hasta 60 °C
Descalcificador de agua	•
Conexión eléctrica: 3 N AC 400 V, 50 Hz	•
Potencia nominal total [kW]	7,3

PFD 104 SCVi XXL

- Lavavajillas integrable para pequeñas cocinas en oficinas, salas de exposición, bufetes, estudios de cocina y hogares
- Ideal para un máximo de 5 ciclos de lavado al día

Plus

- Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D (PFD 104 SCVi XXL)
- Dotación de cestos de serie
- Iluminación de espacio interior Brilliant light
- Alto confort de manejo con un equipamiento completo
- Descalcificador de agua integrado y conexión para dosificación de detergente líquido
- Integración perfecta en las cocinas sin tiradores (PFD 104 SCVi XXL)
- WiFiConn@ct de serie (conectividad WiFi)



Dotación de cestos MaxiComfort (PFD 104)

Purificador de aire AirControl de Miele

PAC 1045, PAC 1080, PAC 1200


Con una entrada y distribución de aire óptimas, AirControl garantiza un ambiente interior saludable. Los programas automáticos permiten un preajuste de la potencia y los tiempos de funcionamiento. La necesidad de ventilación se controla mediante un sensor integrado que mide continuamente el contenido de CO₂ en el aire de la habitación: la concentración se muestra en un display. Fácil de usar, móvil, fiable y silencioso, ofrece una protección fiable en tres versiones diferentes allí donde se reúnen personas en espacios cerrados.



Purificador de aire	PAC 1045	PAC 1080	PAC 1200
Potencia de extracción máx. [m ³ /h]	740	1300	3000
Tamaño máx. de sala recomendado [m ²]	45	80	200
Dimensiones exteriores L/An/AI [mm]	500/500/1270	500/500/1270	700/700/1300

Características destacadas: móvil. Funcionamiento automático. Protección contra virus.

- Sistema de filtrado de 5 niveles con filtro HEPA H14 con una tasa de filtración superior al 99,995 % para partículas y virus (coronavirus, entre otros), bacterias, partículas olfativas, polen, humo, etc.
- Sensor CO₂ integrado: permite el funcionamiento controlado por CO₂ para que la potencia se adapte automáticamente a las condiciones del entorno. Esto supone una reducción significativa del nivel acústico.
- Miele ThermoControl: después de apagarlo, el filtro HEPA se seca a 70 °C durante 20 minutos para inactivar los patógenos relevantes.
- Funcionamiento automático: tres programas automáticos configurables regulan el funcionamiento sin preocupaciones.
- A prueba de manipulaciones: gracias a la protección con PIN y la válvula de acceso bloqueable, no es posible el acceso de personas no autorizadas.

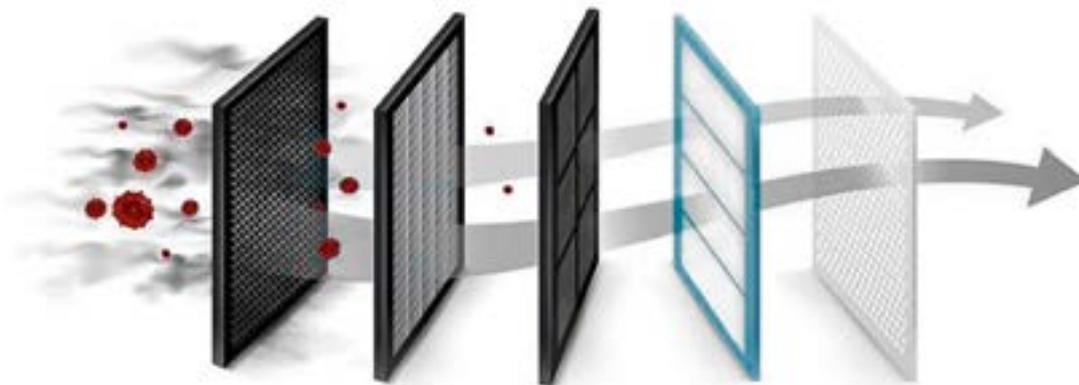

Servicio técnico

Funcionamiento seguro y conservación del valor

Miele Professional es sinónimo de una calidad sobresaliente, también en el Servicio Post-venta. Nuestra red de técnicos de cobertura nacional garantiza un servicio in situ en 24 horas. El 90 % de los casos de mantenimiento se completan directamente durante la primera visita. No en vano el Servicio Post-venta de Miele destaca desde hace años por su calidad excepcional.



Contratos con el Servicio Post-venta Miele

Mantenimiento preventivo

- Inspección
- Mantenimiento
- Incl. accesorios consumibles

Contrato de reparación

- Inspección
- Mantenimiento
- Incl. accesorios consumibles
- Incl. reparación

Capacitación de potencia de los aparatos

Capacitación de potencia

- Capacitación de instalación (IQ)
- Capacitación operativa (OQ)
- Capacitación de potencia (PQ)

Nueva capacitación de potencia

- Capacitación de potencia sin motivo especial
- Capacitación de potencia debido a motivo especial

Servicio integral desde el inicio

El Departamento de Ventas Miele ofrece servicios completos de asesoramiento al odontólogo incluso antes de la puesta en funcionamiento del aparato. El personal profesional experimentado ayuda a la hora de seleccionar los aparatos y la configuración apropiados para cada necesidad concreta. Si se desea, creamos un cálculo de rentabilidad global y presentamos una oferta individual de financiación.

Miele además ofrece una serie de comprobaciones que se ejecutan en el ciclo de vida del aparato en distintos momentos. Los técnicos con formación especial realizan comprobaciones de los procedimientos de conformidad con los requisitos legales y normativos y las recomendaciones específicas del país.

Servicio para exigencias profesionales

Los técnicos cualificados del Servicio Post-venta de Miele supervisan la entrega y puesta en funcionamiento de los aparatos y pueden llevar a cabo bajo petición diferentes comprobaciones rutinarias con la máquina en marcha. De esta forma se pueden evitar anomalías en los aparatos con antelación y constantemente se optimizan los parámetros de funcionamiento. Una ventaja adicional: la revisión y el mantenimiento regulares del aparato contribuyen a conservar el valor de la inversión.

- Servicio de calidad con una extensa red de técnicos en productos médicos (en Alemania hay más de 230 técnicos)
- Breves tiempos de desplazamiento y servicio in situ en 24 horas
- El 90 % de los casos de mantenimiento se completan directamente durante la primera visita
- Servicio de repuestos seguro de piezas de recambio originales importantes para el funcionamiento, incluso 15 años después de finalizar la producción


Contratos de servicio individuales y revisiones

Miele Professional ofrece a todas las consultas contratos de servicio orientados a las necesidades. En el contexto de dichos contratos, los técnicos del Servicio Post-venta de Miele examinan regularmente los aparatos. Dependiendo del modelo de contrato seleccionado, este englobará los análisis de funcionamiento y seguridad de todas las piezas importantes y la sustitución de componentes. Un mantenimiento periódico previene averías, aumenta la vida útil del aparato y contribuye a preservar el valor de la inversión. La oferta del Servicio Post-venta de Miele incluye además una serie de capacitación de potencia y comprobaciones de procedimiento que se ejecutan en distintos momentos del ciclo de vida del aparato.

Desde la puesta en funcionamiento hasta el

paquete completo:

Miele ofrece la opción de elegir entre varios paquetes de servicios. En relación a la puesta en funcionamiento de los nuevos aparatos, el Servicio Post-Venta de Miele puede abarcar el mantenimiento, la puesta en funcionamiento y la capacitación de potencia. En el marco de un mantenimiento se cambian las piezas de desgaste para evitar averías de forma preventiva. El contrato de puesta en funcionamiento cubre el mantenimiento regular así como los costes de otras posibles reparaciones. En la capacitación de potencia se realiza la validación de los procesos para garantizar el rendimiento de limpieza y desinfección. El paquete completo del servicio Post-venta de Miele abarca las tres ramas y ofrece un paquete completo libre de preocupaciones.

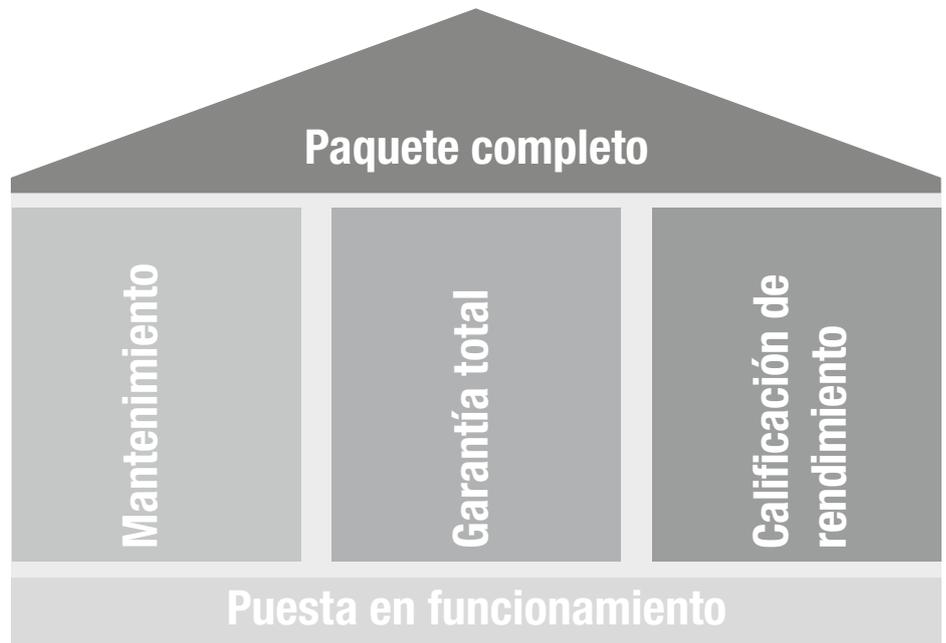

Directorio de artículos

Artículo	Página
Cesto superior A 102	13
Cesto superior A 105/1	13
Cesto inferior A 151	9
Módulo inyector A 315	13
Complemento A 317	19
Tubo filtrante A 800	13
A 801 Adaptador	16
Alojamiento A 803 para instrumental de transmisión	14
Cepillo limpiador A 804	13
A 812 Adaptador	14
Adaptador A 813/1	23
A 815 Boquilla	23
Tobera inyectora A 816	17
Vainas de lavado A 817	17
Tapas A 818	17
Vainas de lavado A 819	17
Complemento A 830	18
Tobera inyectora A 832	17
Tobera inyectora A 833	17
Tobera inyectora A 834	17
Juego de toberas Dental A 836	13
Juego de llaves A 838	14
A 865 Adaptador	14
Adaptador ADS 1/silicona para AUF 1 y AUF 2	16
Adaptador ADS 2/silicona para AUF 1 y AUF 2	16
Adaptador ADS 3/silicona para AUF 1 y AUF 2	16
APH 110 Net500, convertidor de red	27
APH 510 PRT110, impresora de protocolos	27
APH 530	27
APH 550 Segó, impresora SegóLabel	27
APH 591	27
APH 592	27
APH 595	27
APH 596	27
APS 101 Segó, licencia Segosoft Miele Edition	27
APS 102 Segó, licencia SegóAssign Plus	27
Dispositivo USB APST 002 módulo WiFi	29
Alojamiento AUF 2	16
Alojamiento AUF 1	16
ConductivityMeter CM/1	24
DataDiary	26
DataDiaryID	26
Módulo de dosificación DOS K 85 flex	21
Módulo de dosificación DOS K 85/1 flex	21
Complemento E 130 1/2	19
Complemento E 131/1 1/2	18
Complemento E 143	23
Complemento E 146	15
Complemento E 147/1 1/2	20
Complemento E 198 1/2	18
Resinas de un solo uso E 315	24
Kit de llenado E 316	24

Artículo	Página
Vaina de lavado E 336	17
Complemento E 339/1 3/5	19
E 363 Complemento 1/6 bandejas de malla	18
Complemento E 378 1/1 cesto de malla	19
Complemento E 379 1/2 cesto de malla	19
E 430/1 Complemento 1/3 jaulas de malla	20
Complemento E 468	18
Complemento E 473/2	22
Alojamiento E 476	18
Complemento E 491	22
Complemento E 520	20
Complemento E 521/2 (a la derecha)	22
Complemento E 522/1 (a la izquierda)	22
Complemento E 523 1/2	19
Complemento E 801/1	22
Complemento E 802/1	22
Complemento E 806/1	19
Complemento E 807	22
E 197 Complemento 1/6 bandejas de malla	22
E 337/1 Complemento 2/5	18
Complemento E 441/1 1/4	20
Placas filtrantes FP para AUF 1 y AUF 2	16
Bombona de desmineralización LP 2800	24
PAC 1045	37
PAC 1080	37
PAC 1200	37
PDR 508 EL	33
PDR 508 HP	33
PFD 101	35
PFD 104 SCVi XXL	36
PG 8581	5
PG 8591	5
Armario PG 8596	21
ProCare Protein Check	39
Acoplamiento rápido SK para bombonas de agua	24
Juego de cambio UBS 3	13
Juego de cambio para bombonas de recambio UfZ	24
Base UG 30–60/60–85	21
Bombona desmineralizadora VE P 2000	24
Bombona desmineralizadora VE P 2800	24
Módulo de comunicación Ethernet XKM 3000 L Med	29
Módulo de comunicación Ethernet/WiFi XKM 3200 WL LMD	29
Módulo de comunicación de serie XKM RS232 10 Med	29

Registro de abreviaturas

Explicación de las abreviaturas de Dental

AD	Conexión de agua completamente desmineralizada (Aqua Destillat)
AE	Revestimiento exterior de acero inoxidable
AW	Revestimiento exterior blanco
BW	Brilliant White
CLST	Acero inoxidable
DC	Válvula de desagüe para refrigeración de agua
DOS	Dosificación
DP	Bomba de desagüe
DSN	Bomba dosificadora
DV	Válvula de desagüe
DWC	Conexión de agua completamente desmineralizada
EL	Calefacción eléctrica
HP	Bomba de calor
i	Integrable
IMS	Independent Monitoring System (dos sensores de temperatura independientes)
LD	Dosificación líquida
LW	Blanco loto
PA	Panel
PD	Dosificación en polvo
SCi	Lavavajillas integrable con bandeja portacubiertos 3D+/bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
SCVi	Lavavajillas completamente integrable con bandeja portacubiertos 3D+/bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
SET LAN	Set: aparato con módulo LAN (módulo Ethernet)
SET WLAN	Set: aparato con módulo WiFi (Data-Diary)
SST	Acero inoxidable
U	Aparato empotrable bajo encimera
UL	Componentes certificados para EE. UU./CAN
WB	Revestimiento exterior blanco/negro
WF	Sin frente
WS	Descalcificador de agua
WW	Conexión para agua caliente
XXL	Cuba extra grande

Miele. S.A.U, España
www.miele.es/professional

Immer Besser

Desde 1899, la empresa familiar Miele es fiel a su filosofía «Immer Besser» («Siempre mejor»). Este propósito de gran alcance sienta las bases de la calidad, la sostenibilidad y el carácter innovador de una marca «Made in Germany». Un compromiso que proporciona a los clientes de Miele Professional la seguridad de haber elegido el producto adecuado.

Galardonada

El objetivo de nuestros productos y servicios es ofrecerle la mejor calidad y máxima eficiencia y esa es la razón por la cual los usuarios habitualmente eligen Miele como la mejor marca y la que más confianza ofrece. Premios de renombre como el MX Award, el iF Design Award, el reddot Design Award y el Premio Alemán a la Sostenibilidad son una prueba de la posición sobresaliente de Miele también en términos de diseño, gestión de calidad y el consumo eficiente de recursos.

Competentes

Desde hace décadas, Miele Professional desarrolla y produce lavadoras, lavavajillas, lavadoras desinfectadoras y esterilizadores de alta gama con la máxima calidad. Asimismo, unos componentes especialmente adaptados, los servicios de asesoramiento integral y la excelente respuesta del Servicio Post-venta de Miele permiten obtener en todo momento un rendimiento y una eficiencia óptimos.

Miele Professional en Internet

- Información detallada de datos técnicos, equipamientos y componentes
- Catálogos de todas las categorías de productos y sectores para descargar
- Representaciones gráficas, instrucciones y presentaciones de productos en el canal de YouTube