



Miele

Når desinfeksjonsnivået er på sitt **Maksimale**. Og plassen er minimal.

SlimLine — en ny ergonomisk maskin
for desinfisering av dentale instrumenter

SlimLine

PWD 7121 og PWD 7122



En perfekt kombinasjon

av maksimal
ytelse og
minimalt
plassbehov.



SlimLine er bare 650 mm bred og tar svært liten plass, samtidig som den har et stort nyttevolum på 252 liter. De 3 nivåene kan innredes fleksibelt med ulike kurver og innsatser. Dette gjør at du kan klargjøre opptil 66 hule instrumenter, 24 dentalkassetter, 3 instrumentrister og andre instrumenter i én og samme syklus.

Mer enn bare plassbesparende.

Oversikt over SlimLine.

Optimaliser effektiviteten på hele tannlegekontoret. SlimLine-maskinene hjelper deg med å å utnytte den tilgjengelige plassen på en optimal måte. Med pålitelige resultater og brukervennlig betjening.

Effektiv

- Kompakt, bare 650 mm bred
- Romslig kammer og en kurv med 3 nivåer for dentale instrumenter og brett
- Korte programtider takket være et kraftig og intelligent pumpesystem med frekvensstyrt sirkulasjonspumpe
- Maksimal ytelse når det kreves
- Størst mulig reduksjon av vannforbruket
- Ytterligere reduksjon av programtiden takket være oppvarmet tank*

* Modellavhengig

Ergonomisk

- Ergonomisk plasseringshøyde for enkel innsetting og tømning
- Automatisk dosering fra kjemikaliebeholdere som befinner seg inne i maskinen
- Rask og enkel ny konfigurering i henhold til ulike behov

Fleksibel

- Fleksible brytere med enkel tilpasning av programmer til individuelle behov
- 20 ledige programplasser
- Ulike kombinasjoner for plassering av instrumentene med en standardkurv og et variert utvalg av moduler og innsatser
- Fleksibel bruk av rengjøringskjemi med opptil 3 x 5 liters beholdere integrert i maskinen
- 2-dørs variant tilgjengelig som modell PWD 7122

Intuitiv

- Intelligent 7-tommers touchdisplay i farger, optimaliserte programmer og 20 ledige programplasser
- Et display som er enkelt å rengjøre
- Programmert til programvare for prosessdokumentasjon
- Programmert for nettverkstilkobling til Miele Cloud System (Miele MOVE)




Ta en nærmere titt.

Desinfeksjon på et helt nytt nivå.

De brukervennlige komponentene for innsetting, som f.eks. det fleksible systemet med kurver, gjør det lettere for deg i hverdagen. Ved å dele vogner, kurver, innsatser o.l. i tre nivåer kan de modulbaserte innsatsene plasseres på flere måter, slik at de enkelt kan tilpasses dine behov.

Alternativ System med to dører **PWD 7122**

SlimLine PWD 7122 har to dører. Disse gjør det mulig å skille mellom inn- og utlastingsside. Dette gjør at du kan skille den urene siden fra den rene siden på en hygienisk sikker måte.

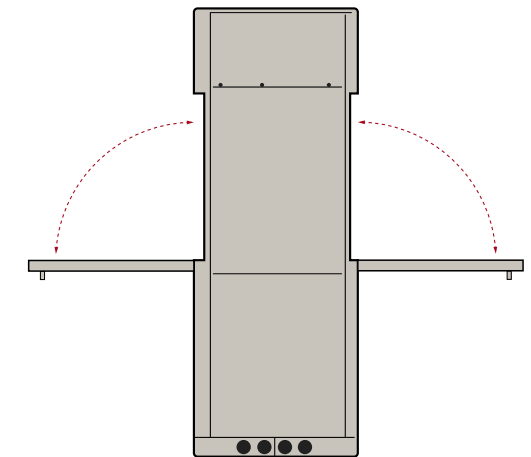

Eksempel på plassering i **APWD 217**



- 66 hule instrumenter
- 160 instrumentsett
- 6 dentalkassetter
- 18 avtrykksskjeer
- 3 instrumentrister
- 3 små siler med lokk for ulike små komponenter



- 66 hule instrumenter
- 18 dentalkassetter
- 14 klemmer
- 3 instrumentrister
- 3 små siler med lokk for ulike små komponenter





PWD 7121

PWD 7122

Generell informasjon

Utvendige mål [bredde x høyde x dybde mm]	650, 1940, 700	650, 1940, 700
Vaskekammerets dimensjoner [bredde x høyde x dybde mm]	570, 717, 590	570, 717, 590
Nytttevolum [liter]	252	252
Konsept for innlasting	Tilførselsvogn med moduler og innsatser	Tilførselsvogn med moduler og innsatser
Ergonomisk plasseringshøyde	♦	♦
Programmer	Vario TD Dental serviceprogram	Vario TD Dental serviceprogram
Ledige programplasser	20	20
Valg av program	7-tommers touchdisplay	7-tommers touchdisplay

Funksjoner

Maskin med én dør	♦	–
Maskin med to dører	–	♦
Helglass, nedfellbar(e) dør(er)	♦	♦
Kammerbelysning	♦	♦
Materiale i vaskekammeret	1.4404/316L (elektropolert)	1.4404/316L (elektropolert)
Lufttørring	♦	♦
HEPA H14-filter	♦	♦
Dampkondensator	♦	♦
Avløpspumpe	♦	♦
Doseringspumper [antall]	2	2
Frekvensstyrt pumpe	♦	♦
Vanntilkoblinger	VV, KV, AD	VV, KV, AD
Elektrotilkobling 3 N AC 400 V, 50 Hz	♦	♦
Total tilkoblingsverdi [kW]	10,1	10,1
WiFi	♦	♦
USB-port	♦	♦
Ethernett-grensesnitt	♦	♦
Kapasitet rengjøringsmiddel	3 x 5 liter	3 x 5 liter
Lekkasjesensor	♦	♦

Funksjoner (avhengig av modell)

Forvarmingstank	♦	♦
Sensor for ledningsevne	♦	♦
Integrert kalkfilter	♦	♦

Valgfrie moduler

Tørre kontakter	♦	♦
Ekstra doseringspumpe(r)	♦	♦
Trykkøkingspumpe for AD-vann	♦	♦
Sensor for ledningsevne	♦	♦
Kjøling med avløpsvann	♦	♦

Kapasitet (eksempler)


66 hule instrumenter 24 instrumentbrett, 18 avtrykksskjeer 3 instrumentbrett	♦	♦
6 hule instrumenter 160 instrumentsett 18 avtrykksskjeer 3 instrumentbrett	♦	♦

Miele 360PRO.

En tilpasset løsning for enhver klinikk.

Presisjon er et ansvar. Det er vår drivkraft.

Vi vet at instrumentbehandling er en viktig oppgave for tannlegeklinikker innenfor alle spesialfelt. For å levere optimal støtte tilbyr vi 360PRO, et helhetlig system med integrerte løsninger fra ett og samme sted. Fra planlegging til bærekraft, fra tilbehør til nettverkstilkobling, fra prosesskjemi til vedlikehold og rengjøring av arbeidsklær: Vi er alltid der for deg, slik at du kan fokusere fullt og helt på pasientene dine.

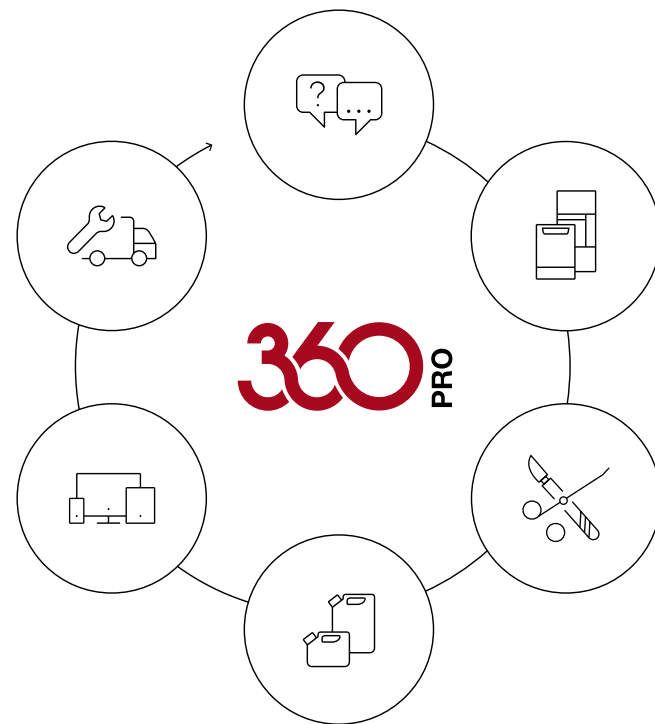

Mer om Miele 360PRO
www.miele.no/pro/dental

Bærekraft

og fremragende design.

Bra for teamet ditt, og enda bedre for planeten.

Helt siden 1899 har «Immer Besser», alltid bedre, vært vårt motto. Det motiverer oss til å være bedre i morgen enn vi var i går. Det motiverer oss hver dag til å utvikle bedre og smartere enheter. For eksempel reduseres driftskostnadene og det økologiske fotavtrykket ved at reservedeler er tilgjengelige 15 år etter at en maskin er gått ut av produksjon. Maskiner som er testet for 15 000 driftstimer, sikrer lang levetid. I tillegg er maskinene våre nå utstyrt med digitale bruksanvisninger, og dermed unngår vi også avfall.



Mer om bærekraft
hos Miele Professional
www.miele.no/pro/baerekraft



Allsidig

Beskyttelse.

Våre PROtect Service-løsninger kombinerer omfattende serviceløsninger, maksimal budsjettkontroll og smidig levering av reservedeler. Vi tilbyr deg transparent og bransjetilpasset rådgivning, koordinerer avtaler og garanterer tilgjengeligheten av passende reservedeler – selv 15 år etter at maskinen har gått ut av produksjon.



Mer om PROtect
www.miele.no/pro/protect

Ingenting kan erstatte **personlig veiledning.**

Kontakt oss for å finne ut mer om ditt nye teammedlem – ta kontakt på telefon eller fyll ut kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Telefon: 67 17 34 40

Mandag – fredag: 08:00–16:00



Mer om Miele SlimLine
og kontaktskjemaet
www.miele.no/pro/slimline