

Miele

Optimala resultat och maximal tillförlitlighet.

Rutinkontroller för optimala rengöringsresultat



Miele Professional. Immer Besser.

Kontrollera rengöringsresultat under rutinmässig drift.

Tillförlitlig rengöring är ett måste inom tandvården. En lyckad processvalidering lägger grunden för att säkerställa att rengöringen är effektiv, men detta steg är inte tillräckligt i sig självt. Processerna måste också övervakas under rutinmässig drift. Miele Professionals lösningar i form av ProCare Sure I-PM, Protein Check och vårt Helix-test ger ditt tandvårdsteam verktygen för att bedöma och dokumentera hygienstandarden.



ProCare Sure I-PM

Användning: processindikator för rutinkontroller och kvalitetsövervakning av rengöringsprocessen.

Funktion: vid jämförelse med en referens som har skapats (till exempel som en del av valideringen) ger visuella kontroller av indikatorer insikter om ändringar som har gjorts i processparametrarna. Viktiga parametrar är bland annat vilket rengöringsmedel som används samt tid, temperatur, mekanisk påverkan och vattenkvalitet.

Tillämpning: testet tillämpas under rengöring med termisk desinfektion. Minst två processindikatorer bör användas i varje cykel. Indikatorerna viks och placeras i diskutrymmet med hjälp av plathållarna. Färgremorna kontrolleras sedan efter programcykeln.



*Startpaket för 16 programcykler, indikatorpaket för 48 programcykler



Miele Professional – allt från samma källa.

Vår omfattande 360PRO-tjänst skapar fördelar för din mottagning på alla nivåer: kraftfull utrustning, perfekta komponenter, skräddarsydda processkemikalier och processindikatorer för rutinkontroller, plus programvara för att skapa processdokumentation och säkerställa tillförlitlig service.

360 PRO


ProCare-proteinkontroll

Användning: för att ge kvalitativa bevis på proteinrester som en del av rutinmässiga rengöringskontroller.

Funktion: rutinmässiga provbaserade kontroller utförs genom nedsmutsning av proteiner som sedan görs synliga utan att det behövs djupgående laboratorieundersökningar. En speciell färglösning (Ponceau S) i pennan ger visuella bevis på proteinrester på instrumenten efter avslutad instrumentrengöring.




Användning: produkten används efter rengöring. Färgämneslösningen frigörs genom att pennans spets trycks mot ytan på de rengjorda instrument som ska kontrolleras. Vätskan måste få verka i tre minuter och sedan sköljas under rinnande vatten i minst tre sekunder. Om det finns kvarvarande protein på testytan märks detta omedelbart genom en färgväxling.

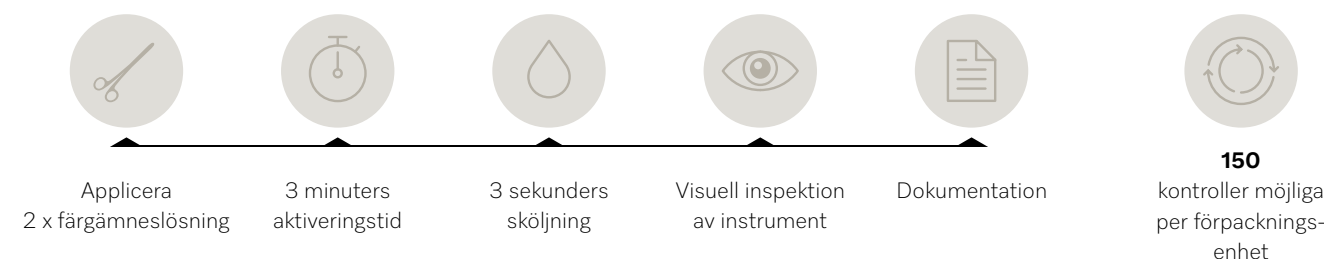


Helix-test

Användning: bedömning av ånggenomträngning i enlighet med EN 867-5 som en del av rutinkontroller av autoklaver med klass B-ånga.

Funktion: ånggenomträngningstestet använder en kemisk indikator för att kontrollera om tillräckligt med ånga har trängt in i den ihåliga delen. Enheten för processutmaningen simulerar ett ihåligt instrument och indikatorn visar testresultatet genom att ändra färg.

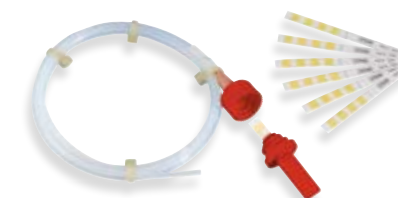

Användning: Helix-testet utförs som en del av rutinkontrollen före dagens första sterilisering. För detta ändamål placeras enheten för processutmaningen i autoklaven med indikatorremсор, enligt tillverkarens anvisningar, och det relevanta testprogrammet startas. När programmet har avslutats kontrolleras färgremсорn visuellt för att se om ångan har nått hela enheten för processutmaningen, vilket indikerar en grundlig steriliseringsprocess.

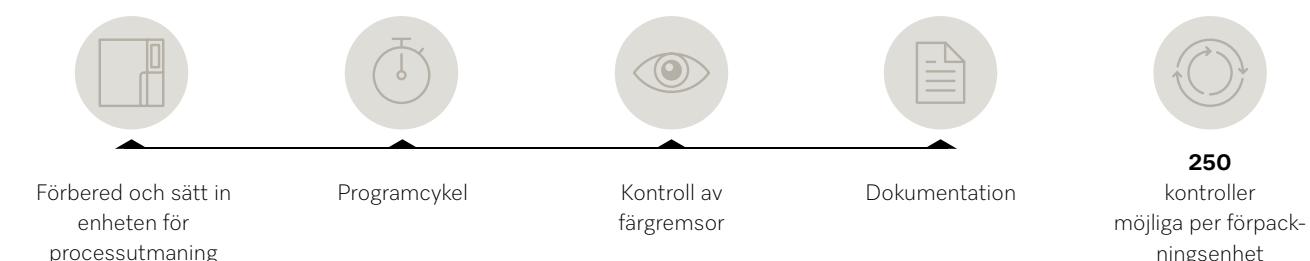

Miele AB Sverige
www.miele.se/p
08-562 29 800
professional@miele.se