

美诺清洗消毒机

Miele
PROFESSIONAL

牙科器械再处理整体方案



来自德国美诺Miele的专业品质 – 精益求精!



50多年来，德国美诺Miele在研发牙科器械再处理解决方案的历程中非常重视与牙医及器械制造商开展密切合作。这种合作完全建立在相互信任和大力创新的基础之上，而这些创新成果的价值也在实践中得到了充分印证。

50 YEARS Medical Technology

质量

患者寄望于医生的专业技能，而美诺有口皆碑的品质也完全值得信赖！精选的材料、精湛的工艺以及成熟完善的技术为美诺在医疗清洗消毒技术领域赢得了杰出的声誉。美诺的售后服务也因屡获殊荣而声名远播。

性能

德国美诺Miele设备具有卓越的性能。同时提供各种配件和工艺，满足您日常实际需求。即便在专业性极强的应用中也展现出完美的性能和高效率，令您在短时间内即可实现昂贵器械的重复使用。

效率

德国美诺Miele设备具有与众不同的经济性，为您带来优质效益：这些设备不仅精密快速，而且对不同材料兼容性强。同时兼具高品质、易于维护和持久耐用的特点，令您的投入物有所值。此外，还具有节水、节约化学试剂用量的优点，有助于控制操作成本。



美诺清洗消毒机 – 性能更高



清洗消毒机	G 7881	G 7891
宽 [mm]	600	600
外部尺寸 高 / 深 [mm]	H 850 (820*) / D 600	H 850 (820*) / D 600
持续时间/ VarioTD**[分钟]	42	42
负载		
个吸唾器	26	26
器械(手机)***	11或30支	11或30支
集成烘干功能		•

* 可置于台面下

** 清洗和消毒功能

*** 视上层篮架的类型而定 (见第7页)

美诺清洗消毒机 – 带来多重效益，随时获得投资回报

美诺清洗消毒机对牙科器械进行安全、反复清洗和消毒。
KaVo和W&H等领先制造商都推荐使用该清洗消毒机
对其器械进行再处理。



彻底的清洗

德国美诺Miele为要求苛刻的涡轮手机和器械反角再处理研发了一整套实用的解决方案。注射式接口可对器械的内腔进行彻底的清洗和消毒。

- 专用接头可对涡轮手机及器械反角的内腔和内表面进行彻底的冲洗。
- 采用Vario TD 程序，温度稳定，能够有效保护器械延长使用寿命（93°C，5分钟）。



一流的效率

美诺清洗消毒机具有超高效率。

- 采用优质材料和精湛工艺，易于维护且持久耐用。
- 节水和节省化学药剂用量，有助于降低各循环的清洗成本。
- 清洗性能极佳，且各循环周期短。
- 对器械进行最佳保护。



超大的容量

美诺清洗消毒机具有超大容量和处理能力。

- 所有型号的腔体均可使用两层篮架。
- 强大的循环和喷淋技术与智能控制相结合，可确保较短的程序循环时间。
- 篮筐和插件的适用范围非常广泛，可确保高效清洗各种常见口腔器械。

标准配置



G 7881 清洗消毒机
大腔体、清洗快速，适用于同时服务多间诊室

标准配置

O 177/1 带灌注口上层篮架，可负载11支手机
(或O 187带灌注口上层篮架，可负载30支手机)

E 522/1 插件，可负载9个不锈钢牙托

E 521/2 插件，可负载7把拔牙钳或正畸钳


E 197 器械篮筐

E 337/1 插件，适用于垂直器械

U 874/1 下层篮架

E 339/1 插件，可负载16个托盘

E 379 器械篮筐

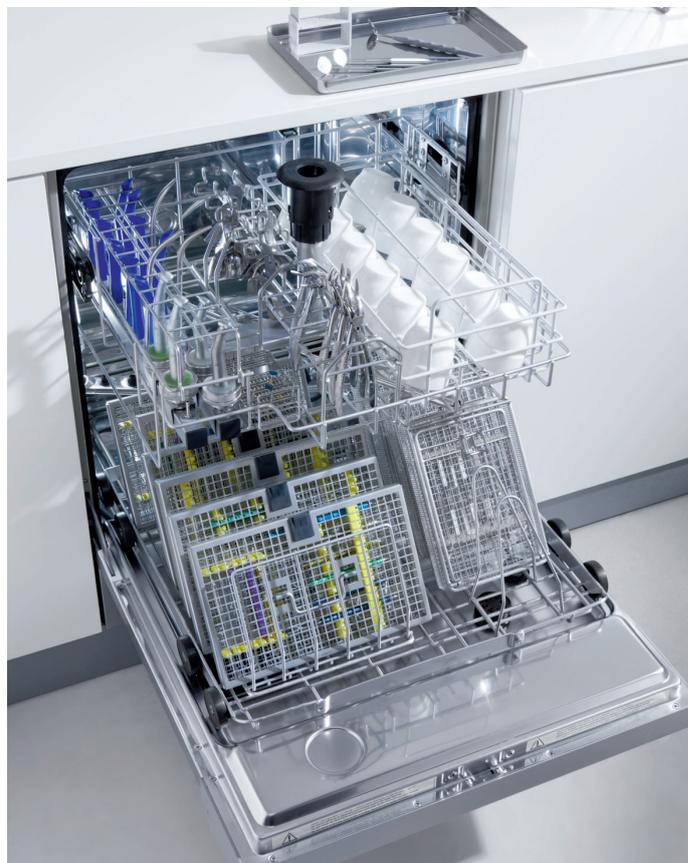

G 7891 清洗消毒机
大腔体、快速清洗及带烘干功能的顶级设备。

标准配置

O 177/1 带灌注口上层篮架，可负载11支手机
(或O 187带灌注口上层篮架，可负载30支手机)

E 522/1 插件，可负载9个不锈钢牙托

E 521/2 插件，可负载7把拔牙钳或正畸钳

E 147 插件，可负载10~12个漱口水瓶

U 874/1 下层篮架

E 523 插件，可负载6个

E 198 插件，供6个E197篮筐使用

篮架与插件



○ 187 顶层篮架/带灌注口

- 带灌注口上层篮架，可负载30支手机
- 装载高度170 mm
- 高250mm
- 宽531mm
- 深475mm
- 不支持粉剂分配



○ 177/1顶层篮架/带灌注口

- 右侧用于放置插件
- 左侧用于放置空心体/器械
- 内置喷淋臂
- 装载高度230/205 mm
- 高度可调+/- 20 mm
- 高263mm
- 宽498mm
- 深455mm



U 874/1 底层篮筐

- 用于放置插件
- 装载高度约为220 mm +/- 20 mm
- 装载尺寸：495 x 502 mm
- 高50mm
- 宽534mm
- 深515mm



E 473/1插件

- 带盖篮筐，用于微小器械
- 可挂接在篮筐中
- 高85mm
- 宽60mm
- 深60mm



E 430/1 插件1/3 篮筐

- 用于放置器械
- 网格尺寸：5mm
- 高40mm
- 宽150mm
- 深445mm



E 130 插件 1/2

- 可负载10个篮筐
- 11个支架 高170mm、间隔35mm
- 高180mm
- 宽180mm
- 深445mm



E 337/1 插件 2/5

- 供垂直放置的器械使用
- 12个插格，约22 x 28 mm
- 4个插格，25 x 28 mm
- 48个插格，13 x 14 mm
- 1个中心滴水盘
- 高113mm
- 宽173mm
- 深445mm

美诺中国 (Miele)
上海总公司
上海市静安区石门一路82号
美诺之家 200040
电话：+86 21 6157 3500
传真：+86 21 6157 3511

北京分公司
北京市朝阳区光华路1号
嘉里中心南楼三层 100020
电话：+86 10 5783 2500
传真：+86 10 5783 2600

广州分公司
广州市天河区天河路385号
太古汇1号楼2105室 510620
电话：+86 20 3868 2666
传真：+86 20 3868 2900

追求卓越

自1899年以来，Miele始终忠于其价值取向，秉承 'Immer besser' "追求极致，永不妥协"的信条，为客户提供高质量的产品。

屡获殊荣

Miele 专注于顶尖质量与可靠度发展，2012年再度荣获最值得信赖品牌奖。

德国品质，始终如一

Miele Professional 致力于为客户提供高品质，始终如一的超耐用医用织物清洗消毒机、烘干机、相关配件及优质服务。